



Használati utasítás

Állítható fürdőkád be ülőke SD11280



Használat előtt:

Az állítható fürdőkád ülés orvosi eszköz. Ideális segítség a mozgáskorlátozott embereknek a fürdőkádba való be- és kiszállásban. Csak olyan személyek használhatják, akik képesek a felső testrészüket használni, opcionálisan gondozó segítségével. A fürdőkád csökkentett mélysége megkönnyíti a leülést és a felkelést. Lehetővé teszi, hogy kényelmes helyet foglaljon a víz felett vagy a vízben. A fürdőkád ülőke szinte minden szabványos fürdőkádhoz állítható.

Javallat: csökkent állóképességűeknek.

Ellenjavallat: A fürdőkád ülést nem használhatja olyan személy, aki nem tudja saját maga az egyensúlyát megtartani.

Első használat előtt:

Távolítsa el a doboz tartalmát. Összeszerelés előtt ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy szállítás közben nem-e sérültek. Szállítási sérülés esetén NE HASZNÁLJA. További utasításokért forduljon a kereskedőhöz.

Csomag tartalma:

- 1 műanyag ülőke
- 2 oldalsó rész,
- 2 központi rúd

Összeszerelés:

- A telepítést és az üzembe helyezést csak képzett és képzett személyzet végezheti.
- Először az oldalsó részeket helyezük a központi rúdra. Tartsa lenyomva az egyik központi rúd nyomógombját, amíg a középső rúd be nem kattán.
- Most a fürdőkádülés mindkét nyomógomb lenyomásával a megfelelő méretre állítható. Állítsa be úgy, hogy az oldalsó részek egyformán feküdjenek a kád mindkét peremén a szoros illeszkedés érdekében
- Ezután a műanyagülésre kell helyezni, és le kell nyomni, amíg hallhatóan a helyére nem pattan mind a négy sarkánál.

Használat:

Minden használat előtt ellenőrizze az ülés szoros illeszkedését. Kérjük, üljön le óvatosan egyenesen az ülés közepére, különben dőlés- és csúszásveszély áll fenn.

Tisztítás/fertőtlenítés:

- Tisztítás során ne használjon éles, súroló hatású tárgyat vagy tisztítószert.
- Az összes alkatrészt a legjobb, ha nedves ruhával tisztítja, enyhe háztartási tisztítószerral.
- A fürdőkádülőke a kereskedelemben kapható klórmentes fertőtlenítőszerrel fertőtleníthető.
- **FONTOS:** A fertőtlenítőszer használatakor be kell tartani a gyártó használati utasításait.

Biztonsági utasítások:

- A fürdőkádülést csak olyan személyek használhatja, aki saját maga tudja szabályozni az egyensúlyát. Javasoljuk, hogy egy gondozó nyújtson segítséget a leüléskor- és felálláskor.
- Vegye figyelembe a használati utasításban szereplő maximális terhelhetőséget, amely 120 kg.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fürdőkádülőke sértetlen és szilárdan rögzítve van-e, ellenkező esetben ne használja tovább!
- Minden használat előtt ellenőriznie kell az ülés szoros illeszkedését.
- Az ülőkét csak egy személy használhatja.
- Legyen óvatos sampon és tusolószer használataival, mert csúszásveszélyes lehet. Ne használjon olajos termékeket! Tartsa a fürdőkád peremét tisztán, különösen a ülőke környékén.
- A fürdőkádülőke nem alkalmas hosszan tartó ülésre.
- Javasoljuk a fürdőkádülőke rendszeres ellenőrzését, illetve a hibás alkatrészek cseréjét, ha szükséges. A sérült ülőkét a továbbiakban nem szabad használni.

Karbantartás:

Az ülőke kopó alkatrészeit szakképzett embereknek havonta ellenőriznie kell.

Műszaki adatok:

Anyaga:	alumínium keret, műanyag ülőke	Keret állíthatósága:	73-81 cm
Színe:	alu/fehér	Max terhelhetőség:	120kg
Ülés méretei:	37*23 cm	Átlagos élettartam:	5 év

Garancia:

A törvényes garanciális igényeknek megfelelően. A garancia nem, terjed ki a természetes elhasználódásból, szándékoságból, hanyagságból vagy nem megfelelő kezeléssel/használatból eredő hibákra. Valamint olyan hibákra, amelyek a használhatóságot csak elhanyagolható módon befolyásolják. A műszaki fejlesztést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

Tanács:

A kád ülőkecseréjét vagy javítását csak képzett személy végezheti eredeti alkatrészek felhasználásával.

Rev.06 / 18



Sundo Homecare GmbH | DE-30916 Isernhagen
www.sundo-homecare.de



Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft 2000 Szentendre, Vasúti villasor 14. 26-309223
