

Használati utasítás

Anti-Decubitusz levegő matrac pumpával

0806276 (0806277 & 0806278)



MOBIAK[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Fontos biztonsági utasítások

TERMÉKLEÍRÁS

Az anti-decubitus matracokat kifejezetten ágyhoz kötött betegek felfekvésének kezelésére és segítésére tervezték. Használhatók kórházi vagy otthoni használatra. Az ödéma elkerülése érdekében egyenletesen ossza el a nyomást a testre.

A szivattyú átkapcsolja a légnyomást a matracban, könnyed masszírozás érzetét keltve és aktiválja az immobilizált, szétterülő sejteket.

Ez a termék olyan betegek számára javasolt és javasolt, akik valószínűleg napi 15 óránál többet töltenek ágyban, valamint olyan betegeknek, akiknél alacsony vagy közepes a fekélyek és felfekvés kialakulásának kockázata.

ÜZEMELTETÉS HASZNÁLAT

A buborékos matrachoz (0806277)

Helyezze a légmatracot az ágymatrac fölé, először az alsó lepedőt feszítse fel, ügyelve arra, hogy a légbemenet a lábak oldalán legyen.

Rögzítse rögzítő hevederekkel a matrac alatt.

Helyezzen a légmatrac fölé egy vékony, légáteresztő anyagot, ha nincs hozzá saját huzata, hogy ne érintkezzen közvetlenül a páciens bőrével.

A szivattyúhoz (0806278)

Rögzítse a matracot a szivattyúhoz a csomagban található megfelelő tömlők segítségével.

Csatlakoztassa a pumpát az áramforráshoz, nyomja meg az "ON/OFF" kapcsolót, és forgassa el a gombot maximumra, hogy felfújja a matracot, MIELŐTT a beteg használta.

Amikor a matrac teljesen fel van fújva, a kapcsoló segítségével beállíthatja a nyomástartományt a felhasználó igényeitől függően.

A készülék üzemmód kapcsolóját, **ALTERNATÍV** módba kell állítani a megfelelő működéshez. A **STATIC** üzemmód a matrac folyamatos felfújását végzi. Ez használható pl. tervezett áramszünet vagy szállítás esetén

FIGYELEM: a STATIC üzemmód csak 20 percre szól!!!

ÜZEMELTETÉS HASZNÁLAT

A szivattyúhoz (0806278)

Nyomja meg a "narancssárga" kapcsolót a Statikus nyomás kiválasztásához. Ez a kapcsoló aktiválja vagy deaktiválja a váltakozó levegőáramlást a szivattyúból a matracba, és folyamatos áramlást biztosít.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy a fenti termék megfelel a 745/2017/EGK orvosi berendezésekről szóló irányelv és a ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648.ΦΕΚ 2198B/02-10-2009 görög nemzeti jogszabályok előírásainak.

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a

745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, és adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

A jelen nyilatkozatban szereplő minden termék megfelel a műszaki dokumentációjában szereplő műszaki előírásoknak. Ha a megfelelő karbantartást és a terméket a „használati utasítás” szerint használják, akkor a termék biztonságos és hatékony, és nem veszélyezteti a beteg, a felhasználó és/vagy harmadik fél egészségét.

Ezt a nyilatkozatot az illetékes hatóság orvostechnikai eszközök gyártói nyilvántartásában (EOF) való nyilvántartásba vételéről szóló igazolás alapján adják ki.

A termék az I. osztályba tartozik, az 1. osztályozási szabály és megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 745/2017/EGK irányelvnek.



SPECIFIKÁCIÓK

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Szivattyú | Feszültség (V) – Frekvencia (Hz) | AC22V/ 50HZ |
| | Levegő kimenet | ≥5-6 liter/perc |
| | Hatótávolság | 50mHg- 110mmHg |
| | Ciklus idő | 12 perc |
| | Energiafelhasználás | ≤7 W± 10% |
| | Zaj | ≤25dB±10% |
| | Méretei (H x Sz x M) | 26 x 12,5 x 8,5 cm |
| | A szivattyú súlya | 1,3 kg |
| Buborék matrac | Max terhelés | 130 Kg |
| | Szín | Blue |
| | Anyag | Orvosi minőségű PVC |
| | PVC vastagsága | 0,3 mm |
| | Méretei (H x Sz x M) | 200 x 90 x 7.0 cm |
| | Kábel hosszúság | 120cm |
| | Súly | 2 Kg |

KARBANTARTÁS

- A matrac tisztítása: Használjon puha rongyot vagy szivacsot és enyhe szappanos vizet. FIGYELEM: Ne használjon savas és maró hatású higításokat.
- Ne dohányozzon, és ne használjon lángot a matrac közelében.
- A matracot ne érje közvetlen hőforrás.
- Ha menteni kell a matracot, légmentesen, összecukva
- A szivattyút tiszta, száraz és jól szellőző helyen tárolja vagy tárolja.
- A szivattyú tisztítása előtt válassza le az elektromos hálózatról.
- Tisztítsa meg a szivattyút egy száraz ruhával. FIGYELEM: Ne érje a szivattyút folyadékkal

FONTOS (!)

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne válassza le a tömlőket a szivattyú működése közben
- Ne használjon éles tárgyakat a matrac közelében.

- ❑ Ne lépje túl a gyártó által javasolt maximális terhelést (kg).
- ❑ Védje a termékeket olajokkal, testápolókkal, krémekkel, vattával, fürdőlepedővel letakarva.
- ❑ Ne használjon súroló hatású alkohol alapú tisztítást a matracnál. Ez károsíthatja a réteg anyagát.
- ❑ Minden napi használat után tisztítsa meg a kárpitot.
- ❑ Javasoljuk, hogy a kárpitot enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg, hogy megóvja az olajfoltoktól és a portól. Általános gyakorlat az antibakteriális szappan és víz keverékével töltött spray-palack használata. Permetezze be a felületet, majd törölje le tiszta törülközővel. A legjobb megoldás, ha enyhe szappannal kevert meleg vízzel tisztítja meg és alaposan szárítja meg.
- ❑ Védje meg a réteget a karcoktól, vágásoktól és szúrásoktól.
- ❑ Ne hagyja bekapcsolva a terméket, ha nem használja



FONTOS (!)

A szivattyú sérülése vagy meghibásodása esetén forduljon hivatalos és képzett forgalmazójához.

VIGYÁZAT! (!)

Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben.

A készülékkel csak képzett vagy felfekvés kezelésére és megelőzésére kiképzett személyzet dolgozhat.

A MOBIAK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.

A MOBIAK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.



Környezetvédelem

Ha egy napon úgy találja, hogy a készüléke cserére szorul, vagy már nem szolgálja Önt, vegye figyelembe a környezetet:

1. Ne dobja ki készülékét a kommunális hulladékkal együtt (ez egyben a feltüntetett újrahasznosítási szimbólum fontossága is)
2. Lépjen kapcsolatba a települési hatósággal, és jelölje meg a készülék újrahasznosítási helyét.
3. A legtöbb haszontalan készülék a megfelelő helyen újrahasznosítás segít megóvni a környezetet és a működést újra a készülék anyagait.

ALKATRÉSZEK

| REFERENCIA SZÁM | LEÍRÁS |
|-----------------|---------------------|
| 0806277 | LÉGMATRAC „OCEAN” |
| 0806278 | SZIVATTYÚ „PRÉMIUM” |

GARANCIA


A termékre szivattyúban két (2) év, a matracra és a többi nem mechanikus alkatrészre hat (6) hónap a garancia. A garancia a gyári hibákra vonatkozik, nem pedig a termék nem megfelelő használatából/karbantartásából eredő károkra.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM vonatkozik a nem megfelelő használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, visszaélésből vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkra.

A jótállás nem terjed ki a következők által okozott károkra vagy hibákra: természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (adott esetben) és szállítási társaságok.

Eseményjelentés

Az eszköz használatával kapcsolatban bekövetkező minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

 MOBIAC S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

