

BIDÉ-BETÉT



> INTIM HIGIÉNIÁHOZ



> MINDEN
SZABVÁNYOS WC-VEL
KOMPATIBILIS



sundo
HOMECARE

Rendeltetésszerű használat:

A bidébetét intim higiéniához és ülőfürdőhöz használható. Ütésálló műanyagból készült, és minden szabványos WC-vel kompatibilis.

Javallatok:

Aranyér (hideg fürdő); menstruációs/hasi panaszok, hólyagbetegségek, vese- és bélproblémák (török); egyes fertőző betegségek (például Kuhn-féle fürdő). Használat előtt tartsa kéznél. Szükség esetén konzultáljon orvosával, valamint a lehetséges gyógynövényes/fürdővel kapcsolatban is.

Használat:

Használat előtt bő vízzel belül és kívül tisztítsa meg.

A felszereléshez emelje fel a WC-ülőkét, és töltsse fel a bidét langyos vízzel, amíg körülbelül félig meg nem telik.

Csak olyan adalékanyagokat használjon, amelyeket intim higiéniára terveztek, vagy a gyártó ajánl.

Fürdés után emelje fel a bidét a szappantartónál fogva, és hagyja, hogy a víz a WC-be folyjon.

Tisztítás és ápolás:


A bidé szabványos tisztítószerekkel tisztítható.

Fontos: Fertőtlenítőszer használata esetén kövesse a gyártó utasításait.

Biztonsági utasítások:

Csak WC-csészékben használható!

Fürdőszobai adalékanyagokat csak orvossal való konzultáció után használjon!

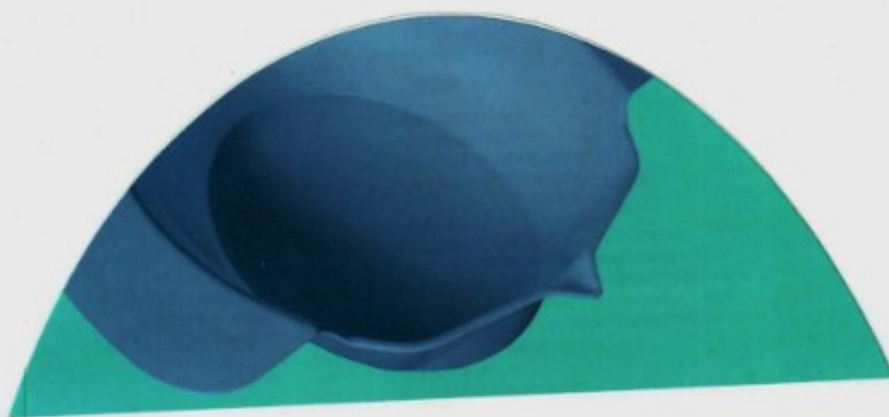

Garancia

A törvényben foglalt jótállási igényeknek megfelelően. A jótállás alól ki vannak zárva a természetes kopásból, a szándékosságból, a gondatlanságból vagy a nem megfelelő kezelésből vagy használatból eredő hibák, valamint azok a hibák, amelyek a szerszám értékét vagy használhatóságát csak jelentéktelen mértékben befolyásolják. Fenntartjuk a jogot a műszaki fejlesztést szolgáló módosításokra.

WE185-0425

Art.-Nr. / Item No. / N° art
X 18 000
weiß / white / blanc / wit
4 250629 305840

Art.-Nr. / Item No. / N° art
18 001
grün / green / vert / groen
4 250629 305857

Art.-Nr. / Item No. / N° art
18 002
blau / blue / bleu / blauw
4 250629 305864



Sundo Homecare GmbH | Bahnhofstraße 13 | DE-30916 Isernhagen
Internet: <https://www.sundo-homecare.de>

Produkt und Verpackung sind gemäß der vor
Ort geltenden Bestimmungen zu entsorgen. | Product and packaging must be disposed
of in accordance with local regulations.

