

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
BioFlote™ 2000 LÉGFÚVÓS MATRAC



**FIGYELEM!**

A matrac használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

RENDELTETÉS

Ez a termék olyan személyek számára készült, akik:

- akiknek I. stádiumú nyomásérzékeny fekélyek kezelésére és megelőzésére van szükségük, miközben a beteg kényelmét is optimális szinten kell
- akik tartósan otthoni, rövid távú ápolásra szorulnak;
- akiknek orvos vagy gyógytornász által ajánlott kezelésre és a lágy testszövetekre nehezedő nyomás okozta fájdalom csökkentésére van szükségük.

Ezt a terméket olyan személyek használhatják, akik általános ápolási eljárások elvégzésére képesek, és akik megfelelő képzésben részesültek, valamint ismeretekkel rendelkeznek a felfekvések megelőzéséről és kezeléséről.

**FIGYELEM!**

A készülék nem alkalmas gyúlékony folyadékok és gázok közelében történő használatra.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Elektromos termékek használata során, különösen gyermekek jelenlétében, be kell tartani az összes biztonsági óvintézkedést, beleértve az alábbiakat.

VESZÉLY!

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében kérjük, hogy:

2. Fürdés közben ne használja a matracot.
3. Használat után mindig azonnal kapcsolja ki a készüléket.
4. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet vagy a kádba vagy a mosdóba húzódhat.
5. Ne tegye vízbe vagy más folyadékba, és ne merítse vízbe a készüléket.
6. Ne érintse meg a készüléket, ha vízbe esett. Ebben az esetben azonnal húzza ki a készüléket az áramellátásból.

FIGYELMEZTETÉSEK!

Az áramütés, tűz vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

1. Mérje fel annak valószínűségét, hogy a készülék csapdává válhat a beteg számára, és korlátozhatja mozgását vagy teljesen mozgásképtelenné teheti. Ha ilyen helyzet kialakulásának valószínűsége magas, a beteget folyamatos felügyelet alatt kell tartani.
2. Ne használja gerinc sérüléssel rendelkező betegeknél.
3. Gyermekek által vagy gyermekek közelében történő használat esetén feltétlenül felügyelje a készüléket. Egyes apró alkatrészek könnyen eltávolíthatók, ami fulladás vagy áramütés veszélyét jelenti.
4. Használja a felhasználói kézikönyvben leírt rendeltetésszerűen. Ne használja a gyártó által nem ajánlott célokra. Ne használjon a gyártó által megadottaktól eltérő matracokat.
5. Ne használja, ha a készülék nem működik megfelelően, a kábel vagy a dugó megsérült, leejtették, megrongálódott vagy vízbe esett. Ebben az esetben vigye vissza a készüléket egy hivatalos szervizközpontba ellenőrzésre/javításra.
6. Tartsa a tápkábelt távol forró felületektől.
7. Ne takarja el a levegőbemenetet. Ne helyezze puha felületre (ágy, matrac, takaró), amely elzárhatja a levegőbemenetet. Tartsa tisztán a szivattyú közvetlen környezetét – ne legyenek benne állati szőrök, emberi hajszálok, levágott szőrszálak vagy más apró részecskék.
8. Ne módosítsa/javítsa a készüléket a gyártó engedélye nélkül.

9. Ha úgy gondolja, hogy allergiás tüneteket tapasztalhat vagy már tapasztalt a matrac érintkezésekor, azonnal forduljon orvosához.
10. A termékkel kapcsolatos bármely súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a beteg lakik.

1. BEVEZETÉS

A használati utasítást a készlet első beállításakor, illetve a matrac és a szivattyú helyes használatának emlékeztetésére kell használni.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Az alternáló nyomású felfekvésgátló matracsrendszer rendkívül fejlett technológiával rendelkezik, amely biztosítja a legmagasabb minőséget és a kényelmes használatot. A termék célja a felfekvéses fekélyek megelőzése és kezelése.

A rendszer tesztelésre került és megfelel a következő szabványoknak:

EN60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-11:2010, EN 60601-1-2:2007 CISPR 11:2009, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004, IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008.

EMC FIGYELMEZTETÉS


Ez az eszköz tesztelésen esett át, és megfelel az EN 60601-1-2:2007 szabványban meghatározott, orvostechnikai eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a tipikus orvosi berendezésekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez az eszköz rádióhullámokat generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, interferenciát okozhat a közelben lévő más eszközökben. Úgyanakkor nem garantálható, hogy egy adott berendezésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés interferenciát okoz más berendezésekben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát:

- a vevőberendezés átirányítása vagy áthelyezése;
- növelje a készülékek közötti távolságot;
- csatlakoztassa az eszközöket egy olyan aljzathoz, amely más áramkörhöz tartozik, mint az egyéb eszközök;
- kérjen segítséget a gyártótól, a forgalmazótól vagy a szerviztechnikusoktól.

2. TERMÉKTERVEZÉS


PNEUMATIKUS SZIVATTYÚ FELÉPÍTÉSE

1. Levegő kivezető fűvókák;
2. Háttérvilágításos bekapcsoló gomb;
3. Nyomás szabályozó;
4. A szivattyú felakasztásához szükséges kampók.

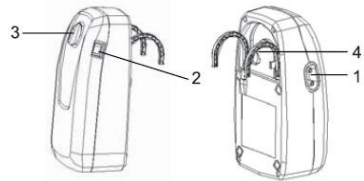

AZ ÁGYFEKVÉS ELLENI KÉSZLET FELÉPÍTÉSE

1. Pneumatikus matrac;
2. A szivattyút a matrachoz összekötő légtömlők;
3. Nyomás szabályozó szivattyú a BioFlote™ 2000 pneumatikus matrachoz.

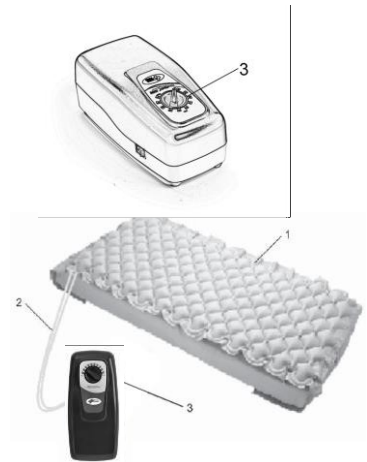

3. TELEPÍTÉS

KICSOMAGOLÁS

A szivattyú és a matrac kartondobozban van csomagolva, hogy megvédje őket a sérülésektől. Csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg valami. Ha bármilyen sérülést talál, azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

BEÁLLÍTÁS


- 1) Helyezze a matracot az ágyra. Javasoljuk, hogy a matracot úgy helyezze el, hogy a bemeneti végek az ágy lábánál legyenek. Győződjön meg arról, hogy a matrac mindkét oldalán lévő szárnnyak az ágy matraca alá vannak hajlítva.



FIGYELEM!

Fedje le a matracot egy lepedővel, hogy megakadályozza a bőr és a matrac érintkezését. Ez javítja a beteg kényelmét és megvédi a matracot a nedvességtől és az orvosi termékektől.

- 2) Akassza fel a pumpát az ágy szélére, vagy helyezze a padlóra úgy, hogy ne legyen kitéve sérülésnek.
- 3) Csatlakoztassa a légtömlőket a szivattyúhoz és a matrachoz.

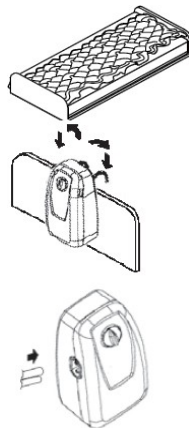

FIGYELEM!

Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a légtömlők nem csavarodtak meg és nem vannak összenyomva.

- 4) Csatlakoztassa a szivattyút a hálózati csatlakozóhoz a tápkábel segítségével.



FIGYELEM!

Mielőtt a dugót a konnektorbba dugná, ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelel-e a készülék követelményeinek.

- 5) Kapcsolja be a szivattyú tápellátását (állítsa a kapcsolót „ON” állásba).
- 6) Mielőtt a beteget a matraca fektetné, várjon körülbelül 20 percet, amíg az egyik rész teljesen felfúvódik. Állítsa a vezérlógombot a maximális értékre, és a matrac felfújása után állítsa be a betegnek megfelelő nyomást.



FIGYELEM!

Felhívjuk figyelmét, hogy a matrac használata közben a szivattyúnak folyamatosan működnie kell. A szivattyú kikapcsolása után ne használja a matracot. Ne fújja fel a matracot, amíg a beteg rajta fekszik.



FIGYELEM!

A beállítás után győződjön meg arról, hogy a tápkábel úgy van elhelyezve, hogy ne akadályozza az átjárást, és ne okozzon botlást vagy elesést. A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az orvos vagy a felhasználó könnyen hozzáférjen a készülékhez.

4. A SZIVATTYÚ

TISZTÍTÁSA



FIGYELEM!

A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a szivattyú nincs csatlakoztatva az áramellátáshoz.

A szivattyút nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg, és tartsa távol a portól. Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek kémiai reakciót váltanak ki a szivattyúház műanyag felületén. Az összes alkatrészt alaposan meg kell szárítani, mielőtt újra használatba veszi.



FIGYELEM!

Ne merítse vízbe és ne áztassa a szivattyút. A szivattyút nem szabad folyó víz alatt tisztítani. A szivattyút nem szabad gőzzel fertőtleníteni.

MATRAC

A matracot meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel megnedvesített ruhával vagy szivaccsal törölje le. Az összes alkatrészt alaposan szárítsa meg, mielőtt újra használná.



FIGYELEM!

Ne használjon oldószert- vagy alkoholalapú tisztítószereket a matrac tisztításához. Ez károsíthatja a matrac felületét, repedéseket vagy az anyag megkeményedését okozhatja. A matracot nem szabad gőzzel fertőtleníteni.



FIGYELEM!

A tisztítás után a matracot természetes módon szárítsa meg, ne tegye ki közvetlen napfénynek. A matracot száraz ruhával törölheti le.



FIGYELEM!

A matrac tisztításának gyakorisága számos tényezőtől függ. Ne hagyja, hogy a matrac nedves legyen. A matracot azonnal meg kell mosni, ha látható zsíros réteg van a felületén (pl. krémek vagy gyógykenőcsök használata után). A matrac nem megfelelő tisztítása és karbantartása károsíthatja a felületét.

TÁROLÁS

1. A matracot fektesse le sík felületre.
2. Válassza le a légcsőveket a matracról.
3. Tekerje fel a matracot a fejétől a lábáig (a levegő kivezető vége felé).

ELLENŐRZÉS

1. Ellenőrizze a tápkábel és a dugó kopását.
2. Ellenőrizze a matrac felületét kopás, keménység vagy sérülés szempontjából. Győződjön meg arról, hogy a matrac és a tömlők megfelelően vannak csatlakoztatva.
3. Ellenőrizze, hogy a csöcsatlakozások nem sérültek-e.
4. Ellenőrizze, hogy a szivattyú megfelelően működik-e. A levegőáramlásnak fél ciklusonként váltokoznia kell a kivezetések között.

VÁRHATÓ TERMÉKÉLETTARTAM

A termék a jótállási időszak alatt biztonságosan és megbízhatóan fog működni, ha a gyártó használati utasításának megfelelően használják és karbantartják. A gyártó azt javasolja, hogy a készletet csak akkor ellenőriztesse és szervizeltesse

csak akkor ellenőriztesse és szervizeltesse, ha kopás jelei vagy meghibásodás gyanúja merül fel. Egyéb esetekben a készülék szervizelése vagy ellenőrzése általában nem szükséges.

HIBAMEGÁLLAPÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nincs áram	Ellenőrizze, hogy a dugó be van-e dugva egy feszültség alatt álló konnektorba. Ellenőrizze a biztosítékokat (ha vannak).
A matrac túl puha	Ellenőrizze, hogy a légtömítők megfelelően vannak-e csatlakoztatva a szivattyúhoz és a matrachoz. Ha a szivattyú nyomásszabályozóval rendelkezik, növelje a nyomást. Ellenőrizze, hogy a matrac nem szivárog-e, és győződjön meg arról, hogy a felülete nem sérült-e vagy repedt-e meg. MEGJEGYZÉS: A szivattyút a matrac használata alatt folyamatosan bekapcsolva kell tartani.
Időnként zümmögő hang hallható a szivattyútól.	Ez normális jelenség. Amikor az egyik rész leereszt, a levegő a szivattyún keresztül távozik, ami hallható lehet.
A matrac egy része nincs felfújva	Ez normális, ha az egyik rész felfúj, a másik pedig nem. A ciklus felénél, azaz 6 perc elteltével a részek felfújása megváltozik. Ha csak az egyik szakasz van felfújva, ez a matrac szivárgására vagy a szivattyú meghibásodására utalhat.

Ha a fenti tippek nem segítenek a hiba elhárításában, kérjük, forduljon közvetlenül a helyi képviselőjéhez. Valószínűleg szakszervizhez kell fordulnia.



FIGYELEM!

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében nem próbálja meg eltávolítani a huzatot. Bármilyen javítást csak a gyártó hivatalos szervizközpontja végezhet.



FIGYELEM!

A mellékelt javítókészletet csak a jótállási idő lejártá után lehet használni. A matrac javítása anélkül, hogy a károsodást bejelentette volna egy hivatalos szervizközpontnak, a jótállási jogok azonnali elvesztését vonja maga után.

MŰSZAKI ADATOK

LISTA	A SZIVATTYÚ MŰSZAKI ADATAI
Modell	BioFlote™ légmatrac-pumpa 2000
Teljesítmény	230 V/50 Hz
Biztosíték	1A
A szivattyú méretei cm-ben	27 cm x 11 cm x 9,5 cm
Szivattyú súlya	1,2 kg
Teljesítményfelvétel	7 W
Ciklus időtartama	10–12 perc
Nyomás tartomány	40 mmHg – 100 mmHg
Szivattyú teljesítménye	5 liter/perc

LISTA	MATRAC SPECIFIKÁCIÓK
Modell	BioFlote™ 2000
Típus	Buborék (130 buborék)
A matrac méretei cm-ben	200 x 90 x 6,5 – felfújva
Matrac súlya	1,9 kg
Maximális felhasználói súly	130 kg
Anyag	Polivinil-klorid (megfelel az EN-71 szabványnak)
Szín	Bézs
Környezeti hőmérséklet	Működés: 5 °C~ 40 °C Tárolás: 25 °C~70 °C

	Szállítás: -25 °C ~ 70 °C
Környezeti relatív páratartalom	Üzemeltetés: 15%~90%, Tárolás: 10%~90% Szállítás: 10%~90%
Légköri nyomás	40 mmHg – 100 mmHg

MEGJEGYZÉS

1. A fenti műszaki adatok minden olyan helyen érvényesek, ahol az elektromos paraméterek megegyeznek.
2. Egyéb műszaki dokumentumokért kérjük, forduljon a szállítóhoz.
3. A terméket a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

A. MELLÉKLET: EMC-információk

Gyártói útmutatás és nyilatkozat – elektromágneses sugárzás:

Ez az eszköz az alábbiakban leírt elektromágneses környezetben való használatra készült. Az eszköz felhasználójának gondoskodnia kell arról, hogy az ilyen környezetben használják.

Emissziós teszt	Megfelelés	Elektromágneses környezet – irányelvek
RF-sugárzás CISPR 11	1. csoport	A készülék RF energiát csak belső funkcióihoz használ. Ezért az RF-sugárzás nagyon alacsony, és nem valószínű, hogy zavart okozna a közelben.
RF-sugárzás CISPR 11	A osztály	
Harmonikus sugárzás IEC61000-3-2	A osztály	A készülék minden helyszínén, beleértve a háztartási helyszíneket is, használható, és csatlakoztatható a közcélú kisfeszültségű elektromos hálózathoz. feszültségű hálózati tápellátáshoz.
Feszültségingadozások / kibocsátások IEC61000-3-3	Megfelel	

Irányelvek és gyártói nyilatkozat – elektromágneses immunitás:

Ez az eszköz az alábbiakban leírt elektromágneses környezetben való használatra készült. Az eszköz felhasználójának gondoskodnia kell arról, hogy az ilyen környezetben használják.

Immunitásvizsgálat	IEC60601 Teszt szint	Megfelelés	Elektromágneses környezet – irányelvek
Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC61000-4-2	±6kV érintkezés ±8 kV levegő	±6 kV érintkezés ±8 kV levegő	A padlózatnak fából, betonból vagy kerámialapokból kell készülnie. Ha a padlózat szintetikus anyaggal van borítva, a relatív páratartalomnak legalább 30%-nak kell lennie.
Gyors elektromos tranziensek / IEC61000- 4-4 sorozat	±2 kV az áramellátó vezeték esetében ±1 kV a bemeneti/kimeneti vezetékek esetében	±2 kV az áramellátó vezeték esetében ±1 kV a bemeneti/kimeneti vezetékek esetében	Az áramellátás minőségének átlagosnak kell lennie (nem ipari vagy kórházi minőségűnek).
IEC61000-4-5 hullám	±1 kV vezetékek – vezetékek ±2 kV vezetékek – földelés	±1 kV vezetékek – vezetékek	Az áramellátás minőségének átlagosnak kell lennie (nem ipari vagy kórházi szintűnek).
Feszültségeseések, rövid megszakítások és feszültségváltozások az áramvezetéseken IEC61000-4-11	<lt;math>U_{T,ban}</math> 0,5 ciklusra <lt;math>U_{T,ban}</math> 5 ciklusra <lt;math>U_{T,ban}</math> 25 ciklusra <lt;math>U_{T,ban}</math> 5 másodpercig		Az áramellátás minőségének átlagosnak kell lennie (nem ipari vagy kórházi szintűnek). Ha a felhasználó megszakításmentes és zavartalan működést szeretne, megbízható állandó áramellátást vagy akkumulátorokat kell beszereznie.
Hálózati frekvencia (50/60 Hz) mágneses mező IEC6100-4-8	3A/m	3A/m	A mágneses tér frekvenciájának a környezetre jellemző, atipikus helyszínekre jellemző szinten kell lennie. ipari vagy kórházi

Írányelvek és gyártói nyilatkozat – elektromágneses immunitás:

Ez az eszköz az alábbiakban leírt elektromágneses környezetben való használatra készült. Az eszköz felhasználójának gondoskodnia kell arról, hogy az ilyen környezetben használják.

Immunitásvizsgálat	IEC60601 Teszt szint	Megfelelés	Elektromágneses környezet – irányelvek
RF-vezetőképesség IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz és 80 MHz között az ISM sávon kívül ^a	3 Vrms	A hordozható és mobil RF rádióberendezéseknek Ne használja a készülék bármely részéhez, beleértve a kábeleket is, az adó frekvenciájához megfelelő egyenlet alapján kiszámított ajánlott távolságnál közelebb. Ajánlott távolság: $d = \frac{1}{\sqrt{P}} \begin{cases} \sqrt{3.5} & \text{150 kHz-től 80 MHz-ig} \\ \sqrt{3.5} & \text{80 MHz-től 800 MHz-ig} \\ \sqrt{7} & \text{800 MHz-től 2.5 MHz-ig} \end{cases}$ ahol P a maximális névleges adóteljesítmény wattban kifejezve (W) az adó gyártója szerint, és d az ajánlott távolság méterben (m). ^b A helyszínen mért elektromágneses mező alapján meghatározott, rögzített RF-adók által keltett térerősségnek minden frekvenciatartományban alacsonyabbnak kell lennie, mint a megfelelőségi szint. Az alábbi szimbólummal jelölt berendezések közelében zavarok léphetnek fel a következő szimbólummal jelölt berendezések közelében: 
RF sugárzás IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz és 2,5 GHz között	3 V/m	

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Gyártó
	CE-jelölés
	Hivatkozási szám
	Gyártás dátuma
	Lásd a használati utasítást
	Figyelmeztetés
	Sorozatszám
	Állítsa függőlegesen, ne döntse fel
	Száraz helyen tárolja
	Törékeny, óvatosan kezelje
	BF típusú alkatrészek

	II. osztályú védőberendezés
IP21	Védelem 12,5 mm-es és annál nagyobb szilárd tárgyak ellen. Védelem függőlegesen vízcseppek ellen
	Ez az eszköz az európai irányelv (WEEE) és a lengyel elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló törvény szerint van jelölve. Ez a jelölés azt jelzi, hogy élettartama lejártát követően ezt a berendezést egy elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak feldolgozására szolgáló központba kell visszaszállítani. elektronikus berendezések
	Ne vágja
	Újrahasznosítás



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Varsó, Lengyelország

tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07

e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.2

Közzététel: 02/2021

Garanciakártya BioFlote™ 2000 pneumatikus matrac

Modell	Sorozatszám:	Értékesítés dátuma:	Eladó aláírása és bélyegzője:

Garanciális feltételek

1. A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen garanciakártyával fedezett termék új és kiváló minőségű.
2. A matracra és a légpumpa 18 hónapos garancia vonatkozik a garanciakártyán feltüntetett értékesítés dátumától számítva.
3. A reklamáció elbírálásának alapja a tiszta, teljes termék, a helyesen kitöltött garanciakártya és a vásárlás igazolása (nyugtával, áfás számlával). A dokumentumok benyújtásának elmulasztása vagy a szennyezett termék szállítása a reklamáció elbírálásának felfüggesztését vagy elutasítását vonja maga után.
4. A panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb 14 napon belül, az áru szervizközpontba történő leszállításától számítva bíráljuk el. Ha a javításhoz szükséges alkatrészeket külföldről kell importálni, ez az időtartam meghosszabbodhat, amiről a panaszost értesítjük.
5. A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy a hivatalos szerviztechnikusok javítják, feltéve, hogy a matracot és a pumpát rendeltetésszerűen és a használati utasításban szereplő ajánlásoknak megfelelően használták.
6. A szervizközpontnak joga van megtagadni a jótállási javítást, ha a jótállási kártya olvashatatlan, vagy bármely adatot megváltoztattak vagy kijavítottak.
7. A garancia nem terjed ki a következőkre:
 - a használati utasításban leírtaknak megfelelően a termék karbantartásával, tisztításával, használatával, tárolásával és beállításával kapcsolatos tevékenységek;

- a normál használat során kopásnak kitett alkatrészeket;
- mechanikai és hőhatás okozta sérülések, pl. karcolások, vágások stb.
- a használati utasításnak nem megfelelő termékhasználatból, gondatlanságból, jogosulatlan javításokból, módosításokból, szerkezeti változtatásokból és véletlen eseményekből eredő károkat.

8. Mielőtt a berendezést átadná a hivatalos szerviztechnikusoknak, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy szervizelésre alkalmas legyen.
9. A javításokat és az alkatrészek cseréjét a Reha Fund Sp. z o.o. szerviztechnikusai végzik.
10. Indokolatlan panasz (a termék működőképes) vagy a felhasználó által okozott kár esetén a panasszal kapcsolatos összes költséget, pl. a szállítási költségeket, a panaszos viseli.
11. A hivatalos szervizközpont értesítése nélkül végzett javítások vagy módosítások azonnali garancia elvesztéssel járnak.
12. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
13. Az eladott árukra vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevőnek az áruk szerződészegeséből eredő jogait.

SZERVIZJAVÍTÁSOK LISTÁJA (a szervizközpont kitöltendő)

Sz	Értesítés dátuma	Rendelésszám	A hiba leírása/a javítás terjedelme	Javítás dátuma	Szervizbélyegző és aláírás
1.					
2.					

MEGJEGYZÉSEK