

**Használati utasítás:**  
**ECO szoba WC**



**REF** : 0809176



### **RENDELTETÉS:**

A Kommód széket olyan mozgásukban korlátozott személyek használhatják, akik nem tudnak a házban WC-re menni, illetve segédeszközként a vécésészén a tartály nélkül.

Csak beltéri használatra tervezték.

Ne használja a terméket, ha súlyos egyensúlyi problémái vannak, és nem tud ülni.

### **VIGYÁZAT (!):**

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIÁK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A MOBIÁK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására
- Van egy  $\pm 3\%$ . Eltérés a termékek méretétől.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi hivatkozás céljából.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a termékkel.
- Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtagok becsípődését és sérülését okozhatják.
- Ne próbálja megemelni a terméket semmilyen eltávolítható résznél fogva
- Óvja a terméket a karcoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

### **BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:**

- A használati utasításban megadott maximális súlyt nem szabad túllépni.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a terméket megfelelően és stabilan összeszerelték.
- A termék csak akadályoktól mentes felületen használható.
- Az összeszerelés során szigorúan tartsa be a felhasználói kézikönyvben leírtakat.
- Az ujj sérülések kockázata megnőhet a szerelés vagy összeszerelés során.
- Ne lendüljön a terméken, mert ez a lábak megcsúszásához, felborulásához vagy lesüllyedéséhez vezethet. A termék használatakor mindig tartsa az ülést a 4 lábán.
- Semmilyen módon ne módosítsa a terméket és alkatrészeit.
- Ne használja a terméket, ha sérült vagy bármilyen módon megváltozott. A repedések és deformációk erősen befolyásolhatják a termék teljesítményét és biztonságát.
- Használat után a terméket le kell venni a zuhanytálcáról, hogy elkerülje az akadályokat.
- Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A terméket nem szabad szabadban tárolni.

- Ne helyezze vagy távolítsa el a komód serpenyőjét, amíg a beteg egy széken ül: nagy a sérülésveszély!

#### **KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK:**

A biztonságos használat és a megfelelő higiéniai színvonal garantálása érdekében a felhasználónak minden használat előtt végre kell hajtania ezeket az eljárásokat.

A felhasználónak meg kell bizonyosodnia a készülék és alkatrészeinek szerkezeti integritásáról. A tisztítási és higiéniai eljárásokhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kesztyűt kell viselni.
2. Mielőtt a legpontosabb fertőtlenítést végezné, távolítsa el a látható szennyeződések.
3. A tisztításhoz használjon vizet vagy enyhe tisztítószert.
4. Törölje le száraz és tiszta ruhával.
5. Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszert
6. Használat után azonnal tisztítsa meg a WC-tartályt. Kezdetben öblítse le meleg vízzel. Ezután használjon enyhe mosószerrel vagy fertőtlenítő oldattal átitatott puha ruhát. Törölje le tiszta, puha ruhával.
7. FIGYELEM: Ne használjon savas és maró hatású higításokat

#### **KÖRNYEZETVÉDELLEM:**

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy az már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

#### **ESEMÉNY JELENTÉS:**

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

#### **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:**

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, és adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

## MŰSZAKI ADATOK:

### MAX. FELHASZNÁLÓI SÚLY:

TERMÉK KÓD	MAX SÚLY
0809176	100 kg

					
46cm	40cm	62cm	41-56cm	6Kg	100Kg

- **Acél keret**  
**Rögzített**  
**Magassága állítható**  
**Szürke gumi vég (Ref:0808079)**

### Összeszerelés:


**A terméket összeszerelve és használatra készen szállítjuk**

### GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított egy (1) év garancia vonatkozik. A garancia a gyári hibákra vonatkozik, **ÉS NEM TARTALMAZ** a helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkat. **NEM** takarja el azokat az alkatrészeket, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódhatnak. Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (adott esetben), fuvarozókra nem vonatkozik a garancia. Szervizt vagy pótalkatrészt nem alkalmaznak, kivéve, ha azt hivatalos szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a végfelhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.

**A címkére, a főkartonra és/vagy a felhasználói kézikönyvre nyomtatott szimbólumok leírása**

	<b>Orvosi eszköz</b>		<b>CE jelölés</b>
	<b>Gyártó</b>		<b>Gyártási dátum</b>
	<b>Termék szám</b>		<b>Olvassa el a használati utasítást</b>
	<b>Sorozatszám</b>		<b>Ne használja ha sérült a csomagolás</b>
	<b>Tétel szám</b>		<b>Helyesen felfelé</b>
	<b>Egyedi eszköz azonosító</b>		<b>Napfénytől távol tartandó</b>
	<b>Tartsa szárazon</b>		<b>Rakodási magasság</b>
	<b>Óvatosan kell kezelni</b>		<b>Törékeny</b>
	<b>Csak beltéri használatra</b>		<b>Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv</b>

 **MOBIAC S.A**  
 ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ  
 KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE  
 T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Magyarországi forgalmazó: Bükös Egészségtár Kft 2000 Szentendre, Kőúzó köz 2. 26-309223