

HF6002 matrac

Műszaki adatok:

Max. felhasználó súlya: 145 kg
Matrac méretei: 200 x 90 cm x 11,5 cm
Anyag: PVC (polivinil-klorid) 0, 45 mm
Szín: bézs
Matrac súlya: 5,5-6,5 kg
Matraccellák száma: 18
Garancia: 18 hónap

HF62012 szivattyú

Műszaki adatok:

Légkimenet: 5-7 l/perc
Nyomástartomány: 50-120 Hgmm
Elektromos tápellátás: 220V/50Hz
Kapacitás: 5-7 l/perc
II. osztályú áramütés elleni védelem
Biztosíték: 1A
Energiafogyasztás: 7 W
Méretek: 23,5 (H) x 12 (M) x 9,5 (Sz) cm
Garancia: 18 hónap

Importőr:

Reha Fund Sp. z o. o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Varsó
tel. 48 22 59 40 300 fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



FOSHAN HONGFENG CO., LTD

Cím: No. 4-2 Leqiang Road, Leping, Sanshui, Foshan District, Guangdong Province, China



KOREAI TECHNOLÓGIA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Orvosi változó nyomású pneumatikus matrac szivattyúval

ORVOSI ESZKÖZ

Verzió: 1.0/10/2023



MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10 48163 Münster, Németország

Hogyan működik

- A megfelelő gyakorisággal alkalmazott váltakozó nyomású rendszer elkerüli az erek hosszan tartó nyomását, ami szöveti hipoxiát okozhat.
- A váltakozó nyomású rendszer lehetővé teszi a matrac beállítását a beteghez és annak helyzetéhez.

Használati útmutató

A felfekvés megelőzésének hagyományosan elfogadott módszere a beteg rendszeres forgatása és a veszélyeztetett területek rendszeres ellenőrzése.

A váltakozó nyomású matrac használata kiegészíti ezt a megközelítést. Szükség esetén azonban a beteg forgatását és ellenőrzését továbbra is a betegellátás részének kell tekinteni.

Rendeltetésszerű használat:

- Olyan betegek számára, akik valószínűleg napi 15 óránál többet töltenek ágyban
- Közepes vagy magas felfekvés kockázatának kitett betegek számára

Telepítés és használat

1. Hajtsa ki a matracot.
2. Helyezze a matracot az ágyra.
3. Helyezze el megfelelően az ágyon a fülek segítségével.
4. Helyezze a pumpát az ágykeretre a beteg lábánál lévő horgok segítségével.
5. Csatlakoztassa a matracot a pumpához a csövek segítségével, a megfelelő kimenetekhez illesztve.
6. Csatlakoztassa a pumpát a tápkábelhez, a megfelelő aljzatokhoz igazítva.
7. Csatlakoztassa a tápkábelt egy elektromos aljzathoz.
8. Nyomja meg a bekapcsológombot a pumpa elindításához.
9. Várjon, amíg a matrac teljesen felfújódik, mielőtt a beteget a matraca helyezi.

10. Állítsa be a nyomást a megfelelő szintre.

Biztonsági óvintézkedések

- Legyen óvatos elektromos berendezések kezelésekor.
- Ne hagyja a terméket csatlakoztatva a konnektorba, amikor nem használja.
- Ne tegye ki az elektromos berendezéseket túlzott nedvességnek.
- Ne használjon erős tisztítószeret, például ipari zsíroldókat vagy ecet alapú oldószereket.
- Ne próbálja meg mozgatni a készüléket, amíg be van dugva a konnektorba.

A készüléket érintő minden súlyos balesetet jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Tisztítás/fertőtlenítés

Pumpa:

Figyelem!

Tisztítás előtt húzzaki a tápellátásból.

Használjon enyhe mosószeres oldattal megnedvesített kendőt.

Kövesse a gyártó által ajánlott oldatkonzentrációkat.

A tisztítóoldat használata előtt kövesse a gyártó ajánlásait.

Használjon CE- jelölésű tisztítószerrel vagy fertőtlenítőoldattal átitatott kendőt, a gyártó által ajánlott koncentrációknak és eltarthatósági időnek megfelelően .

Karbantartás

A szivattyú karbantartását kizárólag az importőr által felhatalmazott és képzett szakember végezheti.