

HF6001 matrac**Műszaki adatok:**

Max. felhasználói súly: 130 kg
Matrac méretei: 200 x 90 cm x 7 cm
Anyag: PVC (polivinil-klorid) 0,3 mm
Szín: bézs
Matrac súlya: 1,8-2,1 kg
Matrac cellák száma: 130
Garancia: 18 hónap

HF62012 szivattyú**Műszaki adatok:**

Légteljesítmény: 5-7 l/perc
Nyomás tartomány: 50-120 mmHg
Tápellátás: 220 V/50 Hz
Kapacitás: 5-7 l/perc
II. osztályú áramütés elleni védelem
Biztosítékok: 1 A
Teljesítményfelvétel: 7 W
Méretek: 23,5 (hosszúság) x 12 (magasság) x 9,5 (szélesség) cm
Garancia: 18 hónap

Importőr:

Reha Fund Sp. z o. o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Varsó
tel. 48 22 59 40 300 fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

**FOSHAN HONGFENG CO., LTD**

Cím: No. 4-2 Leqiang Road, Leping, Sanshui, Foshan District, Guangdong Province, China

**KOREAI TECHNOLÓGIA**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Orvosi változó nyomású pneumatikus matrac szivattyúval

ORVOSI ESZKÖZ

Verzió: 1.0/06/2021



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10 48163 Münster, Németország

Hogyan működik

- A változtatható nyomású rendszer megfelelő frekvenciájával segít megelőzni az erekre nehezedő hosszan tartó nyomást, ami szöveti hipoxiához vezethet.
- A változtatható nyomású rendszer lehetővé teszi a matrac beállítását a beteghez és annak pozíciójához.

Használati útmutató

A felfekvés megelőzésének hagyományosan elfogadott módszere a beteg rendszeres forgatása és a veszélyeztetett területek rendszeres ellenőrzése. A váltakozó nyomású matrac használata kiegészíti ezt a megközelítést. A beteg forgatását és ellenőrzését azonban, ha szükséges, továbbra is a betegellátás részének kell tekinteni.

Rendeltetésszerű használat:

- olyan betegek számára, akik naponta több mint 15 órát töltenek ágyban
- Azoknak a betegeknek, akiknél közepes vagy magas a felfekvés kialakulásának kockázata.

Telepítés és használat

1. Hajtsa ki a matracot
2. Helyezze a matracot az ágyra.
3. Igazítsa be megfelelően a pumpát az ágyon a fülek segítségével.
4. Helyezze a pumpát a rajta található kampók segítségével az ágykeretre, a beteg lábához.
5. Csatlakoztassa a matracot a pumpához a csövek segítségével, illetve a megfelelő kimeneteket.
6. Csatlakoztassa a pumpát a tápkábelhez, illessze össze a megfelelő kivezetéseket.
7. Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.
8. Nyomja meg a kapcsolót a szivattyú elindításához.
9. Várja meg, amíg a matrac teljesen felfúvódik, mielőtt a beteget ráfekteti.

10. Állítsa be a nyomást a megfelelő szintre.

Biztonsági óvintézkedések

- Az elektromos berendezések kezelésekor legyen óvatos.
- Ha nem használja a terméket, ne hagyja csatlakoztatva a hálózathoz.
- Ne tegye ki az elektromos berendezéseket túlzott nedvességnek.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret, például ipari zsírtalanítókat vagy ecetsav-oldószeret.
- Ne próbálja meg mozgatni a készüléket, amíg az a hálózathoz csatlakoztatva van.

A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a beteg lakik.

Tisztítás/fertőtlenítés

Szivattyú:

Figyelem!

A tisztítás előtt válassza le az áramellátásról. Használjon enyhe tisztítószerrel átitatott ruhát. Kövesse a gyártó által ajánlott oldatkonzentrációkat.

A tisztítószer használata előtt kövesse a gyártó utasításait.

Használjon CE jelöléssel ellátott tisztítószerrel vagy fertőtlenítőszerrel átitatott ruhát, a gyártó által ajánlott koncentrációknak és a szavatossági időnek megfelelően.

Karbantartás

A szivattyú karbantartását kizárólag az importőr által felhatalmazott és képzett szakember végezheti.