



## Állítható magasságú járókeret lépegető funkcióval

**0809396**

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: WALKER



#### RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

A gyalogjárókat mozgáskorlátozottak használhatják otthonon belüli és kívüli utazáshoz.

#### VIGYÁZAT (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIAK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A MOBIAK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására
- Van egy  $\pm 3\%$ . Eltérés a termékek méretétől.

#### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.

- Őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi hivatkozás céljából.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a termékkel.
- Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést.
- Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtag becsípődését és sérülését okozhatják.
- Ne próbálja megemelni a terméket semmilyen eltávolítható résznél fogva.

#### MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak nyilatkoztatásáért, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

#### HASZNÁLAT ELŐTT:

- Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát. (Nincs repedés vagy törés a kereten).
- Sérülés esetén ne használja a terméket, és további útmutatásért forduljon a forgalmazóhoz.
- Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve, és minden csavar rögzítve van-e és jól fel van-e csavarozva.
- Mindig ellenőrizze az alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára.
- A sétáló teljesen kinyújtott állapotban van, és ebben a helyzetben reteszelve van.
- A kerekek (ha vannak) szilárdan rögzítve vannak
- A fogantyúk azonos magasságúak

#### KÖRNYEZETVÉDELLEM:

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

#### KARBANTARTÁSI, TISZTÍTÁSI ÉS FERTŐTLENÍTÉSI INFORMÁCIÓK:

A biztonságos használat és a megfelelő higiéniai színvonal garantálása érdekében a felhasználónak minden használat előtt végre kell hajtania ezeket az eljárásokat.

A felhasználónak meg kell bizonyosodnia a készülék és alkatrészeinek szerkezeti épségéről. A tisztítási és higiéniai eljárásokhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kesztyűt kell viselni.
2. Mielőtt a legpontosabb fertőtlenítést végezné, távolítsa el a látható szennyeződések.
3. Használjon vizet vagy enyhe mosószert a tisztításhoz.
4. Törölje le száraz és tiszta ruhával.
5. NE hagyja nedvesen a terméket.
6. Ne használjon vegyi tisztítószereket a keret tisztításához. Ez károsíthatja a termék felületét
7. Ha fertőtleníteni kell a terméket, használjon közönséges, enyhe fertőtlenítőszer
8. Óvja a tárgyat a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

#### ÖSSZESZERELÉS:






A járgányokat összeszerelve és használatra készen szállítjuk.

#### TOVÁBBI UTASÍTÁSOK:

1. A sétáló össze- vagy kihajtásához használja a fogantyúkat vagy a gombot (ha van)
2. Ha a sétálót ülésre vagy felállásra használja, nyomja le a fogantyúkat, biztosítva, hogy a sétáló egy helyben álljon és ne csússzon el.
3. Amikor kiszáll a sétálóból, mindkét fogantyúra egyformán támaszkodnia kell. Ha csak egy fogantyúhoz támaszkodik (kíséret nélkül), a fogantyú megsérülhet.
4. A 0808819 SZÁMÚ TERMÉKHEZ: Ellentétben a közönséges sétálókkal, ahol a felhasználónak kell tolnia, a gyereksetáló ezzel szemben működik, a felhasználónak kell húznia.

#### MŰSZAKI JELLEMZŐK

1. Alumínium váz
2. Összecsukható
3. Állítható magasságú

					
0809360	56 cm	44,5 cm	45 cm	75-94 cm	100 Kg
0809396	54 cm	46 cm	47 cm	76-93 cm	100 Kg
0808819	56 cm	36 cm	68 cm	41-51 cm	75 Kg

#### ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

**GARANCIA:** A termékre a vásárlás dátumától számított egy (1) év garanciát vállalunk. A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM vonatkozik azokra a károkra, amelyek helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék előírásainak meg nem felelésből erednek. használati utasítások. NEM VONATKOZIK azokra az alkatrészekre, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódhatnak. A jótállás nem vonatkozik a természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ahol alkalmazható) és szállító által okozott károkra vagy hibákra. Szervizt vagy pótalkatrészt nem alkalmaznak, kivéve, ha azt hivatalos szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a végfelhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.



Gyártó



Termék szám



Olvassa el a használati utasítást



CE Jel



Gyártási dátum



Orvosi eszköz



Tétel szám



Ne használja ha sérült a csomagolás



Egyedi eszközazonosító



Kizárólag beltéri használat



Óvatosan kell kezelni



Berendezési irányelv



**MOBIAK S.A**

**ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ**  
**KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE**

**T: +30 28210 63222 | WEB: [www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)**

Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft 2000 Szentendre, Kőzúzó köz 2.. 26-309223