

**Komfort kerekesszék párnázott üléssel dönthető háttámasszal 24 kerékkel**

**0808838**

**Használati utasítás**



**RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:**

Ezeket a kerekesszékeket mozgásukban korlátozott fizikai vagy szellemi fogyatékos emberek számára tervezték. Lehetővé teszi mozgássérültek vagy mozgásukban korlátozott személyek szállítását, és a beteg maga (ha van 20-24"-es hátsó kerekei) vagy kísérő segítségével mozgásra használható.

Ha a kerekesszék 50-60 cm átmérőjű hátsó kerékekkel és a keréken lévő kézi peremmel rendelkezik, a felhasználó önállóan mozoghat.

Ha a kerekesszék 13-40 cm átmérőjű hátsó kerékekkel rendelkezik, és nincs kézi perem a keréken, akkor a felhasználónak egy kísérőre van szüksége, aki a kerekesszéket a kerekesszék hátulján található fogantyúkon keresztül mozgatja.

**MŰSZAKI ADATOK** Lásd az A. MELLÉKLETET

**MÉRETEK** Lásd a B. MELLÉKLETET

**ÖSSZESZERELÉS** Lásd a C. MELLÉKLETET

**SZIMBÓLUMOK** Lásd a D. MELLÉKLETET

**ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:**

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a termékkel.
- Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést.
- Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtag becsípődését és sérülését okozhatják.
- Ne kísérelje meg felemelni a kerekesszéket semmilyen eltávolítható résznél fogva.
- A kerekesszékebe való be- és kiszállás önállóan is végrehajtható, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.

**FONTOS!**

Ennek a kerekesszéknek a felépítése a maximális biztonságot szolgálja. A felhasználók azonban veszélybe kerülhetnek, ha nem megfelelő kerekesszéket használnak. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem meghatározott vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Mindig viseljen világos színű ruhát, ha sötét helyen mozog, hogy másoktól könnyebben elérhető legyen.
- Legyen óvatos az első edzés során ebben a kerekesszékben.
- Ismerje meg kerekesszékét.
- Használja tolószékét vízszintes talajon, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne próbálja meg tárgyakat elérni, ha térdei közé nyúlva kell felemelnie azokat a padlóról.
- Ne próbálja meg tárgyakat elérni, ha az ülésre kell felmennie.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne kíséreljen meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajréteggel.
- Ne használjon a MOBIK által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket.
- Ne álljon a tolószékben.

**HASZNÁLAT ELŐTT:**

1. Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát. (Nincs repedés vagy törés a kereten)
2. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
3. Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen nyitva van-e. Ha nem, nyomja le az ülést az oldalsó keretről.
4. Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e.

5. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára.
6. Ha vannak gyorskioldó tengelyek, ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e rögzítve.
7. Ellenőrizze a gumiabroncsokat, a gumiabroncsok nyomását (ha szükséges) és a kerékszárakat (fékeket). A fékek nem működnek megfelelően, ha túl alacsony a nyomás, vagy túl hosszú a rés a gumiabroncs és a kerékszárak között.

### **FIGYELEM!**

A következő módszereket csak tapasztalt betegeknél szabad alkalmazni. Ha nem tapasztalt, kérjen segítséget egy kísérőtől.

### **FELÜLÉS A KERESŐSZÉKBE:**

1. Helyezze el a kerekesszéket a lehető legközelebb magához.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Karjával támaszkodjon a keretre, és lassan menjen le az ülés felé.

### **KIÁLLÁS A KERESŐSZÉKBŐL:**

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre átszáll.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Egyformán támaszkodnia kell mindkét fogantyúra. Csak az egyik kéz megtámasztása (és felügyelet nélkül) sérülést okozhat.
4. Helyezze a testsúlyt az áthelyezni kívánt ülésbe.

### **EGYÉB UTASÍTÁSOK:**

1. Mindig használjon felvonót és rámpát. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, két kísérő segítségével érheti el a célt. A kerekesszéket a keret stabil részeinél fogva kell emelniük. A tolószéket soha nem szabad felemelni, amíg az utas ül. Csak tolni szabad.
2. Kerülje a lépcsőket vagy az akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget a kísérőtől:
3. Ez a kerekesszék kizárólag személy szállítására használható az ülésen.
4. A felhasználók semmilyen közlekedési eszköz használata közben ne üljenek tolószékben.
5. A kerekesszékek hátsó kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a kerekesszék nem mozog.
6. NE nyomja a lábtartókat, hogy üljön vagy felálljon, **FELKÜLÉS VESZÉLYE**. A lábtartókat a felhasználó használja, amikor ül.
7. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben **SÉRÜLÉSVESZÉLY**

### **KARBANTARTÁS:**

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít megőrizni kerekesszéke élettartamát és hatékonyságát.

### **HETI**

1. Ellenőrizze a keréknyomást a kerekeken lévő utasításokat követve.
2. Ellenőrizze, hogy a keresztirányú kar központi csavarja meg van-e húzva és jó állapotban van.
3. Tisztítsa meg a szövetet szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerrel.
4. Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz ruhával vagy speciális króm felületekre vagy festett felületekre alkalmas szerekkel.
5. Ellenőrizze a kerékcavarokat, és szükség esetén állítsa be.
6. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az első és a hátsó kerekek.

## **NEGYEDÉVENKÉNT**

1. Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be: kerékvillák, húzókerekek, légcsavarok.
2. Zsírozzon vagy olajozzon minden alkatrészt, amely súrlódásnak vagy kopásnak van kitéve.
3. Húzza meg a csavarokat és az anyákat.
4. A szék állapotának általános felülvizsgálata és a szükséges javítások.

## **ÉVENTE**

1. Javasoljuk, hogy évente egyszer végezzen teljes körű felülvizsgálatot szakképzett szolgáltatóval.
2. A páciens biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőrizze a gyártó. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

## **TISZTÍTÁS:**

A karbantartás és az ellenőrzés mellett a keret és a kárpit is alaposan megtisztítható.

- Annak érdekében, hogy megőrizze megjelenését, az anyagot rendszeresen tisztítani kell.
- A szennyeződések szivaccsal és enyhe mosószerrel lehet eltávolítani meleg vízzel, a textúra irányába söpörve.
- Öblítse le tiszta vízzel, mielőtt megszáradna.
- NE hagyja nedvesen a kerekesszéket.
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell megtisztítani.
- A keretet rendszeresen tisztítani kell enyhe tisztítószerrel.
- A bőrülékes kerekesszékeket száraz ruhával kell megtisztítani.
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. veszélyes a tolószék használata nedves kerekkel.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőt.
- Védje a tárgyat a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

## **VIGYÁZAT (!):**

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIÁK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A MOBIÁK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására
- Van egy  $\pm 3\%$ . Eltérés a termékek méretétől.

## **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

## **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:**

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a

745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

#### **GARANCIA:**

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA a helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túl használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkat. NEM takarja el azokat az alkatrészeket, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódhatnak, mint például a kárpit, a kerekek vagy a fékek.












Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), fuvarozókra nem vonatkozik a garancia.

Semmilyen szervizre vagy pótalkatrészre nem terjed ki a fedezet, kivéve, ha azokat egy felhatalmazott szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a felhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.

#### **A. MELLÉKLET ELŐÍRÁSOK**

	<b>0808837</b>	<b>0808838</b>
VÁZ	ALUMÍNIUM	ALUMÍNIUM
VÁZ	RÖGZÍTETT ÉS 90°-tól 180°-ig Dönthető HÁTTÁMA	RÖGZÍTETT ÉS 90°-tól 180°-ig Dönthető HÁTTÁMA
SZÍN	FEKETE	FEKETE
ÜLÉS	PVC BŐR, AUTÓTÍPUSÚ, ÁLLÍTHATÓ PÁRNÁVAL KÉNYELMES	PVC BŐR, AUTÓTÍPUSÚ, ÁLLÍTHATÓ PÁRNÁVAL KÉNYELMES
KARFÁK	LEVÁLASZTHATÓ-HOSSZABBÍTÓ	LEVÁLASZTHATÓ-HOSSZABBÍTÓ
LÁBTÁMASZ	LESZERELHETŐ ÉS MEGEMELHETŐ ÉS ÁLLÍTHATÓ HOSSZSÁG	LESZERELHETŐ ÉS MEGEMELHETŐ ÉS ÁLLÍTHATÓ HOSSZSÁG
KEREKEK	16"	24"
HÁTSÓ KERÉK	8"x2" (200x50mm) SZILÁRD	8"x2" (200x50mm) SZILÁRD
ELSŐ KERÉK		
DÖNTÉS ELLENŐRZŐ	IGEN SZABVÁNY	IGEN SZABVÁNY
KÉZI FÉK	IGEN	IGEN
MAX. TERHELHETŐSÉG	150 KG	150 KG
MEGEMELŐ LÁBTÁMÁK	IGEN SZABVÁNY	IGEN SZABVÁNY
FEJTÁMASZTÁS	IGEN SZABVÁNY	IGEN SZABVÁNY

#### **B. MELLÉKLET MÉRETEK**

											
<b>0808837</b>	45 cm	48 cm	42 cm	54 cm	59 cm	110 cm	119 cm	58 cm	16" 8"	150 Kg	35,5 Kg
<b>0808838</b>	45 cm	48 cm	42 cm	54 cm	67 cm	110 cm	122 cm	58 cm	24" 8"	150 Kg	37,5 Kg



### C. MELLÉKLET ÖSSZESZERELÉS

**Nyitás:** Húzza meg az oldalán lévő kart a hátsó rész felemeléséhez.

**Bezárás:** Kövesse a fordított eljárást






Szerelje össze a lábtámaszt úgy, hogy az alkatrészen lévő zsanérlemezeket a kerekesszék vázán lévő csuklócsapokra szerelje. Nyomja a lábtámaszt a kerekesszék belseje felé, amíg a helyére nem kattant. Ismétlje meg ugyanezt az eljárást a másik lábtámasznál.

Távolítsa el a lábtámaszt a kioldókar megnyomásával, forgassa kifelé, emelje le a lábtámaszt a csuklócsapszegekről.

Mivel a lábtámasz emelő funkcióval rendelkezik, ne használja az övet. A lábtámasz felfelé vagy lefelé mozgatásához nyomja előre a kart, és emelje fel vagy engedje le, az alsó résztől tartva. Ezt a funkciót biztonsági okokból csak a kezelőtől ajánlott elvégezni, és nem maga a felhasználó.

A lehajtható kartámasz felemeléséhez csavarja ki a kart, és húzza felfelé.

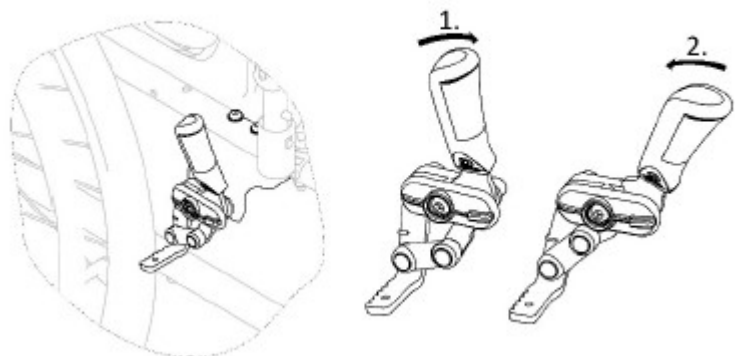

A fékek a kerekesszék rögzítésére szolgálnak, ha az álló helyzetben van, hogy megakadályozza az elgurulást.

A fék bekapcsolásához nyomja előre a fékkart a tenyérrel. (1)

A fék kioldásához húzza hátra a fékkart az alsó ujjakkal (2)

**Soha** ne húzza be a rögzítőféket mozgás közben.

Ne húzza be a rögzítőféket, hogy lelassítsa a kerekesszéket.

Ne támaszkodjon a rögzítőfékekre támaszkodás vagy áthelyezés céljából.

Fék használata közben tartsa távol ujjait a mozgó alkatrészektől, kezét mindig a fékkaron tartsa.




#### Ha a kerekesszéken van kísérfék:

A kísérfékekkel az asszisztens lefékezheti a kerekesszéket, miközben az mozog. A kísérfék rögzítőfékként is használható.

A fékezéshez húzza meg a tolókaron lévő **A** fékkart.

Parkoláshoz húzza meg erősen a fékkart, amíg a **B** biztonsági kar be nem kattant.

A kioldáshoz húzza meg a fékkart, és engedje el a fékkar alatti biztonsági kart.

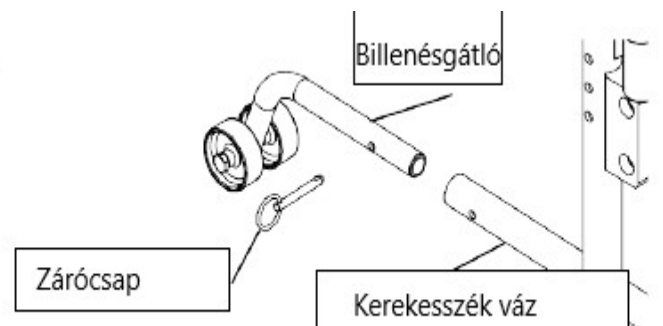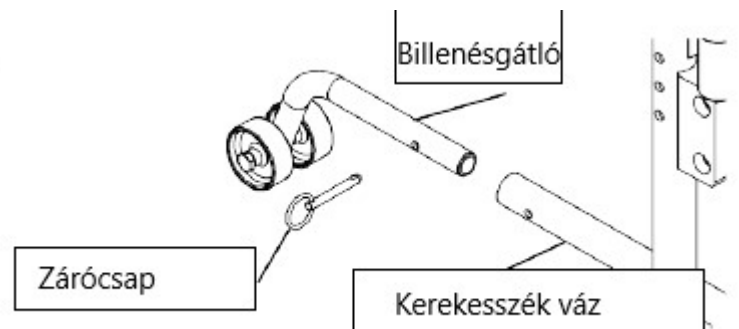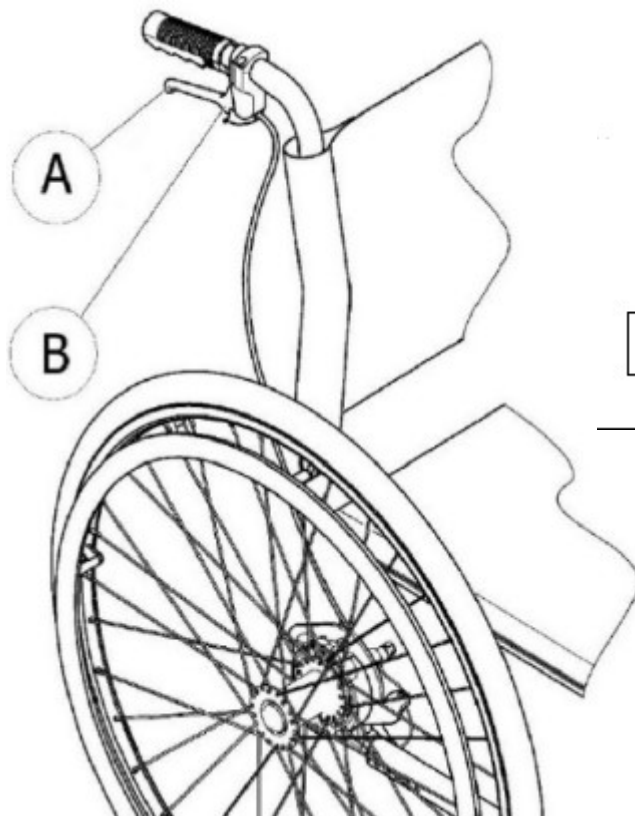

Helyezze be a dőlésátló kerekeket a fenti táblázat szerint.

Rögzítse a billenésátlót a kerekesszék vázához rögzítőcsapokkal. (vagy „C” klipek).

Győződjön meg arról, hogy a rögzítőcsapok (vagy „C” kapcsok) kinyúlnak mind a billenésátlón, mind a kerekesszék keretén.

Mindig kapcsolja ki a billenésátlót, mielőtt egy lépcsőn vagy járdaszegélyen áthaladna.

Soha ne lépjen rá a billenésátlóra, és ne használja billentési segédeszközként.



## D. MELLÉKLET SZIMBÓLUMOK



Orvosi eszköz



CE jelölés



Gyártó



Gyártási dátum



Termék szám



Olvassa el a használati utasítást



Széria szám



Ne használja ha a csomagolás sérült



Tétel szám



Pontosan felfelé



Egyedi  
eszközazonosító



Napfénytől távol  
tartandó



Tartsa szárazon



Rakodási magasság



Óvatosan kell kezelni



Törékeny



Kizárólag beltéri  
használat



Berendezési irányelv



MOBIAK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: [www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)