

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: **ONYX KERÉKESZÉK**



REF :0815010

CE

KIADÁS DÁTUM: 06/2025

RENDELTTETÉSE

A kerekesszékeket fizikai vagy mentális fogyatékosággal élő személyek szállítására tervezték. Lehetővé teszik mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen személyek szállítását, és a betegek maguk is használhatják őket (ha nagy hátsó kerekekkel rendelkeznek), vagy egy kezelő segítségével.

Ha a kerekesszék hátsó kereke 50-60 cm átmérőjű és speciális fogantyúval van ellátva, akkor a felhasználó önállóan is tud mozogni.

JELLEMZŐK

Kérjük, olvassa el az A. MELLÉKLETET

MÉRETEK

Kérjük, olvassa el a B. MELLÉKLETET

ÖSSZESZERELÉS

Kérjük, olvassa el a C. MELLÉKLETET

SZIMBÓLUMOK

Kérjük, olvassa el a D. MELLÉKLETET

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- NE használja ezt a terméket vagy bármelyik opcionális kiegészítőt, ha előbb nem olvasta el és nem értette meg teljes mértékben a jelen használati utasítást.
Ha nem érti a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket vagy utasításokat, forduljon egészségügyi szakemberhez, képviselőhöz vagy a műszaki személyzethez, mielőtt megkísérelné használni a készüléket, ellenkező esetben sérülés vagy meghibásodás okozhat.
- Tartsa a terméket hőforrásoktól távol.
- Legyen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben, és NE engedje, hogy a gyermekek a termékkel játszanak.
- Ne haladja meg a maximális hasznos terhelést.
- Különös figyelmet kell fordítani azokra a mozgó alkatrészekre, amelyekbe a végtagok beszorulhatnak és sérüléseket okozhatnak.
- Ne próbálja meg a kerekesszéket bármelyik szerelvényénél megemelni.
- Ahhoz, hogy segítség nélkül leülhessen és felállhasson a kerekesszékből, a felsőtestének megfelelő erővel és mozgékonyasággal kell rendelkeznie.

FONTOS (!)

A kerekesszék kialakítása úgy lett megtervezve, hogy maximális biztonságot nyújtson. Ennek ellenére a felhasználók veszélybe kerülhetnek, ha nem megfelelően használják a kerekesszéket. A saját biztonsága érdekében be kell tartania a jelen szabályokat. A nem szakszerű vagy helytelen beállítás vagy módosítás növelheti a balesetek kockázatát.

- Sötét helyeken mindig világos színű ruhát viseljen, hogy jól látható legyen.
- Legyen óvatos, amikor először használja ezt a kerekesszéket.
- Ismerje meg a kerekesszéket.
- Használja a kerekesszéket sík terepen, emelkedőn és lejtőn egyaránt.
- Ne próbáljon meg tárgyakat felvenni, ha azokat a térde közé kell emelnie a padlóról.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha az ülésen kell előrehaladnia.
- Ne használja a kerekesszéket autópályákon.
- Ne használja a kerekesszéket vízzel, jéggel vagy kenőanyagokkal borított úton vagy felületen.
- Mindig MOBIÁK által jóváhagyott alkatrészeket vagy adaptereket használjon.
- Ne álljon a kerekesszék vázára.

HASZNÁLAT ELŐTT:

- Ellenőrizze, hogy a váz nem sérült-e, hogy biztosítsa a termék biztonságos használatát. A vázon ne legyenek repedések vagy törések.
- Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
- Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen kinyílt-e. Ha nem, nyomja le az ülést a váz oldalainál.
- Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e.
- Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopási állapotát, hogy a termék használata emberek és tárgyak számára teljesen biztonságos legyen.
- Ha gyorsbiztonsági tengelyek vannak, ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e rögzítve.
- Ellenőrizze a gumiabroncsokat, a gumiabroncsok nyomását (ha felfújhatók) és a kerékfékeket. A fékek nem működnek megfelelően, ha a nyomás túl alacsony, vagy a gumiabroncsok és a fékek közötti távolság túl nagy.

FONTOS (!)

A következő módszereket csak tapasztalt betegek alkalmazhatják. Ha nem rendelkezik tapasztalattal, kérjen segítséget egy ápolótól.

HOGY LEÜLJ A KERÉKESSZÉKBE:

1. Helyezze a kerékesszéket minél közelebb magához.
2. Rögzítse a kerekeket.
3. Fogódzkodjon meg az oldalakban, és lassan üljön le a helyére.

HOGYAN ÁLLJON FEL A KERÉKESSZÉKBŐL:

1. Helyezze a kerékesszéket a lehető legközelebb ahhoz a helyhez, ahová szállítani fogják.
2. Rögzítse a kerekeket.
3. Támaszkodjon egyformán mindkét fogantyúra. Ha csak az egyik kezével támaszkodik (és nincs kísérője), az sérülést okozhat.
4. Helyezze testsúlyát arra a helyre, ahová szállítják.

EGYÉB UTASÍTÁSOK:

1. Mindig használjon lifteket és rámpákat. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, két kísérő segítségével érheti el úti célját. A kerékesszéket a váz stabil részeinél fogva kell emelniük. A kerékesszéket soha nem szabad emelni, amíg az utas ül. Csak tolni szabad.
2. Kerülje a lépcsőket vagy akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget a kísérőjétől!
3. Ezt a kerékesszéket kizárólag egy személy szállítására szabad használni az ülésen.
4. A felhasználók ne üljenek kerékesszékben, miközben bármilyen közlekedési eszközt használnak.
5. A kerékesszék hátsó kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a kerékesszék nem mozog.
6. NE nyomja a lábtartókat üléshez vagy felálláshoz, **FELBORULÁSVESZÉLY**. A lábtartókat a felhasználó használja, amikor ül.
7. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben, **SÉRÜLÉSVESZÉLY**

KARBANTARTÁS

A következő eljárások rendszeres ellenőrzése hozzájárul a kerékesszék élettartamának és hatékonyságának megőrzéséhez.

HETI

1. Ellenőrizze a kerekek nyomását a rajtuk feltüntetett utasítások szerint.
2. Ellenőrizze, hogy a keresztirányú kar központi csavarja szorosan van-e meghúzva és jó állapotban van-e.
3. Tisztítsa meg a kárpitot szappanos vízzel vagy megfelelő tisztítószerekkel. (bőr ülés esetén száraz ruhával).
4. Tisztítsa meg a kerékesszék fém alkatrészeit száraz ruhával vagy speciális termékekkel króm vagy festett felületekhez.
5. Ellenőrizze a kerék rögzítéseit, és szükség esetén állítsa be őket.
6. Ellenőrizze az első és hátsó kerekek kopását.

HÁROMHAVONTA

1. Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be: a kerekek villáit, a tengelyt és a kerekek fogantyúját
2. Kenje meg zsírral vagy olajjal az összes alkatrészt, amely kopásnak vagy elhasználódásnak van kitéve.
3. Húzza meg a csavarokat és anyákat.
4. Átfogó ellenőrzés a kerekesszék állapotáról és javítás, amennyiben szükséges.

ÉVES

1. Javasoljuk, hogy évente egyszer végeztesen teljes átvizsgálást egy szakértő szolgáltatónál.
2. A beteg biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőriztesse a gyártóval. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS

A karbantartás és ellenőrzés mellett a váz és a kárpit is általános tisztításon eshet át.

- A kárpitot rendszeresen tisztítani kell, hogy megőrizze megjelenését.
- A szennyeződések egy szivaccsal és enyhe tisztítószerrel, meleg vízzel lehet eltávolítani, a textúra irányába törölgetve.
- Öblítse le tiszta vízzel, mielőtt megszáradna.
- **NE hagyja a kerekesszéket nedvesen.**
- Ne tegye a kárpitot szárítóba. Ha a szennyeződés erős, a felületet puha kefével kell megtisztítani.
- A vázat rendszeresen tisztítsa meg enyhe tisztítószerrel.
- A bőr ülésű kerekesszékeket száraz ruhával kell tisztítani.
- A kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal tisztítsa meg. Ügyeljen a nedves kerekerekre, mert veszélyes a kerekesszék használata nedves kerekkel.
- Ha a terméket fertőtleníteni kell, használjon közönséges, enyhe fertőtlenítőt.
- Védje a terméket a karcolásoktól, vágásoktól és lyukaktól.



FIGYELEM (!):

- Probléma esetén **NE** használja a terméket, amíg a hiba el nem hárul, és vegye fel a kapcsolatot a hivatalos, képzett képviselővel.
- A termék használata a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő célokra tilos.
- A MOBIK A.E. nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő használatából eredő károkért.
- A MOBIK A.E. fenntartja a jogot, hogy a termék és a jelen kézikönyv jellemzőinek javítása érdekében előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtszon végre.
- A termékek méretei $\pm 3\%$ eltéréssel rendelkezhetnek.



KÖRNYEZETVÉDELME

Ha úgy találja, hogy termékét ki kell cserélni, vagy már nem használja, gondoljon a környezet védelmére:

- 1) Ne dobja a terméket a többi háztartási hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási szimbólumnak).
- 2) Forduljon a helyi önkormányzathoz, hogy megmutassák Önnek, hol lehet a terméket újrahasznosításra leadni.
- 3) Ha a már feleslegessé vált terméket a megfelelő újrahasznosítási ponton adja le, hozzájárul a környezet védelméhez, valamint a termék anyagainak újrahasznosításához.

ESEMÉNY JELENTÉSE:

Bármely súlyos esemény, amely a készülék használatával kapcsolatban merül fel, be kell jelenteni a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Kizárólagos felelősségünkkel kijelentjük, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai termékek alacsony kockázati kategóriájúak és megfelelnek a 2017/745 európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

Garancia:

A termékre két (2) év garancia vonatkozik a vásárlás napjától számítva.

A garancia gyári hibákat fedez, de NEM fedezi a helytelen használatból, rossz karbantartásból, módosításból, visszaélésből vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő hibákat. Továbbá NEM fedezi az olyan kopó alkatrészeket, mint a kárpit, a kerekek vagy a fékek, valamint mindazt, ami a használat során vagy az idő múlásával elkophat.

A garancia nem terjed ki az alábbiak által okozott károkra vagy hibákra: természeti katasztrófák, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ahol előírva) és szállító cégek.

Semmi sem fedezhető, ha azt nem ellenőrizte egy engedélyezett szerviz vagy a termék gyártója. A vizsgálat szállítási költségeit a felhasználó, az ügyfél vagy a kiskereskedelmi üzlet viseli.

Garanciális űrlap

VÁSÁRLÓ ADATAI			
NÉV:			
VÁSÁRLÁS DÁTUM:		TELEFONSZÁM:	
SOROZATS ZÁM:			
LOT:			
BOLT ADATAI			
NÉV:			
CÍM:			
TELEFON:			
BOLT PECSÉTJE ÉS ALÁÍRÁSA			



MOBIAC S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



A. MELLÉKLET JELLEMZŐK

MBK KÓD	HU LEÍRÁS	EN LEÍRÁS
0815010	ONYX KERÉKESSZÉK	WHEELCHAIR ONYX

VÁZ / FRAME	ACÉL, ÖSSZHÁTHATÓ / STEEL, FOLDABLE
ÜLÉS / SEAT	SZÖVET / FABRIC
ÜLÉS ÉS HÁTTÁMLA SZÖVET / SEAT & BACKREST FABRIC	TÚZGÁTLÓ TULAJDONSÁGOKKAL / WITH FIRE RETARDANT PROPERTIES
KARFÁK / ARMRESTS	LEVEHETŐ / DETACHABLE
LÁBTÁMASZOK / FOOTRESTS	LEVEHETŐ, FORGÓ, SWING AWAY, MAGASSÁGÁLLÍTHATÓ/ DETACHABLE, ROTATING, SWING AWAY WITH ADJUSTABLE HEIGHT
HÁTULSÓ KEREKEK/REAR WHEELS	24" MAG TÖMÖR / 24" MAG WHEEL SOLID
ELÜLSŐ KEREKEK/ FRONT WHEELS	8"x2" (200x50mm) TÖMÖR / SOLID
MAXIMÁLIS TERHELÉS / MAX LOAD	272 kg
EXTRA	KÉTES KERESZTSZÁR / DOUBLE CROSS BAR

B. MELLÉKLET MÉRETEK

0815010	69 cm	67 cm	49 cm	43 cm	89 cm	127 cm	91 cm	50 cm	24" 8"	272 kg	28*kg


* Lábtartókkal. A lábtartók nélküli kerekesszék súlya 26 kg.

C. MELLÉKLET. ÖSSZESZERELÉS

A kezében lévő kerekesszék eltérhet a következő fotókon látható kerekesszéktől. Az összeszerelés folyamata hasonló.

Nyitás: Fogja meg a fogantyúkat, és húzza kifelé, majd nyomja lefelé az ülés oldalán található rudakat, amíg a kerekesszék teljesen ki nem nyílik (A. ábra).

Bezáráshoz: Kövesse a fordított sorrendet.

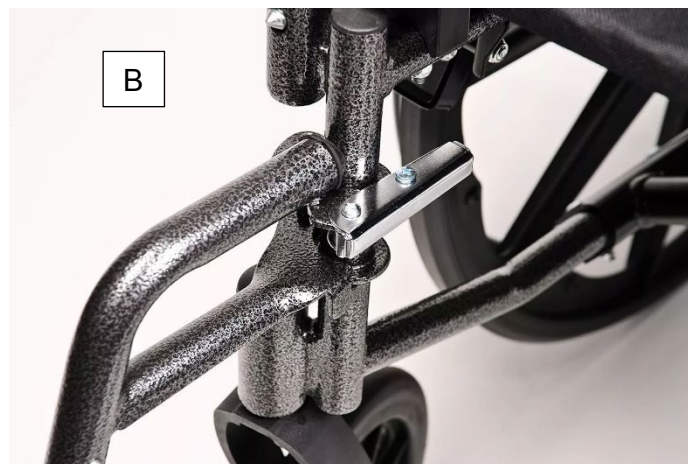

Szerelje össze a lábtartót úgy, hogy a rajta lévő csuklópántokat a kerekesszék vázán lévő csuklócsapokra helyezi. Nyomja a lábtartót a kerekesszék belseje felé, amíg a helyére nem kattannak. Ismétlje meg ugyanezt a folyamatot a másik lábbal is (B. ábra).

Vegye le a lábtartót a kioldókar megnyomásával, fordítsa kifelé, majd emelje le a lábtartót a csuklócsapokról.

A lábtartók magasságának beállításához nyomja meg a lábtartókon található gombokat a kívánt magasságig.



A termék készen áll a használatra.



A fékek rögzítik a kerekesszéket álló helyzetben, hogy megakadályozzák az elgurulást.

A fék behúzásához nyomja előre a fékkart a tenyerével.


A fék kioldásához húzza hátra a fékkart az ujjával.

Soha ne húzza be a rögzítőféket mozgás közben.

Ne húzza be a rögzítőféket a kerekesszék lassításához.

Ne támaszkodjon a rögzítőfékre támasztékként vagy átszállás céljából.

Fék használata közben tartsa távol az ujjait a mozgó alkatrészekről, mindig tartsa a kezét a fékkaron.

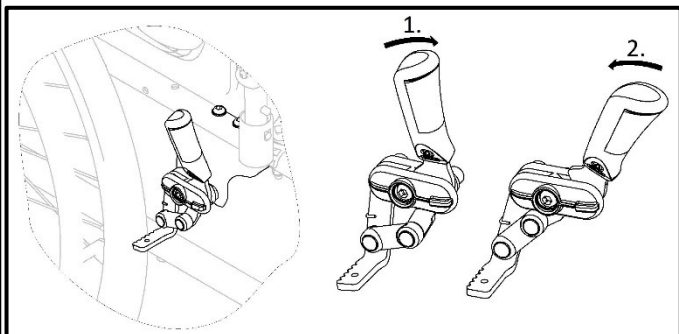

D. MELLÉKLET. SZIMBÓLUMOK

A címkén, a fő kartondobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvön nyomtatott szimbólumok leírása



ORVOSI ESZKÖZ



CE JELÖLÉS



GYÁRTÓ



GYÁRTÁSI DÁTUM



TERMÉK SZÁM



OLVASSA EL HASZNÁLATI
UTASÍTÁST



SOROZAT SZÁM



NE HASZNÁLJA, HA
CSOMAGOLÁS SÉRÜLT



TÉTEL SZÁM



HELYES IRÁNY FELFELE



EGYEDI
ESZKÖZAZONOSÍTÓ



NAPFÉNYTŐL TÁVOL
TARTANDÓ



TARTSA SZÁRAZON



HALMOZÁSI MAGASSÁG



ÓVATOSAN KEZELE



TÖRÉKENY



CSAK BELTÉRI
HASZNÁLATI



ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK HULLADÉKAIRÓL
SZÓLÓ IRÁNYELV