

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

"ACHIMAX" O-1140 RUGALMAS ACHILLES-ÍN TÁMOGATÓ



FIGYELEM! A termék első használata előtt kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Vásárláskor kérjük, ellenőrizze a termék teljességét és minőségét. Bármilyen aggályát jelezze a termék forgalmazójának. Mennyiséggel/minőséggel kapcsolatos aggályok esetén kérjük, kövesse a jótállási jegyen található utasításokat, azaz mutassa be a vásárlást igazoló bizonylatot és a kereskedő által kitöltött jótállási jegyet.

I. TERMÉKLEÍRÁS

Az "ACHIMAX" rugalmas Achilles-ín rögzítő rendkívül rugalmas, lélegző anyagból készült. A kiegészítő szilikon betétek tartást biztosítanak, csökkentik a feszültséget, valamint enyhítik a fájdalmat és a duzzanatot az Achilles- ínban.

II. JELLEMZŐK:

A kompressziós kötött anyag és a két szilikon betét kombinációjának köszönhetően az ortézis masszázshatást fejt ki, amely javítja a véráramlást, ami a duzzanat és a vérömlenyek gyorsabb felszívódásához vezet. Enyhíti az irritációt és a fájdalmat is. Javítja az izomerőt és a bokaízület saját stabilizációját.

III. HASZNÁLAT

- Győződjön meg arról, hogy a termék mérete megfelelő.
- Hajtsa ki az ortézis felső részét a szilikon betét aljáig.
- Fogja meg az ortézist a szilikon betétek közepe közelében, és feszítse a lábfej fölé, amíg a sarok megfelelően a helyére nem kerül.
- Hajtsa ki ismét a kötés felső részét, és szükség esetén állítsa be az ortézis helyzetét.

IV. MÉRETTÁBLÁZAT

Méret	Kissé behajlított könyök kerülete
S	24-26 cm
M	26-28 cm
L	28-31 cm
XL	31-34 cm
XXL	34-37 cm

V. ÖSSZETÉTEL

Poliamid 55%,
Elasztán 45%

VI. HASZNÁLATI SZABÁLYOK

- Ezt a terméket csak orvos utasítása szerint szabad használni.
- Az ortézis felvételének módját szakképzett orvosi személyzetnek kell bemutatnia a felhasználót ellátó személy jelenlétében (ha van ilyen).
- A terméket és alkotóelemeit csak rendeltetésszerűen szabad használni.
- A bőrfelületnek, ahol az ortézis a testhez tapad, tisztának kell lennie – a termék viselése közben ne alkalmazzon gyógyhatású kenőcsöket vagy krémeket, és ne alkalmazzon borogatást közvetlenül a felhelyezése előtt.
- Éjszakai használat csak akkor megengedett, ha orvosa azt javasolja.
- Az ortézis hosszú ideig tartó használata korlátozott aktív és passzív ízületi mozgást eredményezhet. Ezért ajánlott rendszeresen végezni a szakképzett egészségügyi személyzet által orvos tanácsára kiválasztott gyakorlatokat.
- A terméket a jelen kézikönyvben és a terméken található címkén található ajánlásoknak megfelelően tisztán tartani. A termék nem megfelelő tisztítása és karbantartása bőrkárosodáshoz vezethet.
- A terméket tilos használni, ha bármelyik alkatrész hiányzik. Ne használjon egyszerre két azonos vagy különböző terméket.

VII. HASZNÁLAT

Ez a termék a következőkre használható:

- az Achilles-ín sérüléseinek és fájdalmanak megelőzése és kezelése;
- az inon belüli gyulladás;
- az Achilles-ín kopása és elhasználódása által okozott krónikus fájdalom;
- sérülések és műtétek utáni irritáció duzzanat és vérömlenyek miatt.

VIII. ELLENJAVALLATOK

- bőrbetegségek vagy sérülések a termék használati területén, különösen gyulladásos tünetek (túlzott hő, duzzanat vagy bőrpír) esetén;
- érzékszervi és véráramlási zavarok, pl. cukorbetegség esetén;
- nyirokelvezetési zavarok – beleértve a lágy szövetek nem egyértelmű duzzanatát a rögzítés helyén;
- a rögzítés használatához kezelőorvosi vizsgálat szükséges különböző eredetű memóriazavarokkal küzdő személyek, mentális zavarokkal küzdő személyek és gyermekek esetében.

IX. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A termék rendszeres mosását javasoljuk. Mosás előtt távolítsa el a termék fém részeit (ha lehetséges), és zárja be az összes tépőzárát.

- Kézzel mosható legfeljebb 40°C-on, semleges, antiallergén mosószerrel.
- Langyos vízben öblítse le; ne használjon öblítőt.
- Ne csavarja ki.
- Ne fehérítse.
- Ne vasalja.
- Ne tisztítsa vegytisztítással.
- Ne szárítsa szárítógépben.
- Szárítson fektetve, árnyékos, jól szellőző helyen – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. A termék nem hőálló, és 120°C feletti hőmérsékleten elveszíti tulajdonságait.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Gyártó
	CE jelölés
	Hivatkozási szám
	Gyártás dátuma
	Kérjük, olvassa el a használati utasítást
	Figyelmeztetés
	Sorozatszám
	Állítsa függőlegesen, ne döntse fel!
	Száraz helyen tárolja
	Törékeny, óvatosan kezelje
	Ne vágja el
	A csomagolás újrahasznosítható
	Kézzel mosható
	Ne fehérítse
	Ne vasalja
	Ne vegytisztítsa
	Ne szárítsa szárítógépben



REHA FUND Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 14, 03-310 Varsó, Lengyelország
 tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
 e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.1
 Kiadva:

Garanciakártya Rugalmas Achilles-in

rögzítő

„ACHIMAX” O-1140

Modell	Sorozatszám:	Értékesítés dátuma:	Eladó aláírása és pecsétje:

Garanciális feltételek

1. A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen garanciakártyával fedezett termék új és kiváló minőségű.
2. A termékre a jótállási kártyán feltüntetett értékesítés dátumától számított 18 hónapos jótállási időszak vonatkozik.
3. A garanciális igény elbírálásának alapja a helyesen kitöltött garanciakártya és a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása.
4. A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy a hivatalos szerviztechnikusok javítják, feltéve, hogy a terméket rendeltetésszerűen és a felhasználói kézikönyvben szereplő ajánlásoknak megfelelően használták.
5. A javításokat/cseréket a lehető leghamarabb, a berendezés szervizközpontba való beérkezésétől számított 14 napon belül elvégezzük.
6. A garancia nem terjed ki a következőkre:
 - a használati utasításban leírt karbantartási, tisztítási és övbeállítás tevékenységekre;
 - a normál használat során kopásnak kitett alkatrészeket;
 - az öv mechanikai és hőhatás okozta károsodásait, pl. törés, szakadás stb.
 - a használati utasításnak nem megfelelő használatból, gondatlanságból, független javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő károsodások.
7. Mielőtt a berendezést átadná a hivatalos szerviztechnikusoknak, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy szervizelésre alkalmas legyen.
8. A javításokat és cseréket a Reha Fund Sp. z o.o. felhatalmazott szerviztechnikusai végzik.
9. Indokolatlan panasz esetén a szállítási költségeket az ügyfélnek kell viselnie.
10. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
11. Az eladott árukra vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel az ügyfélnek az áruk szerződésszegéséből eredő jogait.

SZERVIZJAVÍTÁSOK LISTÁJA (a szervizközpont kitöltendő)

Sz	Értékesítés dátuma	Rendelészám	A hiba leírása/a javítás terjedelme	Dátum a javítás	Szervizbélyegző és aláírás
1.					
2.					

MEGJEGYZÉSEK