

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Boka rögzítő "MALLEOMAX" O-1160

I. BEVEZETÉS

Tisztelt Hölgym/Uram

Köszönjük, hogy a REHA FUND Sp. z o.o. termékét választotta, amely a lengyel piacon vezető szállítója az orvosi segédeszközöknek és rehabilitációs berendezéseknek.

A használati utasítás olyan irányelveket és javaslatokat tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a termék helyes használatához.

Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt a terméket használná.

- A következő használati utasításban szereplő fotók csak illusztrációs célt szolgálnak.



A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatáért, a biztonságos használatra vonatkozó szabályok be nem tartásáért vagy a rendeltetéstől eltérő használatért.

II. JELLEMZŐK

Méretábrázat

Méret	Boka kerülete
S	15-22
M	22-30
L	30-36

ÖSSZETÉTEL

30% poliészter (bársony szövet) 26% polipropilén () 16% poliészter ()
Elastikus szalag 12% likra 6% poliészter () szivacs 6% poliamid szálak 3% tépőzáras szalag 1% nejlón

A MALLEOMAX boka rögzítő könnyű, lélegző anyagból készült. Anatómiailag kialakított kialakítása, amely hasonlít egy fűzős cipőhöz, lehetővé teszi, hogy a rögzítő tökéletesen illeszkedjen a lábra. A rögzítő három méretben kapható, és mind a jobb, mind a bal lábra alkalmas.

III. RENDELTETÉSE

A MALLEOMAX boka rögzítő merev műanyag oldalsó merevítővel van ellátva, amelyek alkalmazkodnak a láb alakjához és kiváló támasztást nyújtanak a sérült ízületnek. A rugalmas rögzítő pántok lehetővé teszik a láb hajlításának és nyújtásának beállítását.

A termék a következő esetekben használható:

- Enyhe vagy közepes bokaszalag-szakadás
- Enyhe vagy közepes ficamok
- Ízületi instabilitás
- Traumatikus lábadozás

IV. ELLENJAVALLATOK

Ne használja a terméket, ha a diagnózis bizonytalan!

Lágyrész-defektusok és sebgyógyulási problémák
Meglévő nyirokelvezetési problémák

Ha az ortézis túl szoros, fokozhatja a fájdalmat; ha túl laza, nem lesz a kívánt hatása.

Ha az ortézis bőrrrel érintkező területein bőrváltozások jelentkeznek, a használata korlátozott és csak orvosi felügyelet mellett lehetséges.

Az ortézisek használatát a kezelőorvosnak kell értékelnie különböző eredetű memóriazavarokkal küzdő emberek, mentális zavarokkal küzdő emberek és gyermekek esetében.

V. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

Ez a termék csak orvos által ajánlott módon használható.

Az ortézis felhelyezésének módját képzett egészségügyi személyzetnek kell bemutatnia a felhasználó jelenlétében.

A terméket és alkatrészeit csak a rendeltetésszerűen szabad használni.

Ha a termék használata közben fájdalmat, duzzanatot, érzékelésbeli változásokat vagy bármilyen szokatlan reakciót tapasztal, azonnal forduljon orvosához

. A termék éjszakai használata csak orvosi javaslatra megengedett.

Az ortézis hosszú távú használata az ízületek aktív és passzív mozgásának korlátozottságához és izomsorvadáshoz vezethet, ezért ajánlott a kezelőorvos ajánlása

alapján képzett egészségügyi személyzet által kiválasztott gyakorlatokat végezni. A terméket a jelen kézikönyvben és a termékre rögzített címkén szereplő ajánlásoknak megfelelően tisztán kell tartani. A termék nem megfelelő tisztítása és karbantartása bőrváltozásokhoz vezethet.

A termék nem használható, ha bármely része hiányzik. Két azonos vagy különböző termék nem használható egyszerre.

A termékkel kapcsolatos bármely súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a beteg lakik.

VI. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Győződjön meg arról, hogy a termék mérete megfelelően van kiválasztva.
- Az ortézis felhelyezése előtt oldja ki az összes pántot és lazítsa meg a fűzőket.
- Helyezze a lábát az ortézisbe úgy, hogy a sarok a saroktartóban legyen.
- Kösse be a fűzőket úgy, hogy a nyomás ne legyen túl erős és ne akadályozza a vérkeringést.
- Húzza meg a rugalmas pántokat keresztben, és rögzítse őket a merevítő oldalán vagy hátulján.

VII. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A terméket rendszeresen ajánlott mosni. Mosás előtt távolítsa el a termék fém alkatrészeit (ha lehetséges), és rögzítse az ortézis összes tépőzáras rögzítőjét.

- Kézzel mossa 40 °C-os hőmérsékletű vízben, semleges, hipoallergén mosószerrel.
- Öblítse le langyos vízzel, ne használjon öblítőszert.
- Ne csavarja ki.
- Ne fehéritse.
- Ne vasalja.
- Ne vegytisztítsa.
- Ne szárítsa szárítógépben!
- Szárazon, árnyékos és jól szellőző helyen szárítsa – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. A termék nem hőálló, és 120 °C feletti hőmérsékleten elveszíti tulajdonságait.
- Saját biztonsága érdekében rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát.

VIII. A HASZNÁLAT BEFEJEZÉSE

Ha az ortézis gyártói ajánlásoknak megfelelő ellenőrzése során bármilyen rendellenességet talál. Lásd a használati utasítás „Tisztítás és karbantartás” című részét – azonnal hagyja abba a termék használatát. Használat után a terméket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

IX. VÁRHATÓ ÉLETTARTAM

Az ortézis várható élettartama 5 év. Ez az időszak a termék használatának gyakoriságától és karbantartásától függően hosszabb vagy rövidebb lehet.

X. Garancia

A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy az eladott termék új és kiváló minőségű. A termékre garancia vonatkozik (a garancia részletes feltételei a gyártó weboldalán találhatók). A terméket a rendeltetésszerűen és a használati utasításban szereplő ajánlásoknak megfelelően kell használni.

XI. SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

	Gyártó		Felső rész, ne fordítsa meg
	CE jelölés		Védje a nedvességtől
	Katalógusszám		Törékeny, óvatosan kezelje
	Gyártás dátuma		Ne vágja el
	Olvassa el a használati utasítást		Újrahasznosítás
	Figyelmeztetés		Tartsa távol a napfénytől
	Tételkód		Kézzel mosható
	Orvosi eszköz		Ne fehéritse
	Egyedi termékazonosító kód		Ne vasaljon
	Mennyiség		Ne vegytisztítsa
	Modellszám		Ne szárítsa szárítógépben
	Lejáratí idő		

