

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RÖVID LÁB-TÉRDRÁM "AIR WALKER SHORT" O-1181

I. BEVEZETÉS

Tisztelt Hölgyem/Uram

Köszönjük, hogy a REHA FUND Sp. z o.o. termékét választotta, amely a lengyel piacon vezető szállítója az orvosi segédeszközöknek és rehabilitációs berendezéseknek.

A használati utasítás olyan irányelveket és javaslatokat tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a termék helyes használatához.

A kézikönyvben szereplő fotók csak illusztrációs célt szolgálnak!



FIGYELEM! A termék használata előtt olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatáért, a biztonságos használatra vonatkozó szabályok be nem tartásáért vagy a rendeltetéstől eltérő használatért.

II. JELLEMZŐK

MÉRETTÁBLÁZAT

Méret	Cipőméret
XS	30-34
S	35-40
M	40-44
L	44-47

A FELHASZNÁLT ANYAGOK JEGYZÉKE

45% polipropilén
20% poliészter
20% poliuretán
15% hőre lágyuló poliuretán

Termékjellemzők

Az „AIR WALKER SHORT” rövid boka- és sípcsontvédő könnyű kialakításának köszönhetően csökkenti a sérült végtag terhelését. Egykamrás levegőrendszerrel, beépített pumpával és szellőzőszeleppel rendelkezik a jobb védelem és a beteg állapotához igazítható kompresszió érdekében. A levehető előlő panel lehetővé teszi a cipő teljes kinyitását, így könnyebb felvenni. A lekerekített, csúszásmentes talp biztonságos és fiziológias járást biztosít. A védő állítható és levehető lábujjvédővel is rendelkezik.

III. RENDELTESSZERŐ FELHASZNÁLÁS ÉS ALKALMAZÁS

Az AIR WALKER SHORT ortézis kiváló alternatívája a hagyományos gipszrögzítésnek, jelentősen javítva a kényelmet. A légrendszer állítható nyomóereje csökkenti a vérömlenyek és a duzzanat kockázatát. A teljesen nyitott kialakítás lehetővé teszi a sérülések vizuális ellenőrzését és a megfelelő végtaghigiénit.

A termék a következő esetekben használható:

- Műtét utáni kezelés (Achilles-ín szakadás, szalag-/lágyszalag- és ín sérülések),
- Nem műtét utáni kezelés (lábközepcsonttörések, Achilles-ín sérülések, súlyos deformitások),
- Stabil láb- és ízület törések,
- Bokatorések utáni műtét utáni ellátás,
- Az érintett terület állandó vagy átmeneti működési zavarainak utókezelése és rehabilitációja.

IV. CÉLCSOPORT

A termék azoknak szól, akiknek a kezelés és rehabilitáció során rögzíteni kell a lábukat vagy a bokaizületüket. Különösen ajánlott:

- műtét után lábadozó betegeknek (pl. Achilles-ín szakadás, szalagrekstrukció, lágyrész- és inműtét),
- metatarsalis törések, Achilles-ín sérülések vagy jelentős lábdeformitások konzervatív kezelésében részesülő személyek,
- stabil láb- és boka-törésekkel rendelkező betegek,
- talus törés vagy boka ficam utáni posztoperatív ellátásban részesülő személyek,
- ideiglenes vagy tartós láb- és bokaizületi diszfunkciók kezelése és rehabilitációja során támaszt igénylő betegek számára.



V. ELLENJAVALLATOK

- Instabil törések vagy a sípcsont vagy a lábszárcsont proximális részének törései.
- Lágyrész-defektusok és sebgyógyulási problémák.
- Meglévő nyirokelvezetési problémák.
- Az ortézis túl szoros felhelyezése fájdalom fokozódásához vezethet; túl laza felhelyezése pedig a kívánt hatás elmaradását eredményezi.
- Ha az ortézis felhelyezésének területén bőrváltozások jelentkeznek, annak használata korlátozott, és csak orvosi felügyelet mellett lehetséges.



VI. MELLÉKHATÁSOK

- Bőrirritáció – horzsolások, nyomásnyomok vagy bőrpír jelenhetnek meg a nyomás alatt álló területeken, különösen akkor, ha az ortézis rosszul illeszkedik vagy túl szorosan van rögzítve.
- Nyomásérzet és bizsergés — a rendszerben lévő túlzott légnyomás összenyomhatja az ereket és az idegeket, ami bizsergéshez vagy zsibbadáshoz vezethet a lábfejben.
- Keringési zavarok — az ortézis túl szoros viselése vagy szünetek nélküli használata ronthatja a végtag vérkeringését.
- Túlzott izzadás és gombás fertőzések kockázata — a meleg, zárt környezet elősegíti a láb izzadását, és megfelelő higiénia nélkül növeli a gombás fertőzések kialakulásának kockázatát.
- Fájdalom vagy kellemetlen érzés — előfordulhat, ha a végtag rosszul van elhelyezve az ortézisben, és nincs megfelelően stabilizálva.



VII. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne használja az ortézist orvosa vagy gyógytornásza tanácsát meg nem kérdezve — a terméket a sérülés típusához kell kiválasztani és beállítani.
- Ne használja az ortézist nyílt sebekben anélkül, hogy azokat előbb kötéssel rögzítené és orvosa beeleegyzését kérné.
- Súlyos fájdalom, zsibbadás, a lábujjak kék elszíneződése vagy hirtelen duzzanat esetén azonnal vegye le az ortézist, és forduljon orvosához.
- Az ortézis nem helyettesíti a szakszerű kezelést, csak támogatja a kezelést és a rehabilitációs folyamatot.
- Mindig ellenőrizze, hogy az ortézis megfelelően van-e felhelyezve és beállítva, és kerülje a túlzott felfújást légnyomással.
- Naponta ellenőrizze az ortézis alatt lévő bőrt, hogy nincs-e horzsolás, bőrpír vagy fertőzés jele.
- Gondoskodjon a lába és a rögzítő higiéniájáról, rendszeresen tisztítsa meg a belsejét, és cserélje le a zoknit száraz, lélegzőre.
- Ne aludjon az ortézisben, kivéve, ha orvosa másképp tanácsolja.
- Kövesse orvosa ajánlásait a viselési időtartammal és a végtag fokozatos terhelésével kapcsolatban.
- Kerülje a csúszós vagy egyenetlen felületeken való járást, hogy csökkentsék a elesés kockázatát.
- Az ortézisek használatát a kezelőorvosnak kell értékelnie különböző eredetű memóriazavarokkal küzdő emberek, mentális zavarokkal küzdő emberek és gyermekek esetében.
- A rögzítőt nem szabad csupasz bőrön viselni; a dörzsölődés elkerülése érdekében ajánlott pamut zokni felett viselni a terméket.



VIII. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

Ez az eszköz csak orvos utasítása szerint használható.

Az ortézis felvételének módját szakképzett egészségügyi személyzetnek kell bemutatnia a felhasználót ellátó személy jelenlétében (ha van ilyen).

Az eszközt és alkotórészeit csak rendeltetésszerűen szabad használni.

Ha az eszköz használata során fájdalom, duzzanat, érzésváltozás vagy bármilyen szokatlan reakció jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz.

Éjszakai használat csak akkor megengedett, ha azt a kezelőorvos javasolja.

Az ortézis hosszú ideig tartó használata korlátozott aktív és passzív ízületi mozgást és izomsorvadást eredményezhet. Ezért ajánlott rendszeresen végezni a kezelőorvos utasítására szakképzett egészségügyi személyzet által kiválasztott gyakorlatokat.

Az eszközt a jelen kézikönyvben és az eszközön található címkén található ajánlásoknak megfelelően tisztán tartani. Az eszközt nem megfelelő tisztítás és karbantartás bőrkárosodáshoz vezethet.


Az ortézist tilos használni, ha bármelyik alkatrész hiányzik. Két azonos vagy különböző eszközt tilos egyszerre használni. A készüléket érintő minden súlyos incidenst jelenteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, ahol a felhasználó vagy a beteg lakik.

IX. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Győződjön meg arról, hogy az ortézis mérete megfelelően van kiválasztva.

Az ortézis felhelyezése:

- 9.1. Az ortézis felhelyezése előtt oldja ki az összes pántot, vegye le az előlő panelt és oldja ki a belső szövetbélést.
- 9.2. Tekerje a párnázást a vádlijára, és rögzítse biztonságosan. Győződjön meg arról, hogy a légpumpa pontosan a lába közepén helyezkedik el.
- 9.3. Rögzítse az előlő panelt úgy, hogy a légpumpa a nyílásában legyen.
- 9.4. Húzza át a pántot az előlő héjon, majd a csatán.
- 9.5. Húzza meg a pántot, hogy szorosan illeszkedjen, majd rögzítse. Ismételje meg ezt a lépést mindhárom pántnál.
- 9.6. A légréndszer felfújásához forgassa el a szivattyú alatt található szelepet az óramutató járásával megegyező irányba, majd pumpáljon, amíg el nem éri a kívánt illeszkedést. Vigyázzon, ne fújja túl a merevítőt. Minden használat után engedje le a merevítőt a szelepet az óramutató járásával ellentétes irányba.

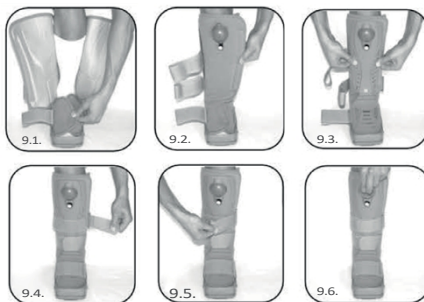

X. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A terméket rendszeresen ajánlott mosni. Mosás előtt távolítsa el a termék fém alkatrészeit (ha lehetséges), és rögzítse a merevítőn található összes tépőzáras pántot.

- a. Kézzel mossa 40 °C-os hőmérsékletű vízben, semleges, hypoallergén mosószerrel.
- b. Öblítse le langyos vízzel, ne használjon öblítőszert.
- c. Ne csavarja ki.
- d. Ne fehéritse.
- e. Ne vasalja.
- f. Ne vegytisztítsa.
- g. Ne szárítsa szárítógépben,
- h. Szárazon, árnyékos és jól szellőző helyen szárítsa. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. A termék nem hőálló, és 120 °C feletti hőmérsékleten elveszíti tulajdonságait.

Tárolás és szállítás

A terméket száraz helyen tárolja, kerülje a magas hőmérsékletet és a nedvességet. A terméket eredeti csomagolásában kell szállítani, kerülve a nyomást és a zúzódást.

XI. A HASZNÁLAT VÉGE

Ha a gyártó ajánlásainak megfelelően a termék ellenőrzése során bármilyen rendellenességet talál, olvassa el a használati utasítás „Tisztítás és karbantartás” című részét, és azonnal hagyja abba a termék használatát.

Ártalmatlanítás

Használat után a terméket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

XII. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az ortézis rendeltetésszerű használati ideje 3 év. Ez az időszak hosszabb vagy rövidebb lehet a termék használatának gyakoriságától és karbantartásától függően.

XIII. Garancia

A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy az eladott termék új és kiváló minőségű. A termékre garancia vonatkozik (a garancia részletes feltételei a gyártó weboldalán található). A terméket a rendeltetésszerűen és a használati utasításban szereplő ajánlásoknak megfelelően kell használni.

XIV. SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

	Gyártó		Felső rész, ne fordítsa meg
	CE jelölés		Védje a nedvességtől
	Katalógusszám		Törékeny, óvatosan kezelje
	Modellszám		Ne vágja el
	Gyártási dátum		Újrahasznosítás
	Lásd a használati utasítást		Kézzel mosható
	Orvosi eszköz		Ne fehéritse
	Egyedi termékazonosító kód		Ne vasalja
	Figyelmeztetés		Ne vegytisztítsa
	Tételkód		Ne szárítsa szárítógépben
	Mennyiség		



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Varsó, Lengyelország e-
mail:info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

