

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### RUGALMAS TÉRDTÁMASZ PÁNTOKKAL "GENUMAX PLUS" O- 1210



**FIGYELEM!** A termék első használata előtt kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Vásárláskor kérjük, ellenőrizze a termék teljességét és minőségét. Bármilyen aggályát jelezze a termék forgalmazójának. Mennyiséggel/minőséggel kapcsolatos aggályok esetén kérjük, kövesse a jótállási jegyen található utasításokat, azaz mutassa be a vásárlást igazoló bizonylatot és a kereskedő által kitöltött jótállási jegyet.

#### I. TERMÉKLEÍRÁS


A "GENUMAX PLUS" rugalmas térdtámasz rendkívül rugalmas, lélegző anyagból készült. A térdkalács körüli szilikongyűrű további stabilizációt biztosít. Az oldalsó merevítők a középső és oldalsó szalagok megtámasztását biztosítják anélkül, hogy korlátoznák a térdízület mozgását.

#### II. JELLEMZŐK

A kompressziós anyagnak és a szilikongyűrűnek köszönhetően a rögzítő masszázshatást fejt ki és javítja a véráramlást, ami felgyorsítja a duzzanat és a vérömlenyek felszívódását és csökkenti a fájdalmat. A combon és az alsó lábszáron található kiegészítő pántok további stabilizációt biztosítanak és megakadályozzák a rögzítő elmozdulását.

#### III. HASZNÁLAT

- Győződjön meg arról, hogy a termék mérete megfelelően van kiválasztva.
- A merevítő felvétele előtt lazítsa meg a combon és az alsó lábszáron lévő pántokat.
- Húzza át a merevítőt a lábfejen, és helyezze közvetlenül a testre.
- Győződjön meg arról, hogy a szilikongyűrű teljesen körülveszi a térdkalácsot, és a merevítők pontosan a térdízület oldalain helyezkednek el.
- Rögzítse a pántokat a combon és az alsó lábszáron, a feszességet az igényeinek megfelelően állítva be.

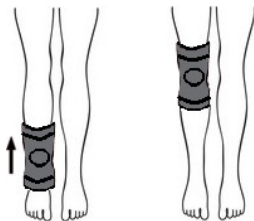

#### IV. MÉRETTÁBLÁZAT

| Méret | Térdkerület a térdkalács magasságában |
|-------|---------------------------------------|
| S     | 34-36 cm                              |
| M     | 36-38 cm                              |
| L     | 38-41 cm                              |
| XL    | 41-44 cm                              |
| XXL   | 44-47 cm                              |

#### V. ÖSSZETÉTEL

Poliamid 55%,

Elasztán 45%

Szilikon gyűrű: 100% szilikon

#### VI. HASZNÁLATI SZABÁLYOK

- A terméket kizárólag orvos utasítása szerint szabad használni.
- A fűző felhelyezésének módját szakképzett egészségügyi személyzetnek kell bemutatnia a felhasználót ellátó személy jelenlétében (ha van ilyen).
- A terméket és alkatrészeit csak rendeltetésszerűen szabad használni.
- Ha a termék használata során fájdalom, duzzanat, érzésváltozás vagy bármilyen szokatlan reakció jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék éjszakai használata csak orvosi javaslatra engedélyezett. • Az ortézis hosszú távú használata korlátozott aktív és passzív ízületi mozgást és izomsorvadást eredményezhet. Ezért ajánlott rendszeresen orvosi felügyelet mellett, szakképzett egészségügyi személyzet által kiválasztott gyakorlatokat végezni.
- A terméket a jelen kézikönyvben és a termék címkéjén található ajánlásoknak megfelelően tisztán tartani. A termék nem megfelelő tisztítása és karbantartása bőrkárosodáshoz vezethet.
- A terméket tilos használni, ha bármelyik alkatrész hiányzik. Két azonos vagy különböző termék egyszerre nem használható.

#### VII. ALKALMAZÁS

Ez a termék a következő esetekben használható:

- Enyhe vagy közepes ízületi instabilitás,
- Térdízületi gyulladás,
- Enyhe meniszkusz sérülések,
- Krónikus, műtét utáni és traumát követő gyulladás

#### VIII. ELLENJAVALLATOK

- A láb és a comb mélyvéna trombózisa,
- Lágyszöveti károsodások és sebgyógyulási problémák,
- Meglévő nyirokelvezetési problémák,
- A fűző túl szoros felhelyezése fokozott fájdalomhoz vezethet, míg a túl laza a kívánt hatás elmaradását eredményezi.
- Bőrkárosodás esetén azokon a területeken, ahol a fűző érintkezik, annak használata korlátozott, és csak orvosi felügyelet mellett lehetséges.
- A fűző használatát a kezelőorvosnak kell értékelnie különböző eredetű memóriazavarokban szenvedők, mentális zavarokkal küzdő személyek és gyermekek esetében.

#### IX. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A termék rendszeres mosását javasoljuk. Mosás előtt távolítsa el a termék fém részeit (ha lehetséges), és zárja be az összes tépőzárát.

- Kézzel mosható legfeljebb 40°C-on, semleges, antiallergén mosószerrel.
- Langyos vízben öblítse le, ne használjon öblítőt.
- Ne csavarja ki.
- Ne fehérítse.
- Ne vasalja.
- Ne vegytisztítsa.
- Ne szárítsa gépben.
- Szárítsa fektetve, árnyékos, jól szellőző helyen – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. A termék nem hőálló, és 120°C feletti hőmérsékleten elveszíti tulajdonságait.

## A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Gyártó                              |
|    | CE jelölés                          |
|    | Hivatkozási szám                    |
|    | Gyártás dátuma                      |
|    | Lásd a használati utasítást         |
|    | Figyelmeztetés                      |
|    | Sorozatszám                         |
|    | Állítsa függőlegesen, ne döntse fel |
|    | Száraz helyen tárolja               |
|    | Törékeny, óvatosan kezelje          |
|    | Ne vágja el                         |
|    | A csomagolás újrahasznosítható      |
|    | Kézzel mosható                      |
|    | Ne fehértse                         |
|    | Ne vasalja                          |
|   | Ne vegytisztítsa                    |
|  | Ne szárítsa szárítógépben           |



**REHA FUND Sp. z o.o.**  
 ul. Staniewicka 14, 03-310 Varsó, Lengyelország  
 tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07  
 e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.1  
 Kiadva:

**Garanciakártya**  
**RUGALMAS TÉRDSZÍNSTABILIZÁTOR ZSANÉROKKAL**  
**„GENUMAX PLUS” O-1210**

| Modell: | Sorozatszám: | Értékesítés dátuma: | Eladó aláírása és bélyegzője: |
|---------|--------------|---------------------|-------------------------------|
|         |              |                     |                               |

**Garanciális feltételek**

1. A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen garanciakártyával fedezett termék új és kiváló minőségű.
2. A termékre a jótállási kártyán feltüntetett értékesítés dátumától számított 18 hónapos jótállási időszak vonatkozik.
3. A garanciális igény elbírálásának alapja a helyesen kitöltött garanciakártya és a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása.
4. A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy a hivatalos szerviztechnikusok javítják, feltéve, hogy a terméket rendeltetésszerűen és a felhasználói kézikönyvben szereplő ajánlásoknak megfelelően használták.
5. A javításokat/cseréket a lehető leghamarabb, a berendezés szervizközpontba való beérkezésétől számított 14 napon belül elvégezzük.
6. A garancia nem terjed ki a következőkre:
  - a használati utasításban leírt karbantartási, tisztítási és övbeállítási tevékenységekre;
  - a normál használat során kopásnak kitett alkatrészeket;
  - az öv mechanikai és hőhatás okozta károsodásait, pl. törés, szakadás stb.
  - a használati utasításnak nem megfelelő használatból, gondatlanságból, független javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő sérülések.
7. Mielőtt a berendezést átadná a hivatalos szerviztechnikusoknak, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy szervizelésre alkalmas legyen.
8. A javításokat és cseréket a Reha Fund Sp. z o.o. hivatalos szerviztechnikusai végzik.
9. Indokolatlan panasz esetén a szállítási költségeket az ügyfél viseli.
10. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
11. Az eladott árukra vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel az ügyfélnek az áruk szerződésszegéséből eredő jogait.

**SZERVIZJAVÍTÁSOK LISTÁJA** (a szervizközpont kitöltendő)

| Sz | Értésítés dátuma | Rendelészám | A hiba leírása/a javítás terjedelme | Dátum a javítás | Szervizbélyegző és aláírás |
|----|------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. |                  |             |                                     |                 |                            |
| 2. |                  |             |                                     |                 |                            |