



FIGYELEM! A termék első használata előtt kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.


Vásárláskor kérjük, ellenőrizze a termék teljességét és minőségét. Bármilyen aggályát jelezze a termékforgalmazójának. Mennyiséggel/minőséggel kapcsolatos aggályok esetén kérjük, kövesse a jótállási jegyen található utasításokat, azaz mutassa be a vásárlást igazoló bizonylatot és a kereskedő által kitöltött jótállási jegyet.

I. TERMÉK LEÍRÁSA "GENUMAX" rugalmas térdtámasz rendkívül rugalmas, lélegző anyagból készült. A térdkalács körüli szilikon gyűrű további stabilizációt biztosít. Az oldalsó merevítők a középső és oldalsó szalagok megtámasztását biztosítják anélkül, hogy korlátoznák a térdízület mozgását.

II. JELLEMZŐK A kompressziós anyagnak és a szilikongyűrűnek köszönhetően az ortézis masszázshatást fejt ki és javítja a véráramlást, ami felgyorsítja az ödéma és a vérömlenyek felszívódását és csökkenti a fájdalmat.

III. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Győződjön meg arról, hogy a termék mérete megfelelő.
- Helyezze a rögzítőt közvetlenül a testre a lábfej fölé húzva.
- Győződjön meg róla, hogy a szilikongyűrű teljesen körülveszi a térdkalácsot, a merevítők pedig pontosan a térdízület oldalain helyezkednek el.

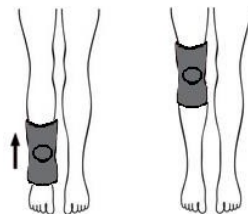

IV. MÉRETTÁBLÁZAT

Méret	Térdkerület a térdkalács magasságában
S	34-36 cm
M	36-38 cm
L	38-41 cm
XL	41-44 cm
XXL	44-47 cm

V. ÖSSZETÉTEL

Poliamid 55%,

Elasztán 45%

Szilikongyűrű: Szilikon 100%

VI. HASZNÁLATI SZABÁLYOK

- Ezt a terméket csak orvos utasítása szerint szabad használni.
- A rögzítő felhelyezésének módját szakképzett orvosi személyzetnek kell bemutatnia a felhasználót ellátó személy jelenlétében (ha van ilyen).
- A terméket és alkatrészeit csak a rendeltetészerűen szabad használni.
- Ha fájdalom, duzzanat, érzésváltozás vagy bármilyen szokatlan reakció jelentkezik a termék használata során, azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék használata Éjszakai használat csak akkor megengedett, ha orvosa azt javasolja.
- Az ortézis hosszú ideig tartó használata korlátozott aktív és passzív ízületi mozgást és izomsorvadást okozhat. Ezért ajánlott rendszeresen végezni a szakképzett egészségügyi személyzet által kiválasztott gyakorlatokat orvosa ajánlása alapján.

VII. ALKALMAZÁS

Ez a termék a következők esetén használható:

- Enyhe térdízületi instabilitás,
- Krónikus, poszttraumás gyulladás,
- Térdkalács porcszöveti gyulladás,
- Osteoarthritis és ízületi gyulladás,
- Meniszkusz sérülés,

VIII. ELLENJAVALLATOK

- A láb és a comb mélyvénás trombózisa,
- Lágyrész-hiányok és sebgyógyulási problémák,
- Meglévő nyirokelvezetési problémák,
- A fűző túl szoros felhelyezése fokozott fájdalomhoz vezethet, míg a túl laza a kívánt hatás elmaradását okozza.
- Bőrkárosodás esetén azokon a területeken, ahol a fűzőt viselik, a használata korlátozott, és csak orvosi felügyelet mellett végezhető.
- A fűző használatát a kezelőorvosnak kell felmérnie különböző eredetű memóriazavarokkal küzdő személyek, mentális zavarokkal küzdő személyek és gyermekek esetében.

IX. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A termék rendszeres mosása ajánlott. Mosás előtt távolítsa el a termék fém részeit (ha lehetséges), és zárja be az összes tépőzárát.

- Kézzel mosható legfeljebb 40°C-on, semleges, antiallergén mosószerrel.
- Langyos vízben öblítse le, ne használjon öblítőt.
- Ne csavarja ki.

- Ne fehéritse.
- Ne vasalja.
- Ne vegytisztítsa.
- Ne szárítsa gépben.
- Szárítsa fekvő helyzetben, árnyékos, jól szellőző helyen – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek.

A termék nem hőálló, és 120°C feletti hőmérsékleten elveszíti tulajdonságait.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Gyártó
	CE jelölés
	Hivatkozási szám
	Gyártás dátuma
	Lásd a használati utasítást
	Figyelmeztetés
	Sorozatszám
	Állítsa függőlegesen, ne döntse fel
	Száraz helyen tárolja
	Törékeny, óvatosan kezelje
	Ne vágja el
	A csomagolás újrahasznosítható
	Kézzel mosható
	Ne fehéritse
	Ne vasalja
	Ne vegytisztítsa
	Ne szárítsa szárítógépben



Garanciakártya
RUGALMAS TÉRDSZÍNSTABILIZÁTOR
„GENUMAX” O-1211

Modell:	Sorozatszám:	Értékesítés dátuma:	Eladó aláírása és bélyegzője:

Garanciális feltételek

1. A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen garanciakártyával fedezett termék új és kiváló minőségű.
2. A termékre a jótállási kártyán feltüntetett értékesítés dátumától számított 18 hónapos jótállási időszak vonatkozik.
3. A garanciális igény elbírálásának alapja a helyesen kitöltött garanciakártya és a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása.
4. A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy a hivatalos szerviztechnikusok javítják, feltéve, hogy a terméket rendeltetésszerűen és a felhasználói kézikönyvben szereplő ajánlásoknak megfelelően használták.
5. A javításokat/cseréket a lehető leghamarabb, a berendezés szervizközpontba való beérkezésétől számított 14 napon belül elvégezzük.
6. A garancia nem terjed ki a következőkre:
 - a használati utasításban leírt karbantartási, tisztítási és övbeállítási tevékenységeket;
 - a normál használat során kopásnak kitett alkatrészeket;
 - az öv mechanikai és hőhatás okozta károsodásait, pl. törés, szakadás stb.
 - a használati utasításnak nem megfelelő használatból, gondatlanságból, független javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő sérülések.
7. Mielőtt a berendezést átadná a hivatalos szerviztechnikusoknak, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy szervizelésre alkalmas legyen.
8. A javításokat és cseréket a Reha Fund Sp. z o.o. hivatalos szerviztechnikusai végzik.
9. Indokolatlan panasz esetén a szállítási költségeket az ügyfél viseli.
10. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
11. Az eladott árukra vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel az ügyfélnek az áruk szerződésszegéséből eredő jogait.

SZERVIZJAVÍTÁSOK LISTÁJA (a szervizközpont töltse ki)

Sz	Értékesítés dátuma	Rendelészám	A hiba leírása/a javítás terjedelme	Dátum a javítás	Szervizbélyegző és aláírás
1.					

2.					
----	--	--	--	--	--