

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LUMBOMAX O-1430 LUMBAR-SACRAL ÖV**

FIGYELEM! Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a terméket először használná.

A vásárláskor ellenőrizze a termék teljességét és minőségét. Bármilyen kifogást jelezze a terméket kiadó személynek. Mennyiségi/minőségi kifogások esetén kövesse a jótállási jegy utasításait, azaz mutassa be a vásárlást igazoló bizonylatot és a kereskedő által kitöltött jótállási jegyet.

I. TERMÉKLEÍRÁS

A „LUMBOMAX” lumbosacralis öv rugalmas, kompressziós tulajdonságú pamutszövetből készül, elülső részén tépőzáras rögzítéssel és hat acélmerevítővel, amelyek tehermentesítik és stabilizálják a gerincet.

A szövet csatornarendszerrel van ellátva, amely lehetővé teszi a bőr szabad légzését és a nedvesség elvezetését.

Magasság hátul: 26 cm

II. TULAJDONSÁGOK

Az öv stabilizálja a lumbosacralis gerincet és korlátozza a hajlítási és nyújtási mozgások tartományát.

Támogatja a lumbosacralis régió különböző diszfunkcióinak kezelését és rehabilitációs folyamatát, korlátozza a csigolyaközi ízületek mozgását és elősegíti a jótékony nyomáeloszlást az érintett területen.

Orvosi terápia kiegészítéseként alkalmazva megakadályozza a tünetek visszatérését. Javítja a mobilitást akut, szubakut és krónikus állapotokban.

**III. HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ**

- Győződjön meg arról, hogy a termék mérete megfelelően van kiválasztva.
- Helyezze az övet a derekára úgy, hogy a gerinc pontosan a hátulján található fémmerevítők között legyen.
- Rögzítse a tépőzárát a hasán.

IV. MÉRETTÁBLÁZAT

Méret	Derékbőség a köldök felett
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

V. ÖSSZETÉTEL

Pamut 40%, nejlón 30%, poliviskóz 15%, elasztán 15%

VI. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Ez a termék kizárólag orvos által ajánlott módon használható.
- Az ortézis felhelyezésének módját képzett egészségügyi személyzetnek kell bemutatnia a felhasználót gondozó személy jelenlétében (ha alkalmazható).
- A terméket és alkatrészeit kizárólag a rendeltetészerűen szabad használni.
- Az övet pamut alsóing felett kell felvenni és viselni, nem közvetlenül a testen.
- Az ortézis testhez tapadó felületének tisztának kell lennie – a termék viselése közben ne használjon gyógyászati kenőcsöket vagy krémeket, és közvetlenül a felhelyezés előtt se kenje be a bőrt kenőccsel vagy krémmel.
- A termék napi 8 óránál hosszabb használata nem ajánlott (kivéve, ha az orvos másképp javasolja).
- Az ortézis hosszabb ideig tartó használata izomsorvadáshoz vezethet, ezért ajánlott a kezelőorvos ajánlása alapján képzett egészségügyi személyzet által kiválasztott gyakorlatokat rendszeresen elvégezni.
- Étkezés vagy nagy mennyiségű folyadék fogyasztása előtt vegye le vagy lazítsa meg az ortézt.
- Tartsa tisztán a terméket a jelen kézikönyvben és a termékre rögzített címkén szereplő ajánlásoknak megfelelően. A termék nem megfelelő tisztítása és karbantartása bőrváltozásokhoz vezethet.
- A termék nem használható, ha bármely alkatrésze hiányzik. Két azonos vagy különböző termék nem használható egyszerre.

VII. HASZNÁLAT

A termék a következő esetekben használható:

- Konzervatív kezelés kiegészítéseként,
- Krónikus fájdalom degeneratív betegségek esetén,
- Az ortézis által lefedett gerincszakasz állandó vagy ideiglenes diszfunkcióinak utókezelése és rehabilitációja,
- Betegségek és sérülések után,
- Különböző etiológiájú akut vagy krónikus radicularis fájdalom szindrómák,
- A lumbosacralis gerinc passzív stabilizálásának támogatása

VIII. ELLENJAVALLATOK

- Az ortézis felhelyezésének helyén bőrváltozások esetén a használata korlátozott, és csak orvosi felügyelet mellett lehetséges.
- A termék nem ajánlott terhes nők vagy nemrég műtéten átesett személyek számára.
- Mivel az ortézis nyomást gyakorol a hasüregre, és közvetve a rekeszizomra és a tüdőre, használata rosszul tolerálható lehet gyomor-, bél-, máj- vagy epehólyagproblémákkal, légzési rendellenességekkel és csökkent légzési kapacitással küzdő személyek számára. Ilyen esetekben a termék használatáról konzultálni kell orvosával.
- Stressz-inkontinenciában szenvedő személyeknél és húgyúti fertőzések esetén a termék használata súlyosbíthatja a tüneteket. Ilyen esetekben a termék használatáról konzultálnia kell orvosával.
- Az ortézisek használatát a kezelőorvosnak kell értékelnie különböző eredetű memóriazavarokkal küzdő személyek, mentális zavarokkal küzdő személyek és gyermekek esetében.

IX. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A terméket rendszeresen ajánlott mosni. Mosás előtt távolítsa el a termék hátulján található acélrudakat, és rögzítse az ortézis összes tépőzáras rögzítőjét.

- Kézzel, legfeljebb 40 °C-os hőmérsékleten, semleges, hypoallergén mosószerrel mossa.
- Öblítse le langys vízzel, ne használjon öblítőszert.
- Ne csavarja ki.
- Ne fehérítse.
- Ne vasalja.
- Ne vegytisztítsa!
- Ne szárítsa szárítógépben.
- Száras, árnyékos és jól szellőző helyen szárítsa – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. A termék nem hőálló, és 120 °C feletti hőmérsékleten elveszíti tulajdonságait.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Gyártó
	CE jelölés
	Hivatkozási szám
	Gyártás dátuma
	Lásd a használati utasítást
	Figyelmeztetés
	Sorozatszám
	Állítsa függőlegesen, ne döntse fel
	Száraz helyen tárolja
	Törékeny, óvatosan kezelje
	Ne vágja el
	A csomagolás újrahasznosítható
	Kézzel mosható
	Ne fehéritse
	Ne vasalja
	Ne vegytisztítsa
	Ne szárítsa szárítógépben



REHA FUND Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 14, 03-310 Varsó, Lengyelország
 tel.: +48 22 594 03 00, fax: +48 22 594 03 07
 e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.1
 Kiadás:

**Garanciakártya LUMBAR-
SACRAL ÖV
„LUMBOMAX” O-1430**

Modell	Sorozatszám:	Értékesítés dátuma:	Eladó aláírása és bélyegzője:

Garanciális feltételek

1. A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen garanciakártyával fedezett termék új és kiváló minőségű.
2. A termékre a jótállási kártyán feltüntetett értékesítés dátumától számított 18 hónapos jótállási időszak vonatkozik.
3. A garanciális igény elbírálásának alapja a helyesen kitöltött garanciakártya és a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása.
4. A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy a hivatalos szerviztechnikusok javítják, feltéve, hogy a terméket rendeltetésszerűen és a felhasználói kézikönyvben szereplő ajánlásoknak megfelelően használták.
5. A javításokat/cseréket a lehető leghamarabb, a berendezés szervizközpontba való beérkezésétől számított 14 napon belül elvégezzük.
6. A garancia nem terjed ki a következőkre:
 - a használati utasításban leírt karbantartási, tisztítási és övbeállítási tevékenységekre;
 - a normál használat során kopásnak kitett alkatrészek;
 - a szíj mechanikai és hőhatás okozta károsodása, pl. törés, szakadás stb.;
 - a használati utasításnak nem megfelelő használatból, gondatlanságból, jogosulatlan javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő sérülések.
7. Mielőtt a berendezést átadná a hivatalos szerviztechnikusoknak, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy szervizelésre alkalmas legyen.
8. A javításokat és cseréket a Reha Fund Sp. z o.o. felhatalmazott szerviztechnikusai végzik.
9. Indokolatlan panasz esetén a szállítási költségeket az ügyfél viseli.
10. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
11. Az eladott árukra vonatkozó jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel az ügyfélnek az áruk szerződésszegéséből eredő jogait.

SZERVIZJAVÍTÁSOK LISTÁJA *(a szerviz részleg töltse ki)*

Sz.	Értésítés dátuma	Rendelési szám	A hiba leírása/a javítás terjedelme	Dátum a javítás	Szervizbélyegző és aláírás
1.					
2.					

MEGJEGYZÉSEK