

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
LUMBOMAX DISC DERÉKTÁMASZTÓ ÖV FESZÍTŐKKEL O-1433



FIGYELEM! A termék első használata előtt kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Vásárláskor kérjük, ellenőrizze a termék teljességét és minőségét. Bármilyen aggályát jelezze a termék forgalmazójának. Mennyiséggel/minőséggel kapcsolatos aggályok esetén kérjük, kövesse a jótállási jegyen található utasításokat, azaz mutassa be a vásárlást igazoló bizonylatot és a kereskedő által kitöltött jótállási jegyet.

I. TERMÉKLEÍRÁS

- A feszítő ökkel ellátott "Lumbomax Disc" deréktámasztó öv rendkívül rugalmas, lélegző és kompressziós kötött anyagból készült, tépőzárral rögzíthető, és négy merevítő övel rendelkezik, amelyek enyhítik a nyomást és stabilizálják az ágyéki gerincet. Ergonomikus műanyag támasztékkal van ellátva, amely erős támaszt nyújt az ágyéki gerincnek, valamint további feszítő övpántokkal.
- Háttámla magassága: 26 cm

II. JELLEMZŐK

Az öv stabilizálja az ágyéki- keresztcsonti gerincet, korlátozva a hajlító és nyújtó mozgások tartományát. Támogatja a különféle ágyéki- keresztcsonti diszfunkciók kezelési és rehabilitációs folyamatát azáltal, hogy korlátozza a csigolyaközi ízületek mozgását és hozzájárul a kedvező nyomáeloszláshoz az érintett területen. Gyógyászati terápiában támasztékként használva megakadályozza a tünetek kiújulását. Javítja a mobilitást akut, szubakut és krónikus állapotokban.

III.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Győződjön meg arról, hogy a termék mérete megfelelő.
- A főző felhelyezése előtt akassza ki a feszítő övpántokat, és hagyja őket lazán, amíg a mellő tépőzárhoz nem rögzülnek.
- Helyezze az övet a dereka köré úgy, hogy a gerince pontosan az öv hátsó részén található csontok között helyezkedjen el.
- Rögzítse a tépőzárakat hasán.
- Rögzítse a feszítő övpántokat a hasán a fő tépőzárhoz.



IV. MÉRETTÁBLÁZAT

Méret	Derekbőség közvetlenül a köldök felett
S	70-80cm
M	80-90cm
L	90-100cm
XL	100-110cm
XXL	110-120cm

V. ÖSSZETÉTEL

Poliamid 55%, Elastán 45%

VI. HASZNÁLATI SZABÁLYOK

- A terméket kizárólag orvos utasítása szerint szabad használni.
 - A rögzítő felhelyezésének módját szakképzett egészségügyi személyzetnek kell bemutatnia, a felhasználót ellátó személy jelenlétében (ha van ilyen).
- A terméket és alkotóelemeit csak rendeltetésszerűen szabad használni.
- Az övet pamut pólóra kell felhelyezni és viselni, nem közvetlenül a testen.
 - A rögzítő testhez rögzített bőrfelületének tisztának kell lennie – a termék viselése közben ne alkalmazzon gyógyhatású kenőcsöket vagy krémeket. Ne alkalmazzon borogatást közvetlenül a felhelyezés előtt.
- Nem ajánlott a termék napi 8 óránál hosszabb ideig történő használata (kivéve, ha orvos másképp rendel).
- Az ortézis hosszú távú használata izomsorvadáshoz vezethet, ezért ajánlott rendszeresen végezni a kezelőorvos tanácsára szakképzett egészségügyi személyzet által kiválasztott gyakorlatokat.

- Étkezés vagy nagy mennyiségű folyadék fogyasztása előtt vegye le vagy lazítsa meg az ortézist.
 - Tartsa tisztán a terméket a jelen kézikönyvben és a termék címkéjén található ajánlásoknak megfelelően. A termék nem megfelelő tisztítása és karbantatása bőrkárosodáshoz vezethet.
- Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrész hiányzik. Ne használjon két azonos vagy különböző terméket egyszerre.

VII. ALKALMAZÁS

A termék a következőkre használható:

- Konzervatív kezelés támogatása,
- Degeneratív betegségek krónikus fájdalma,
- Az ortézis által fedett gerincszakasz állandó vagy átmeneti diszfunkcióinak utókezelése és rehabilitációja,
- Betegségek, sérülések és sportsérülések után,
- Különböző etiológiájú akut vagy krónikus radikuláris fájdalom szindrómák,
- Az ágyéki- keresztcsonti gerinc passzív stabilizálásának támogatása.

VIII. ELLENJAVALLATOK

- Ha bőrkárosodások jelentkeznek az ortézis alkalmazási területein, annak használata korlátozott, és csak orvosi felügyelet mellett lehetséges.
 - A termék használata nem ajánlott terhes nők vagy műtét után közvetlenül egyének számára.
 - Az ortézis hasüregre, valamint közvetve a rekeszsizomra és a tüdőre gyakorolt kompressziós hatása miatt a használatát rosszul tolerálhatják a gyomor-, bél-, máj-, epehólyag-, légzési rendellenességekben szenvedők, valamint csökkent légzési kapacitással rendelkezők. Ilyen esetekben a termék használatát konzultálni kell orvosukkal.

- Stressz vizeletinkontinenciában és húgyúti fertőzésekben szenvedőknél a termék használata súlyosbíthatja ezeket a tüneteket. Ilyen esetekben a termék használatát konzultálni kell orvosukkal.

- Az ortézis használatát orvosnak kell megvizsgálnia különböző eredetű memóriazavarokban, mentális zavarokban szenvedőknél és gyermekeknél

IX. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A termék rendszeres mosását javasoljuk. Mosás előtt távolítsa el a merevítőket a termék hátuljáról, és zárja be az összes tépőzárát.

- Kézzel mosható legfeljebb 40°C-on, semleges, antiallergén mosószerrel.
- Langyos vízben öblítse le, ne használjon öblítőt.
- Ne csavarja ki.
- Ne fehéritse.
- Ne vasalja.
- Ne vegytisztítsa.
- Ne szárítsa gépben.
- Szárítsa kiterítve, árnyékos, jól szellőző helyen – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. A termék nem hőálló, és 120°C feletti hőmérsékleten elveszíti tulajdonságait.

JELMAGYARÁZAT

	Gyártó
	CE jelölés
	Referenciaszám
	Gyártási dátum
	Lásd a használati utasítást
	Figyelmeztetés
	Tételszám
	Felhajtva, ne fordítsa meg
	Száraz helyen tárolandó
	Kényes óvatosan kezelendő
	Ne vágja ki
	Újrahasználható csomagolás
	Kézzel mosható
	Ne fehérítse
	Ne vasalja
	Ne vegytisztítsa
	Ne szárítsa szárítógépben



REHA FUND Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
 tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
 e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.1
 Wydano:

GARANCIAJEGY
LUMBOMAX DISC DERÉKTÁMASZTÓ ÖV FESZÍTŐKKEL
"LUMBOMAX DISC" O-1433

Model:	Sorozatszám:	Eladás dátuma:	Eladó aláírása és bélyegzője:

GARANCIA FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

1. A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen garanciajegyben szereplő termék vadonatúj és kiváló minőségű.
2. A termékre a garanciajegyen feltüntetett eladási dátumtól számított 12 hónapos garancia vonatkozik.
3. A garanciális igényt csak akkor vesszük figyelembe, ha a vásárlást igazoló bizonylattal együtt megfelelően kitöltött garanciajegyet nyújtanak be.
4. A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy hivatalos szerviztechnikusai javítják ki, feltéve, hogy a terméket rendeltetésszerűen és a használati utasításnak megfelelően használták
5. A javítást/cserét a lehető leghamarabb, de legfeljebb 14 napon belül elvégezzük attól a dátumtól számítva, hogy a berendezést a szervizközpontba átvették.
6. A jótállás nem terjed ki:
 - a használati utasításban leírt karbantartással, tisztítással és szíjbeállítással kapcsolatos tevékenységekre;
 - a normál használat során kopásnak és elhasználódásnak kitett alkatrészekre;
 - a szíj mechanikai és hőkárosodására, pl. törés, szakadás stb.;
 - a berendezés használati utasítással ellentétes használatából, gondatlanságból, jogosulatlan javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő károkra.
7. Mielőtt a berendezést hivatalos szerviztechnikusoknak visszaküldené, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy alkalmas legyen a szervizvizsgálatra.
8. A javításokat és cseréket a Reha Fund Sp. z o.o. hivatalos szerviztechnikusainak kell elvégezniük.
9. Alaptalan reklamáció esetén a szállítási költségek a vevőt terhelik.
10. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
11. Az eladott árukra vonatkozó jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevő azon jogait, amelyek az áru szerződésnek való nem megfelelőségéből erednek.

SZERVÍZ JAVÍTÁSI LIST (szervizközpont tölti ki)

Szám	Értesítés dátuma	Rendelési szá m	Hiba leírása/Javítás terjedelme	Javítás dátuma	Szervízbélyegző és aláírás
1.					
2.					

Megjegyzés