

AZ O-1501 HÁLÓS FELSŐVÉGTAJÁRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

I. BEVEZETÉS

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Köszönjük, hogy a REHA FUND Sp. z o.o. termékét választotta, amely a lengyel piacon vezető szállítója az orvosi segédeszközöknek és rehabilitációs berendezéseknek.

A használati utasítás olyan irányelveket és javaslatokat tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a termék helyes használatához.

Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt a terméket használná.



A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatáért, a biztonságos használatra vonatkozó szabályok be nem tartásáért vagy a rendeltetéstől eltérő használatért.



II. JELLEMZŐK

MÉRETTÁBLÁZAT

Méret	Az alkar hossza az alkar hajlításánál mért hossza (a könyöktől a csuklóig)
S	18-24 cm
M	21-27 cm
L	28-33 cm
XL	34-40 cm

ÖSSZETÉTEL

100% poliészter

A hálós alsó végtag heveder tartós és lélegző hálós anyagból készült. Nyitott kialakításának és méretválasztékának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a testhez.

III. A TERMÉK CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSA

A hálós felső végtag heveder olyan betegek számára készült, akiknek támasztékra van szükségük: Gipsz rögzítéséhez, védelemként és tehermentesítésként a gipsz eltávolítása után.

A vállízület, az acromioclavicularis ízület, a könyökízület és a felső végtag parézisének részleges károsodása esetén.

A stabilizátor mind a jobb, mind a bal karon használható. A végtagot egy állítható vállpánt tartja, amely lehetővé teszi a végtag pontos pozicionálását a megfelelő magasságban. A széles támasztóöv biztosítja a testsúly egyenletes eloszlását a hát teljes hosszán.

IV. ELLENJAVALLATOK

A heveder rögzítési pontjainál fellépő bőrváltozások esetén a használata korlátozott, és csak orvosi felügyelet alatt lehetséges. Különböző eredetű memóriazavarokkal küzdő személyek, mentális zavarokkal küzdő személyek és gyermekek esetében a heveder használatához a kezelőorvos értékelése szükséges.

V. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

Ezt a terméket kizárólag orvos utasításai szerint szabad használni.

A heveder felhelyezésének módját képzett egészségügyi személyzetnek kell bemutatnia annak a személynek a jelenlétében, aki felelős a felhasználó gondozásáért (ha alkalmazható). A terméket és annak alkatrészeit csak a rendeltetésszerűen kell használni. A terméket közvetlenül a testre vagy a ruházatra kell helyezni.

A terméket a jelen kézikönyvben és a termékre rögzített címkén szereplő ajánlásoknak megfelelően tisztán kell tartani. A termék nem megfelelő tisztítása és karbantartása bőrváltozásokhoz vezethet.

A termékkel kapcsolatos bármely súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a beteg lakik.

VI. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Győződjön meg arról, hogy a termék mérete megfelelően van kiválasztva. Helyezze az ortézist a kezére, szükség esetén a hüvelykujját a speciális zsebbe helyezve. Vezesse át a pántot a kereten keresztül és rögzítse a hevedert a csatján. A pánt hosszát a beállítóval állítsa be.

VII. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A terméket rendszeresen ajánlott mosni. Mosás előtt rögzítse a merevítő összes tépőzáras csatlakozását.
- Kézzel mossa 30 °C-os hőmérsékletű vízben, semleges, hipoallergén mosószerrel.
 - Lukascos vízben öblítse ki, ne használjon öblítőszert.
 - Ne fehérítse.
 - Ne vasalja.
 - Ne vegytisztítsa.
 - Ne szárítsa szárítógépben.
 - Száras, árnyékos és jól szellőző helyen szárítsa meg – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek.

VIII. A HASZNÁLAT VÉGE

Ha a heveder ellenőrzése során bármilyen rendellenességet talál, kövesse a gyártó ajánlásait. Használat után a terméket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

IX. VÁRHATÓ ÉLETTARTAM

A heveder várható élettartama 5 év. Ez az időszak a termék használatának gyakoriságától és karbantartásától függően hosszabb vagy rövidebb lehet.

X. Garancia

A gyártó biztosítja a vevőt, hogy az eladott termék új és kiváló minőségű. A termékre garancia vonatkozik (a garancia részletes feltételei a gyártó weboldalán találhatók). A terméket a rendeltetésszerűen és a használati utasításban szereplő ajánlásoknak megfelelően kell használni.

XI. SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

	Gyártó		Felső rész, ne fordítsa meg
	CE jelölés		Védje a nedvességtől
	Katalógusszám		Törékeny, óvatosan kezelendő
	Gyártás dátuma		Ne vágja el
	Olvassa el a használati utasítást		Újrahasznosítás
	Figyelmeztetés		Kézzel mosható
	Tételkód		Ne fehérítse
	Orvosi eszköz		Ne vasaljon
	Egyedi termékazonosító kód		Ne vegytisztítsa
	Mennyiség		Ne szárítsa szárítógépben
	Modellszám		

