

## A KEVIN 821 ZUHANYSZÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

### I. BEVEZETÉS

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Köszönjük, hogy a REHA FUND Sp. z o.o. termékét választotta, amely a lengyel piacon vezető szállítója az orvosi segédeszközöknek és rehabilitációs berendezéseknek.

Ez a használati utasítás a termék megfelelő használatához elengedhetetlen irányelveket és javaslatokat tartalmaz.



**FIGYELEM!** A termék használata előtt olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatáért, a biztonsági szabályok be nem tartásáért vagy a rendeltetéstől eltérő használatért.



### II. JELLEMZŐK


Katalógusszám:	RF-821
Teljes szélesség:	50 cm
Ülés szélessége:	50 cm
Teljes magasság:	41–51 cm
Teljes hossz:	39 cm
Ülésmélység:	31 cm
Ülésmagasság:	39–49 cm
Maximális biztonságos terhelés:	110 kg
Súly:	1,9 kg

#### A FELHASZNÁLT ANYAGOK JEGYZÉKE

Váz	alumínium
Ülés	PE (polietilén)
Sapka	TPR (termoplasztikus gumi)
Zárógomb	acél

### SZÉK ALKATRÉSZEK

A és B. csavarok és alátétek  
 C. seat  
 D és E.  
 keret, csövek és sapka

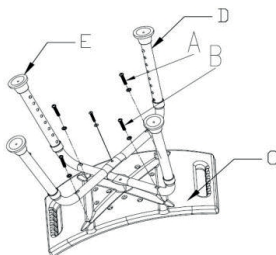

### III. RENDELTETÉS

A szék segítségével a mozgáskorlátozott és idős emberek is megőrizhetik napi személyes higiéniájukat, miközben jelentős mértékű függetlenségüket is megőrzik. Ennek az eszköznek köszönhetően jelentősen csökken a zuhanás vagy más, a zuhanyozás során előforduló sérülések kockázata.

### IV. ELLENJAVALLAT

Ellenjavallatok: állásképtelenség, az egyensúlyt megakadályozó alsó végtag sérülések, motoros koordinációs zavarok, vestibularis problémák, gerinc instabilitás. Értelmi fogyatékossgal élő személyek nem használhatják a terméket gondozó felügyelete nélkül.

## V. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

Biztonsági okokból kérjük, vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat: A zuhanyzószék használata előtt győződjön meg arról, hogy:

- az ülés magassága megfelelően van beállítva;
- a reteszelógombok megfelelően működnek;
- a gumidugók jó állapotban vannak;
- minden láb ugyanolyan magasságban van.

Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Nem eredeti alkatrészek használata a szék helytelen beállításához vezethet, ami esésveszélyt jelent.

Ne haladja meg a maximális megengedett terhelést a széknek. Ne tárolja  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  alatti hőmérsékleten. Használat előtt győződjön meg

arról, hogy a lábtartók csővei azonos magasságra vannak állítva. Ne próbálja meg víz, jég vagy olaj segítségével fel- vagy lefelémozgatni a széket. A széket sík felületen kell használni.

Minden használat előtt ellenőrizze a szék stabilitását és a csavarok szorosságát.

A készülékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a beteg lakik.

## VI. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### MAGASSÁGÁLLÍTÁS

- Nyomja meg a szék lábán található biztonsági gombot, és óvatosan forgassa el.
- Állítsa be a kívánt magasságot.
- Irányítsa a gombot a megfelelő lyukra, hogy a lábat a kívánt magasságban rögzítse.
- Ismételje meg a fenti lépéseket mindegyik lábon, ügyelve arra, hogy minden láb ugyanolyan magasságra legyen állítva.



**FIGYELEM!** Győződjön meg arról, hogy minden láb megfelelően van rögzítve és azonos magasságra van beállítva.

### ÖSSZESZERELÉS

- Készítse elő az összeszerelő készletet (1. ábra).
- Helyezze be a lábakat az ülés alól (2. ábra).
- Helyezze be a csavarokat a lyukakba, majd egyenletesen csavarozza be őket – minden csavart apránként csavarozzon be. Ha a csavarokat egymás után teljesen becsavarja, problémák adódhatnak az összeszerelés során (3. ábra).



1. ábra



2. ábra



3. ábra

A fenti fotók csak illusztrációs célt szolgálnak.

### LEÜLÉS ÉS FELÁLLÁS

- Győződjön meg arról, hogy a szék stabil és használatra kész.
- Álljon háttal a széknek úgy, hogy térd hátsó része érintse a szék elejét.
- Nyújtsd hátra a karjaidat, és tedd a kezedet az ülésre.
- Lassan üljön le a székre, hajlítsa be a könyökét, és ha lehetséges, a térdét és a csipőjét is.
- A székről való felálláshoz tegye a kezét az ülésre, és emelje fel magát.



**FIGYELEM!** A szék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

## VII. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a szék állapotát, nincs-e rajta sérülés vagy látható kopásnyom. Rendszeresen ellenőrizze, hogy:

- nincs-e repedés vagy hajlítás a vázon;
- a reteszelő gomb megfelelően rögzíti a beállított magasságot;
- a csőveken lévő lyukak nem tágultak vagy megnyúltak;
- az alsó kupakok nem kopottak – ha igen, azokat ki kell cserélni;
- a szék egyéb alkatrészei nem lazaak vagy sérültek. A szék rendszeres tisztítását puha ruhával és szappanos vízzel ajánljuk. A tisztítás után

száritsa meg puha ruhával. Használat előtt ellenőrizze a csavarok szorosságát és a szék stabilitását. A rendszeres tisztítás megakadályozza a csövek szennyeződését és biztosítja a szék megfelelő működését.



FIGYELEM! Ne használjon oldószereket, fehérítőt vagy súrolószereket a szék tisztításához.

## VIII. A HASZNÁLAT BEFEJEZÉSE

Ha a gyártó ajánlásainak megfelelően a szék ellenőrzése során bármilyen rendellenességet talál. Lásd a használati utasítás „Tisztítás és karbantartás” című részét – azonnal hagyja abba a termék használatát. Használat után

A terméket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

## IX. VÁRHATÓ ÉLETTARTAM

A szék várható élettartama nincs meghatározva. Ez az időtartam a termék használatának gyakoriságától és karbantartásától függően hosszabb vagy rövidebb lehet.

## X. Garancia

A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy az eladott termék teljesen új és kiváló minőségű.

A termékre garancia vonatkozik (a garancia részletes feltételei a gyártó weboldalán található). A terméket a rendeltetésszerűen és a használati utasításban szereplő ajánlásoknak megfelelően kell használni.

## XI. SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

	Gyártó		Figyelmeztetés
	CE jelölés		Tételkód
	Katalógusszám		Mennyiség
	Gyártás dátuma		Felső rész, ne fordítsa meg
	Lásd a használati utasítást		Védje a nedvességtől
	Orvosi eszköz		Törékeny, óvatosan kezelje
	Egyedi termékezonosító kód		



REHA FUND Sp. z o.o.  
ul. Staniewicka 14,  
03 – 310 Varsó,  
Lengyelország e-  
mail:info@rehafund.pl  
www.rehafund.pl



I/PL/RF-821/2/03.12.2024

A használati utasítás kiadásának dátuma: 12.2024 v.2

