

**A 2-IN-1 JOHN 823 FÜRDŐSZOBAI SZÉK
ÉS LÉPCSŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA
ORVOSI ESZKÖZ**

Katalógusszám	RF-823
Max. biztonságos terhelés	120 kg
Súly	1,5 kg
Ülés magasság-állítás	20,2–25,2 cm
Ülés szélessége	41,6 cm
Ülésmélység	22,6 cm
Lábak közötti távolság hosszirányban	47,8 cm
Lábak távolsága keresztirányban	31,6 cm
A lábak hosszanti dőlésszöge	107 fok
A lábak keresztirányú dőlésszöge	100 fok
Ülés színe	fehér

**FIGYELEM!**

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

RENDELTETÉSZET

A szék/lépcső lehetővé teszi a mozgáskorlátozott személyek számára, hogy megőrizzék napi személyes higiéniájukat, miközben jelentős mértékű függetlenségüket is megőrzik. Ez a berendezés jelentősen csökkenti a fürdőben előforduló esések vagy egyéb sérülések kockázatát. A szék/lépcső megkönnyíti a fürdő használatát, segíti a napi higiéniai teendőket és növeli a biztonságot. A szék/lépcső megkönnyíti a mozgáskorlátozott személyek számára a fürdőbe való be- és kiszállást. A kádban való fürdés során stabil támaszként is használható.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK


Biztonsági okokból kérjük, tartsa be az alábbi ajánlásokat:

1. A szék/lépcső használata előtt győződjön meg arról, hogy:
 - a ülés magassága megfelelően van beállítva,
 - a reteszelógombok megfelelően működnek,
 - a gumidugók jó állapotban vannak,
 - minden láb ugyanolyan magasságra van állítva.
2. Csak eredeti tartozékokat használjon. Nem eredeti alkatrészek használata esetén a szék/lépcső használhatatlanná válhat, ami esésveszélyt jelent.
3. Ne haladja meg a szék/lépcső maximális megengedett terhelését.
4. Ne tárolja 0 °C alatti hőmérsékleten.
5. A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a beteg lakik.

**FIGYELEM!**

A fenti biztonsági szabályok be nem tartása súlyos balesetekhez vezethet. **MAGASSÁGÁLLÍTÁS**

1. Nyomja meg a biztonsági gombot a szék/lépcső talpán, és forgassa el óvatosan, a képen látható módon.
2. Állítsa be a kívánt magasságot.

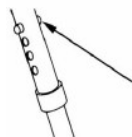

3. Irányítsa a gombot a megfelelő lyukra, hogy a láb a kívánt magasságban rögzüljön.
4. Ismétlje meg a fenti lépéseket mindegyik lábon, ügyelve arra, hogy minden láb ugyanolyan magasságra legyen állítva.



FIGYELEM!

Győződjön meg arról, hogy minden láb megfelelően van rögzítve és azonos magasságra van állítva.

LEÜLÉS ÉS FELÁLLÁS; BELÉPÉS ÉS KILÉPÉS A FÜRDŐBŐL

	Funkció: fürdőkád szék	Funkció: fürdőkád lépcső
1.	Győződjön meg arról, hogy a szék/lépcső stabil és használatra kész.	Győződjön meg arról, hogy a szék/lépcső stabil és használatra kész.
2.	Álljon háttal a székek/lépcsőnek úgy, hogy térde hátsó része érintse annak elejét.	Lépjön fel a székre/lépcsőre.
3.	Nyújtsa hátra a kezét, és tegye a tenyerét a székre.	Óvatosan emelje be az első lábát a kádba.
4.	Lassan üljön le a székre/lépcsőre, hajlítsa be a könyökét, és ha lehetséges, a térdét és a csípőjét is.	Óvatosan helyezze a másik lábát is a kádba.
5.	A székről való felálláshoz tegye a kezét az ülésre, és emelje fel magát.	A fürdőbe lépés funkcióhoz: Lépjön be a fürdőbe. A fürdőből való kilépés a fürdőbe lépés fordítottja. a fürdőbe lépés.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Ajánlatos rendszeresen ellenőrizni a szék/lépcső sérüléseit vagy látható kopásnyomokat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy:
 - nincs-e repedés vagy hajlítás a keretben,
 - a reteszelőgomb megfelelően rögzíti a beállított magasságot,
 - a csövek furatai nem nagyodtak meg vagy nyúltak meg,
 - az alsó kupakok nem kopottak – ha igen, azokat ki kell cserélni,
 - a szék/lépcső más részei nem lazaak vagy sérültek.
2. A szék/lépcső rendszeres tisztítását puha ruhával és szappanos vízzel ajánljuk. A tisztítás után a széket/lépcsőt puha ruhával szárítsa meg.



FIGYELEM!

Ne használjon oldószerkeket, fehérítőt vagy súrolószereket a szék/lépcső tisztításához. A TERMÉK



ALKATRÉSZEI



A fenti fotó csak illusztrációs célokat szolgál.

TELEPÍTÉS

1. Készítse elő az összes alkatrészt az összeszereléshez (1. ábra).
2. Csatlakoztassa az összes vázalkatrészt (2. ábra).
3. Csavarozza a keretet az üléshez (3. ábra).
4. Rögzítse a lábakat a kerethez (4. ábra).
5. Ellenőrizze, hogy a lépcső/szék megfelelően van-e összeszerelve (5. ábra).

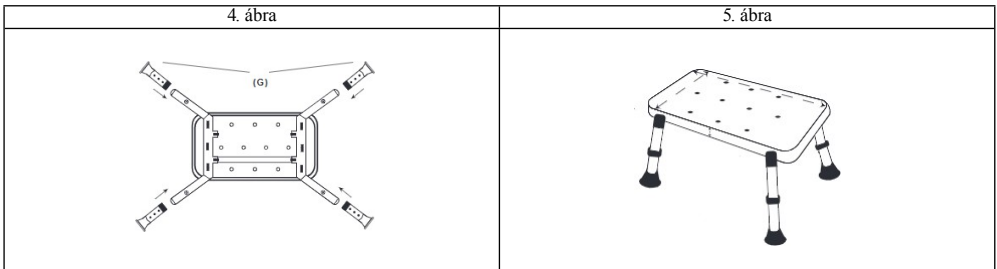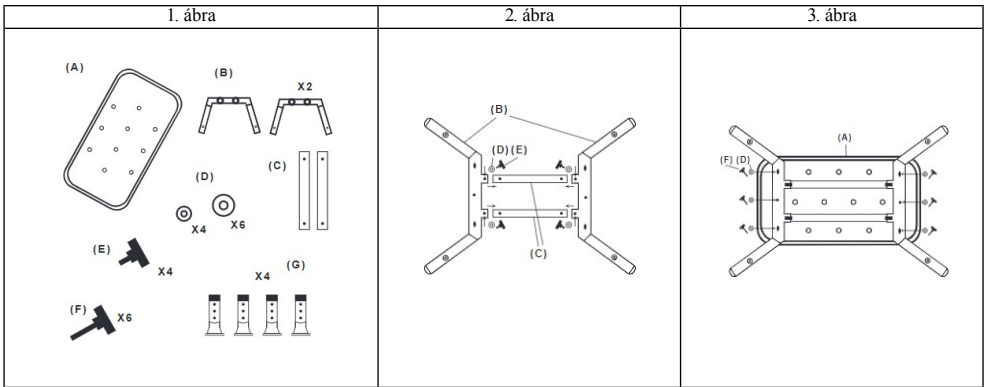

A FELHASZNÁLT ANYAGOK JEGYZÉKE

Váz	alumínium
Ülés	HD-PE (nagy sűrűségű polietilén)
Sapka	TPR (termoplasztikus gumi)

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Gyártó
	CE jelölés
	Hivatkozási szám
	Gyártás dátuma
	Lásd a használati utasítást
	Figyelmeztetés
	Sorozatszám
	Állítsa függőlegesen, ne döntse fel
	Száraz helyen tárolja
	Törékeny, óvatosan kezelje

**REHA FUND Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14, 03-310 Varsó, Lengyelország
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.3
Kiadás: 07/2022

**Garanciakártya
2-IN-1 FÜRDŐSZOBAI SZÉK ÉS LÉPCSŐ JOHN 823**

Modell:	Sorozatszám:	Értékesítés dátuma:	Eladó aláírása és bélyegzője:

Garanciális feltételek

1. A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen garanciakártyával fedezett termék új és kiváló minőségű.
2. A székre/lépcsőre a jótállási kártyán feltüntetett értékesítés dátumától számított 24 hónapos jótállási időszak vonatkozik.
3. A garanciális igény elbírálásának alapja a helyesen kitöltött garanciakártya és a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása.
4. A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy a hivatalos szerviztechnikusok javítják, feltéve, hogy a szék/lépcső a rendeltetésszerűen és a használati utasításban szereplő ajánlásoknak megfelelően került használatra.
5. A javítást a lehető leghamarabb, a berendezés szervizközpontba való beérkezésétől számított 14 napon belül elvégezzük.
6. A garancia nem terjed ki a következőkre:
 - a használati utasításban leírt karbantartási, tisztítási és beállítási tevékenységekre;
 - a normál használat során kopásnak kitett alkatrészeket;
 - mechanikai és hőhatás okozta sérülések, pl. hajlítás, karcolások, törés stb.
 - a berendezés használati utasításnak nem megfelelő használatából, gondatlanságból, jogosulatlan javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő károk.
7. A berendezést a szervizelés előtt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy szervizelésre alkalmas legyen.
8. A javításokat és az alkatrészek cseréjét a Reha Fund Sp. z o.o. felhatalmazott szerviztechnikusai végzik.
9. Indokolatlan panasz esetén a szállítási költségeket az ügyfélnek kell viselnie.
10. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
11. Az eladott árukra vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel az ügyfélnek az áruk szerződésszegéséből eredő jogait.

SZERVIZJAVÍTÁSOK LISTÁJA (a szervizközpont kitéltendő)

Sz	Értésítés dátuma	Rendelési szám	A hiba leírása/javítás terjedelme	A javítás időpontja a javítás	Szervizbélyegző és aláírás
1.					