

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ÁGYFEJ 950 ORVOSI ESZKÖZ**

Katalógusszám:	RF-950
Max. biztonságos terhelés:	75 kg
Szögbeállítás:	40°-80
Méretek:	hosszúság 47 cm, szélesség 63 cm
Súly:	2,64 kg

**FIGYELEM!**

A fejtámla használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

RENDELTETÉSE

Az ágy fejlapja olyan személyek számára készült, akik fekvő helyzetben magasabb törzspozícióra szorulnak.

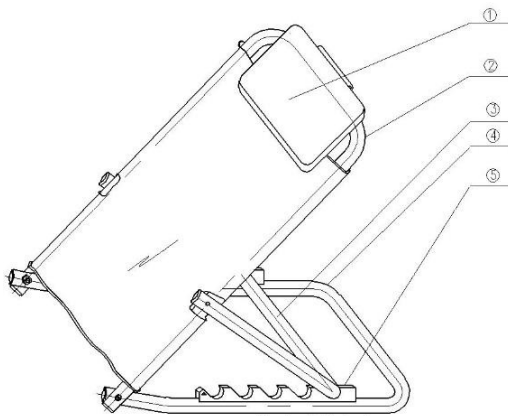
BIZTONSÁG

Biztonsági okokból kérjük, tartsa be az alábbi ajánlásokat:

1. A fejtámla használata előtt győződjön meg arról, hogy a beállított helyzetben megfelelően rögzült-e.
2. Csak eredeti tartozékokat használjon. Nem eredeti alkatrészek használata a berendezés meghibásodásához vezethet.
3. Ne haladja meg a fejtámla maximális megengedett terhelését.
4. Ne tárolja a fejtámlát 0 °C alatti hőmérsékleten.
5. A dőlésszög beállításakor ne használja a háttámlát.
6. Használat és beállítás közben ügyeljen arra, hogy keze ne szoruljon be.
7. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok nem lazultak-e meg.
8. A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a beteg lakik.



FIGYELEM! A fenti biztonsági utasítások be nem tartása súlyos balesetekhez vezethet. FEJTÁMASZ

ALKATRÉSZEK

1. Fejtámla.
2. Fejtámla beállító cső.
3. Fejtámla állító konzol.
4. Alsó cső.
5. Beállító bilincs.

SZÖGÁLLÍTÁS

1. Emelje fel kézzel a fejtámla állító konzolját.
2. Vegye ki a csövet a rögzítőbilincs rögzítőnyílásából.
3. Helyezze a konzolt a kiválasztott dőlésszögnek megfelelő rögzítőfuratba.
4. Ellenőrizze, hogy a fejtámla biztonságosan rögzült-e a beállított helyzetben.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a fejtámlát, hogy nincs-e rajta sérülés vagy látható kopásnyom.
- A fejtámlát ajánlott rendszeresen puha ruhával és szappanos vízzel tisztítani. A tisztítás után puha ruhával törölje szárazra, és hagyja a szövetet a levegőn megszáradni.



FIGYELEM!

Ne használjon oldószereket, fehérítőt vagy súrolószereket a fejtámla tisztításához.



FIGYELEM!

Ha kétségei vannak a berendezés használhatóságát illetően, vegye fel a kapcsolatot a gyártó szerviz részlegével. A

FELHASZNÁLT ANYAGOK JEGYZÉKE

Agylej	nejlon
Fejlap állítócső	acél
Fejtámla állító konzol	acél
Alsó cső	acél
Beállító bilincs	műanyag

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Gyártó
	CE jelölés
	Hivatkozási szám
	Gyártás dátuma
	Lásd a használati utasítást
	Figyelmeztetés
	Sorozatszám
	Fejjel lefelé, ne fordítsa meg
	Száraz helyen tárolja
	Törékeny, óvatosan kezelje



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Varsó, Lengyelország
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.3
Közzététel: 02/2021

Garanciakártya az 950-es ágyfejhez

Modell	Sorozatszám:	Értékesítés dátuma:	Eladó aláírása és bélyegzője:

Garanciális feltételek

1. A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen garanciakártyával fedezett termék új és kiváló minőségű.
2. A fejtámla 24 hónapos garanciával rendelkezik a garanciakártyán feltüntetett értékesítés dátumától számítva.
3. A jótállási igény elbírálásának alapja a helyesen kitöltött jótállási kártya és a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása.
4. A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy a hivatalos szerviztechnikusok javítják, feltéve, hogy a kerekesszéket rendeltetésszerűen és a használati utasításban szereplő ajánlásoknak megfelelően használták.
5. A javítást a lehető leghamarabb, a berendezés szervizközpontba való beérkezésétől számított 14 napon belül elvégezzük.
6. A garancia nem terjed ki a következőkre:
 - a használati utasításban leírt karbantartási, tisztítási és beállítási tevékenységeket;
 - a normál használat során kopásnak kitett alkatrészeket, pl. gumi alkatrészek, rugók, műanyag burkolatok, kárpitok stb.
 - mechanikai és hőhatás okozta sérülések, pl. hajlítások, karcolások, törések stb.
 - a használati utasításnak nem megfelelő használatból, gondatlanságból, saját kezű javításból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő sérülések
7. Mielőtt a berendezést átadná a hivatalos szerviztechnikusoknak, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy szervizelésre alkalmas legyen.
8. A javításokat és az alkatrészek cseréjét a Reha Fund Sp. z o.o. hivatalos szerviztechnikusai végzik.
9. Indokolatlan panasz esetén a szállítási költségeket az ügyfél viseli.
10. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
11. Az eladott árukra vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel az ügyfélnek az áruk szerződésszegéséből eredő jogait.

SZERVIZJAVÍTÁSOK LISTÁJA *(a szervizközpont kitöltendő)*

Sz	Értésítés dátuma	Rendelés száma	A hiba leírása/a javítás terjedelme	Dátum a javítás	Szervizbélyegző és aláírás
1.					
2.					

MEGJEGYZÉSEK