

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RF-CP1 RehaComfortPro felfekvésgátló matrac

I. BEVEZETÉS

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Köszönjük, hogy a REHA FUND Sp. z o.o. termékét választották, amely a lengyel piacon vezető szállítója az orvosi eszközöknek és rehabilitációs berendezéseknek.

A jelen használati utasítás olyan tippeket és javaslatokat tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a termék megfelelő használatához.

A kézikönyvben szereplő fotók csak illusztrációs célt szolgálnak!



FIGYELEM! A termék használata előtt olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatáért, a biztonsági szabályok be nem tartásáért vagy a rendeltetéstől eltérő használatért.

II. JELLEMZŐK

A matrac nem mérgező poliuretán habból készül. A matrac a következő méretekben kapható: 200 x 90 x 7 cm; 200 x 90 x 10 cm; 200 x 90 x 12 cm és 200 x 90 x 15 cm (méret tűrés +/-10 mm) és a következő huzatokkal kapható: pamut-poliészter (REF-15/P/B); rugalmas vízálló (REF-15/EN), pamut-rugalmas vízálló (REF-15/P/BEN) és vízálló (REF-15/P/N).

III. RENDELTEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA

Hullámos profilú felfekvésgátló matrac, amely az első fokú felfekvések kialakulásának megelőzésére szolgál.

Önálló matracként is használható.

Jó légáramlást biztosít, ami szárazon tartja a beteg bőrét és csökkenti az izzadást. A profil egyes szegmensei egymástól függetlenül működnek, csökkentve a felület nyomását a beteg testén és megfelelően pozicionálva azt. Egyedülálló szerkezetének köszönhetően a waffle matrac egyenletesen osztja el a test súlyát, ami hatékonyan minimalizálja a felfekvések kockázatát, támogatja azok kezelését, valamint javítja a vérkeringést. Enyhíti a hátfájást. Fémvázaz és fa/fém lécezett ágyakhoz ajánlott.

IV. ELLENJAVALLATOK

Ne használja a nedves terméket közvetlenül a bőrön. Ne használja allergiás bőrreakciók esetén.

Ne használja, ha a termék mechanikusan sérült (pl. lyukas, szakadt). Ne használja a rendeltetésétől eltérő célra.

V. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Használat előtt konzultáljon egészségügyi szakemberrel a használat megfelelőségéről, a termék kiválasztásáról és a használat módjáról. Az első használat előtt mossa ki a huzatot.

A termékeket a megfelelően kell kiválasztani a testméretnek megfelelően. Ne tegye ki a terméket nyílt lángnak vagy más tűzforrásnak, amely gyulladást okozhat. A nyílt lángnak kitett hab gyorsan meggyullad.

Ne tegye ki a terméket hosszan tartó alacsony hőmérsékletnek (5 °C alatt). A termék csomagolása nem játék.

A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a beteg lakik.

Ne tegye ki a terméket hosszabb ideig közvetlen napfénynek, mert a napfény hatására elszíneződhet. A hab elszíneződése nem befolyásolja a termék fizikai és mechanikai tulajdonságait.

VI. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Vegye ki a matracot a csomagolásából
2. Helyezze a matracot egy stabil ágyra vagy keretre, hogy ne mozdulhasson el.
3. A szállítás után a terméknek 24 órára van szüksége, hogy visszanyerje teljes funkcionális tulajdonságait. A matracot alkotó hab szállítás közben átmeneti deformációt szenvedhet.
4. Az ágyfekély elleni matracon mindig használjon lepedőt vagy huzatot, amelyet könnyen eltávolíthat és moshat a higiénia fenntartása érdekében.

VII. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítsa meg a habot egy meleg vízbe és mosószerbe mártott puha ruhával. A tisztítás után alaposan szárítsa meg. Ne áztassa a teljes habot vízben. Saját biztonsága érdekében rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát.

Matracvédő huzatok ápolása	15/P/EN						
	15/P/B						
	15/P/N						
	15/P/BEN						

VIII. A HASZNÁLAT VÉGE

Ha a gyártó ajánlásainak megfelelően végzett termékellenőrzés során bármilyen rendellenességet talál. Lásd a használati utasítás „Tisztítás és karbantartás” című szakaszát – azonnal hagyja abba a termék használatát. Használat után a terméket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

IX. VÁRHATÓ ÉLETTARTAM

A matrac várható élettartama 2 év. Ez az időszak a termék használatának gyakoriságától és karbantartásától függően hosszabb vagy rövidebb lehet.

X. Garancia

A gyártó biztosítja a vásárlót arról, hogy az eladott termék teljesen új és kiváló minőségű. A termékre garancia vonatkozik (a garancia részletes feltételei a gyártó weboldalán található). A terméket a rendeltetészerűen és a felhasználói kézikönyvben szereplő ajánlásoknak megfelelően kell használni.

XI. SZIMBÓLUMOK JEGYZÉKE

	Gyártó		Napfénytől távol tartandó
	CE jelölés		Minimálisan megengedett hőmérséklet
	Katalógusszám		Max. 60 °C-on mosható
	Modellszám		Maximális 90 °C-on mosható.
	Gyártás dátuma		Maximális hőmérsékleten, 95 °C-on mosható
	Lásd a használati utasítást		Oldószerek használata nélkül vegytisztítsa.
	Orvosi eszköz		Maximális hőmérséklete 150 °C.
	Egyedi termékazonosító kód		Ne vasalja
	Figyelmeztetés		70 °C-on szárításnak ellenálló
	Tételkód		Ne vegytisztítsa
	Mennyiség		Ne fehértse
	Tartsa tisztán		Szárazon, laposan szárítsa
	Védje a nedvességtől		<u>Ne szárítsa szárítógépben</u>
	Ne használja, ha a csomagolás sérült		Normál hőmérsékleten szárítógépben szárítható.