

# Összeszerelési és kezelési útmutató

Teleszkópos rámpa, mobil, párban

Art.-Nr. 34 100



**sundo**  
HOMECARE

## Teleszkópos rámpa, mobil


### Rendeltetés szerű használat:

Ez a mobil teleszkópos rámpa magánhasználatra készült. Alumíniumból készült, ezért bel- és kültéren egyaránt használható. A mobil rámpa a magasságkülönbségek leküzdésére szolgál kerekesszékekkel vagy sétálóval. A praktikus méretre (kb. 97 cm) összenyomva könnyen szállítható vagy a mellékelt hordtáskában hordozható.

### Összeszerelés/használat:

A mobil rámpa össze- és szétszerelése szerszám nélkül történik. Összecsukott állapotban szállítjuk.

- ▶ A rámpa széthúzásához nyomja be a nyomógombokat, ① és két egymást követő lépésben húzza szét a rámpát, amíg a gomb a helyére nem kattann.
- ▶ Ezután helyezze a rámpát az akadály fölé, és ellenőrizze, hogy a rámpa rögzített-e (lásd a biztonsági utasításokat).
- ▶ Figyelem, mindkét rámpát egyforma hosszúságúra kell kihúzni!
- ▶ Használat után távolítsa el a rámpát.
- ▶ Az összecsukáshoz először meg kell nyomni a ① gombot, majd a rámpa ismét összenyomható.

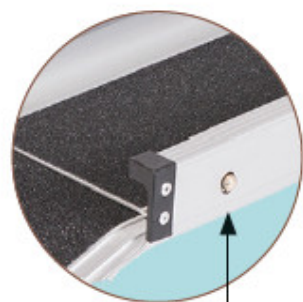

① NYOMÓGOMB

### Műszaki adatok:

Cikkszám 34 100 / Mobil teleszkópos rámpa, pár			
Anyag:	alumínium csúszásgátló bevonattal	Nyomtáv:	kb. 10 cm, oldalvédő 4 – 4,5 cm
Szín:	alumínium/fekete	Súly:	3,6 kg / darab, 7,2 kg-os pár
Hossza összecsukott állapotban:	kb. 97 cm	Max. teherbírás:	90 kg/db, 180 kg/pár
Bővíthető:	156 cm (maximális magasságkülönbség 30 cm) ill 210 cm (maximális magasságkülönbség 42 cm)	Élettartam:	kb. 10 év


### Tisztítás:

- ▶ Szükség esetén a mobil rámpa seprűvel vagy törlőkendővel tisztítható, szükség esetén háztartási szabványos alumínium és műanyag tisztítószerrel.
- ▶ A kereskedelemben kapható, klórmentes fertőtlenítőszerrel fertőtleníthető.

► Fontos: Fertőtlenítőszer használatakor a gyártó alkalmazási előírásait be kell tartani!

Biztonsági utasítások:

- Figyelem, a rámpa széthúzásakor és összenyomásakor fennáll a becsípődés/zúzás veszélye!
- Minden használat előtt ellenőrizze a rámpa sérülését, hibás rámpát tilos használni!
- A rámpák megengedett teherbírása 180 kg/pár, kérjük, ne lépje túl ezt a teljes terhelést kerekesszékekkel és kísérővel együtt, és a rámpát csak egyenletesen terhelje!
- Győződjön meg arról, hogy a rámpák szilárd, lapos érintkezési felületen fekszenek, és szárazak, illetve jégtől, hótól, kövektől, homoktól stb.
- Biztonsági okokból a rámpákat csak kísérővel együtt szabad használni.
- Haladjon gyorsan a rámpán, és ne hagyja a járművet a rámpán, leesésveszély! Használat után azonnal távolítsa el a rámpát a közterületeken!

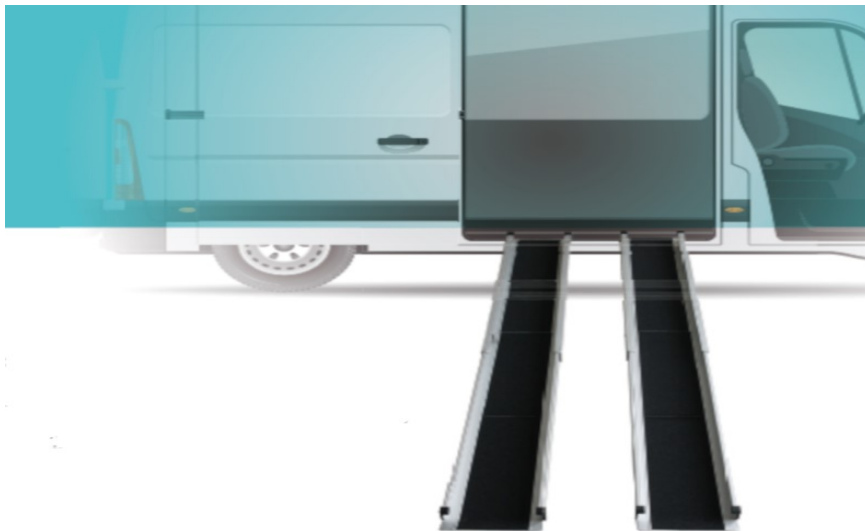

#### **Garancia:**

A jogi garanciális igények szerint. Kizárva a garanciából: Nem rendeltetésszerű használatból, normál kopásból eredő sérülések, valamint olyan hibák, amelyek a készülék értékére vagy üzemképességére csak jelentéktelen hatással vannak.

A műszaki változtatások és tartozékok, valamint a nem megfelelő karbantartás érvényteleníti a garanciát és általános termékfelelősséget.

Fenntartjuk a jogot a műszaki fejlesztés érdekében történő változtatásokra.

Rev. 06 / 18



Sundo Homecare GmbH | DE-30916 Isernhagen  
[www.sundo-homecare.de](http://www.sundo-homecare.de)



Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft 2000 Szentendre, Kőzúzó út 1.. 26-309223