

"Exclusiv" állítható magasságú szoba WC szivacsos kék 130 kg SD 14 202

Használati utasítás



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és őrizze meg későbbi kérdések esetére.

I. Biztonsági jelzések

Mindig konzultáljon orvosával vagy szállítójával a készülék megfelelő beállításának és használatának meghatározása érdekében.

Ne tárolja és ne hagyja a napon (Vigyázat: magas külső hőmérséklet esetén ne hagyja a terméket autóban!!)

Ne használja szélsőséges hőmérsékleten (38°C vagy 100°F felett vagy 0°C vagy 32°F alatt)

Ülés előtt győződjön meg arról, hogy az üléstányért megfelelően helyezte a székre.

Gondosan ellenőrizze ennek az elemnek az összes alkatrészét (csavarok, csövek, hegyek, fogantyúk)

Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva.

Csak a megfelelő módon használja a komód széket: **ne álljon fel a székre.**

Mindig tartsa be a termék címkéjén feltüntetett súlyhatárt.

Ezen az eszközön semmilyen módosítást nem szabad végrehajtani. A törött vagy hibás cseréhez csak eredeti alkatrészeket használjon, és ezt bízza a műszaki személyzetre.

A szék széthajtása vagy összeszerelése után használat előtt győződjön meg arról, hogy az biztonságosan reteszelt NYITVA helyzetbe, és a talajhoz igazodik. Néhány szék már fel van szerelve.

Ne akasszon semmit a székre.

Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a szék és a tartozékok megfelelően és biztonságosan rögzítve vannak-e.

Ha hosszabb ideig nem használta a széket, használat előtt hagyja, hogy a műszaki személyzet megvizsgálja.

Ne tárolja a szabadban, a széket otthon kell használni.

Ne szerelje fel vagy távolítsa el a serpenyőt, amíg a beteg a széken ül! (Az elsődleges nemi szervek sérülésének magas kockázata)

Legyen óvatos a kartámaszok eltávolításakor, nehogy becsípje ujjait.

Használat előtt ellenőrizze a széket, kétség esetén kérdezze meg orvosát vagy szolgáltatóját.

Csak sima és szilárd talajon használja a szoba wc-t.

A karfára ülni tilos.

Ne dőljön ki a székből, nehogy elveszítse egyensúlyát.

Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg letelepedett.

II. Indikáció és ellenjavallat

A komódszékek használhatók otthon vagy idősek otthonában, hogy segítsenek azoknak a személyeknek, akik nehezen jutnak el a fürdőszobába azáltal, hogy beviszik a WC-t a hálósobába. Szabványos, összecusukható vagy görgős, csak beltérben használhatók.

Jelzés:

Otthoni használatra használják, ha a beteg túlságosan legyengült ahhoz, hogy elérje a fürdőszobát.

Ellenjavallat:

Ne használja a komód széket a következő esetekben:

- Kognitív zavar - Egyensúlyvesztés - Ülészavar

III. Telepítés

Csak szakemberek állíthatják be a terméket és tanítják meg a használatára. Kérdezze meg a műszaki személyzetet a termék használatáról, és győződjön meg arról, hogy világosan megértette a magyarázatukat. Kétség esetén ne habozzon újra kérdezni.

A vödör felszerelése

A vödör felszerelésének/eltávolításának 2 különböző módja van:

1 - balról vagy jobbról az ülés alatt helyezze be a serpenyőt a fém tartóba (egyetlen lehetőség XXI modelleknél)

2 - emelje fel az üléslemez, és vegye le a vödröt a tetejéről

Szállítás előtt zárja le a vödröt a fedéllel.

Az üléslemez felszerelése

Az üléslemez könnyen eltávolítható tisztításhoz vagy cseréhez, mivel csak 2 kapocs segítségével csatlakozik a kerethez.

Az üléslemez eltávolításához emelje ki a kapcsokat a keretből

Az üléslemez felszereléséhez rögzítse a két kapcsot a fémkeret hátsó csövére

A lyukra helyezve a burkolatot, a komód szék normál székként is használható.

3. Tisztítás

A széket rendszeresen és minden használat után tisztítani kell enyhe tisztítószerrel és puha ruhával.

4. Anyagok

A termék epoxi festéssel bevont stiel csőből áll. A kárpitok PVC-ből készültek. a széket serpenyővel szállítjuk. Néhány modell. lengő kartámaszokkal vannak felszerelve.

5. Ártalmatlanítás

A terméket a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

6. Műszaki előírások

Ez a termék biológiailag kompatibilis

"Exclusiv" állítható magasságú szoba WC szivacsos kék 130 kg 14 202

A teljes magassága állítható: 82,5/97 cm

Ülésszélessége: 55 cm

Az ülőfelülettől a földre számolt magasság: 46/62 cm

Ülés és takaró lemez

Komplett vödörrel és párnázott üléssel

A takaró lemezek színe: kék

A vödör felülről eltávolítható

Ülésmélység: 42 cm

Súly: 6,8 kg

Max teherbírás: 130 kg



Sundo Homecare GmbH
Bahnhofstraße 13 | DE-30916 Isernhagen | www.sundo-homecare.de



Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft 2000 Szentendre, Kőzúzó köz 2. 26-309223