

Harisnya felhúzó fix nyéllal

Használati utasítás

SD 25 060

- Zoknifogó fogantyúval
- Kényelmesebb zokni és harisnya felvétele
- Anyag: műanyag
- Héj szélessége: kb. 10 cm
- Teljes hossza: kb. 68 cm

Rendeltetésszerű használat

A zoknifogó a harisnya és zokni kényelmesebb felvételére szolgál.

Használat:

- ▶ Húzza fel a harisnyát/zoknit a lábujjig. Most húzza a harisnyát a harisnyahúzó fölé, amíg el nem éri az elülső és hátsó bevágást.
- ▶ Helyezze az előkészített harisnyahúzót a padlóra maga elé, és üljön le. Tartsa a fogantyút a kezében.
- ▶ Helyezze a lábát a harisnyahúzóba, és csúsztassa a lábujjait a harisnya tetejébe.
- ▶ Miközben a lábujjak a harisnya tetején vannak, lassan egyenesítse ki a lábát, és egyidejűleg húzza felfelé a harisnyát a fogantyúnál fogva, amíg meg nem tudja fogni.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a harisnya ne gyűrődjön, és ne húzódjon tovább.

Tisztítás / Fertőtlenítés:

A zoknifogó nedves ruhával és kereskedelmi forgalomban kapható enyhe mosószerekkel tisztítható. A harisnyahúzó fertőtleníthető kereskedelmi forgalomban kapható, klórmentes fertőtlenítőszerszel.

Fontos: Fertőtlenítőszerek használata esetén a gyártó használati utasítását be kell tartani.

Biztonsági utasítások

Kérjük, első és minden használat előtt vizuálisan ellenőrizze a termék sértetlenségét. Sérülés vagy kopás jelei esetén a harisnyahúzót (tovább) tilos használni.

A harisnyahúzót csak ülés közben szabad használni, különben fennáll az esés veszélye!

A harisnya károsodásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a körmök repedésmentesek, és távolítsa el minden ékszert, különösen a gyűrűket.

A harisnyahúzó csak ép, sértetlen bőrrel érintkezhet, és nem alkalmas keresztbe tett betegeken való használatra.

Garancia:

A törvényes jótállási igényeknek megfelelően. A jótállásból kizárva: a nem rendeltetésszerű használatból, a normál kopásból és fogyasztásból eredő károk, valamint az olyan hibák, amelyek csak elhanyagolható hatással vannak a készülék értékére vagy használatra való alkalmasságára. A műszaki módosítások és tartozékok, valamint a nem megfelelő karbantartási munkák a jótállás és az általános termékszavatosság megszűnéséhez vezetnek.

Fenntartjuk a jogot a műszaki fejlesztési célú változtatásokra.

WS426-0225



Sundo Homecare GmbH | Bahnhofstraße 13 | DE-30916 Isernhagen
Internet: <https://www.sundo-homecare.de>



Produkt und Verpackung sind gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen zu entsorgen | Product and packaging must be disposed of in accordance with local regulations

