



MOBIAS[®]

MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: Színes Összecsukható alumíniumbotok



REF: **0809257**
0809258
0809259
0809260
0809261

LEÍRÁS – TERMÉK HASZNÁLATA

A botot az emberek járáshoz használhatják. Nagyon könnyen összeállítható, miután összekapcsolta a 4 részét.

Maximális felhasználói súly: 100 kg. Fa nyéllel rendelkezik.

Magassága állítható (5 szinttel rendelkezik).

Magasságtartomány: 81 cm – 92 cm.

Kockás mintázatú.

Műanyag tároló dobozzal rendelkezik. A váz

anyaga: alumínium

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Rendszeresen tisztítsa meg a botot.
- Ne hagyja a botot nedvesen.
- Ne használjon nem engedélyezett alkatrészeket – pótalkatrészeket, amelyek eltérnek a MOBIAK A.E. által jóváhagyottaktól.
- Soha ne haladja meg a bot maximális megengedett súlyát (100 kg).

TISZTÍTÁS

- Használjon hideg vizet és enyhe tisztítószeret a bot tisztításához.
- Mindig puha ruhával szárítsa meg.
- A foltokat és olajfoltokat el kell távolítani a bot felületéről.

KARBANTARTÁS

- Minden használat után tisztítsa meg a botot egy puha ruhával.
- Mindig végezzen egy használati tesztet a boton, mielőtt a felhasználó használná.
- Rendszeresen ellenőrizze a cipőt, és cserélje ki, ha elhasználódott. A fekete cipő pótalkatrész kódja: 0809363.

MEGFELELŐSÉGI

NYILATKOZAT

Kizárólagos felelősségünkkel kijelentjük, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai termékek alacsony kockázati kategóriába tartoznak (Risk Class I) kategóriába tartoznak, és megfelelnek az 745/2017 európai rendelet követelményeinek, valamint az esetleges vonatkozó szabványoknak és jogszabályoknak.

FIGYELEM (!)

- A termék meghibásodása vagy működési zavara esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a felhatalmazott és képzett képviselővel.
- A következő termék használata a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő célokra tilos.
- A MOBIAK A.E. nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő használatából eredő károkért.
- A MOBIAK A.E. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre a termékben és a következő kézikönyvben annak tulajdonságainak javítása érdekében.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Ha egy napon úgy találja, hogy termékét ki kell cserélni, vagy már nem használja, gondoljon a környezet védelmére:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi háztartási hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási szimbólumnak).
- 2) Forduljon a helyi önkormányzathoz, hogy megmutassák Önnek, hol adhatja le termékét újrahasznosításra.
- 3) A már nem használt termék megfelelő helyen történő elhelyezésével segít megóvni a környezetet, és elősegíti a készülék anyagainak újrahasznosítását.

Garancia

A termékre egy (1) év garancia vonatkozik a vásárlás napjától számítva. A garancia gyári hibákat fedez, de NEM fedezi a helytelen használatból, rossz karbantartásból, módosításból, visszaélésből vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő hibákat.

A garancia nem terjed ki az alábbiak által okozott károkra vagy hibákra: természeti katasztrófák, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ahol előírva), szállító cégek.

Garancia űrlap

Vásárlói adatok

Név és vezetéknev:

Vásárlás dátuma: S/N.....

LOT:.....Telefon:

Üzlet adatai

Név:

Cím:.....
.....

Telefon:






Üzlet pecsétje

MŰSZAKI ADATOK/TECHNICAL INFORMATION

KÓD	HU LEÍRÁS	MAX TEHERBÍRÁS	ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG
0809257	ÖSSZECSUKHATÓ BOT, FA MINTÁVAL	100 kg	81-92 cm
0809258	ÖSSZECSUKHATÓ BOT, NÉGYZET MINTÁVAL	100 kg	81-92 cm
0809259	ÖSSZECSUKHATÓ BOT, PIROS VIRÁG	100 kg	81-92 cm
0809260	ÖSSZECSUKHATÓ BOT, KÉK VIRÁG	100 kg	81-92 cm
0809261	ÖSSZECSUKHATÓ BOT, "TIGRIS" MINTÁVAL, FA FOGÓVAL	100 kg	81-92 cm



A címkére, a főkartonra és/vagy a felhasználói kézikönyvre nyomtatott szimbólumok leírása

	Orvosi eszköz		CE jel
	Gyártó		Gyártási dátum
	Termék szám		Olvassa el a használati utasítást
	Sorozatszám		Ne használja ha a csomagolás sérült
	Tételszám		Helyes irányba, felfelé
	Egyedi eszköz azonosító		Tartsa távol a napfénytől
	Tartsa szárazon		Rakodási magasság
	Óvatosan kell kezelni		Törékeny
	Csak beltéri használatra		Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéairól szóló irányelv