

REF :0805661



REF 0805661	Magyar leírás 360°-ban FORGÓ KÁD ÁTSZÁLLÍTÓ PAD
-----------------------	---

RENDELTESSZERŰ FELHASZNÁLÁS:

Az áthelyező kádas pad lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy növelje az önállóságát zuhanyozás és a napi személyes higiénia során, csökkentve az állás okozta izomfáradtságot, valamint a csúszás és sérülések kockázatát. A csúszásmentes gumitalpak biztosítják a tapadást a padlóhoz és a kád/zuhany felületéhez, az állítható magasságú lábak pedig lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy könnyen módosítsa a teljes magasságot az igényeinek megfelelően. A háttámla és az öv további biztonságot és kényelmet biztosít. Az ülés egy gomb segítségével csúsztatható, és egy könnyen használható kar segítségével 360°-ban elforgatható.

JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK:

A kádas áthelyező pad idősek, kerekesszék-használók, ágyéki, térd- vagy csípőízületi mozgáskorlátozottak, valamint mindazok számára készült, akiknek nehézséget okoz az álló helyzet fenntartása a napi személyes higiénia zuhanyozási szakaszaiban. A felhasználónak rendelkeznie kell az egyensúly önállóságával az ülés és az állás során, valamint megfelelő képességgel kell rendelkeznie az ülés megtartásához. A kádas áthelyező padot tilos használni, ha a felhasználónak egyensúlyproblémái vagy érzékelési zavarai vannak.

FIGYELMEZTETÉS (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és kérjük, forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz. • Ha nem olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, akkor ne használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt.
- Ne használja a terméket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- A MOBIÁK S.A. elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan módosításából eredő következményekért.
- A MOBIÁK S.A. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a jelen dokumentumban található információkat.
- A termékek méretei $\pm 3\%$ -os eltérést mutathatnak.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi felhasználás céljából.
- Legyen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyermekek a termékkel játszanak.
- Mindig fokozott óvatossággal kell eljárni a mozgó alkatrészek közelében, amelyek beszorulhatnak a végtagokba és sérülést okozhatnak.
- Ne próbálja meg a terméket a levehető alkatrészeknél fogva emelni.
- Védje a terméket a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK:

- Az utasításokban feltüntetett maximális felhasználó súlyát tilos túllépni.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően és stabil helyzetben van-e összeszerelve.
- Az ülés csak akadálymentes felületen használható.
- Összeszerelés során szigorúan tartsa be a felhasználói kézikönyvben leírtakat.
- A szerelés vagy összeszerelés során megnőhet az ujsérülések veszélye.
- Ne himbálózzon az ülésen, mert ez a lábak megcsúszásához, felborulásához vagy beeséséhez vezethet. Ha zuhanyszéket használ, mindig tartsa az ülést a 4 lábán.
- Ne módosítsa az ülést és annak alkatrészeit semmilyen módon.
- Ne használja a zuhanyülőkét, ha sérült vagy bármilyen módon átalakított. A repedések és deformációk erősen befolyásolhatják a készülék teljesítményét és biztonságát.
- Használat után a zuhanyülőkét el kell távolítani a zuhanytálcáról az akadályok elkerülése érdekében.
- Ne használja a zuhanyülőkét a rendeltetésétől eltérő célra.
- A zuhanyülőkét tilos a szabadban tárolni.
- Ellenőrizze, hogy a kád átjárópadjának lábai stabilak-e, a karfák rögzítve vannak-e, és hogy simán forog-e.

KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK:

A biztonságos használat és a megfelelő higiéniai színvonal garantálása érdekében a felhasználónak minden használat előtt el kell végeznie ezeket az eljárásokat.

A felhasználónak meg kell győződnie a készülék és alkatrészeinek szerkezeti épségéről. A tisztítási és fertőtlenítési eljárásokhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Viseljen kesztyűt.
2. A legpontosabb fertőtlenítés érdekében távolítsa el a látható szennyeződések.
3. A tisztításhoz használjon vizet vagy enyhe mosószert.
4. Törölje át száraz és tiszta ruhával.
5. Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon általános, enyhe fertőtlenítőszeret.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

Ha egy napon úgy találja, hogy termékét ki kell cserélni, vagy már nem működik, vegye figyelembe a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi kommunális hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, akik tájékoztatják Önt az újrahasznosító központokról, ahová a terméket le kell adni.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

ESEMÉNYJELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatban felmerülő minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek azért, hogy kijelentsük, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba (I. osztály) tartoznak, és megfelelnek az 2017/745/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

GARANCIA: A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik. A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlzott használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkra. NEM terjed ki továbbá azokra az alkatrészekre, amelyek használat közben vagy idővel elkophatnak. A természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ahol alkalmazható), szállítás okozta károkra vagy hibákra a garancia nem vonatkozik. A szervizelés és az alkatrészcsere csak akkor lehetséges, ha azt egy hivatalos szervizrészleg vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális áruk szállítási költségeit a végfelhasználó-vásárló vagy a kereskedő fizeti.

Összeállítás: CSOMAG



LÁBCSÓ ÖSSZESZERELÉS






KARTÁMLA ÖSSZEÁLLÍTÁS



HÁTTÁMLÁK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

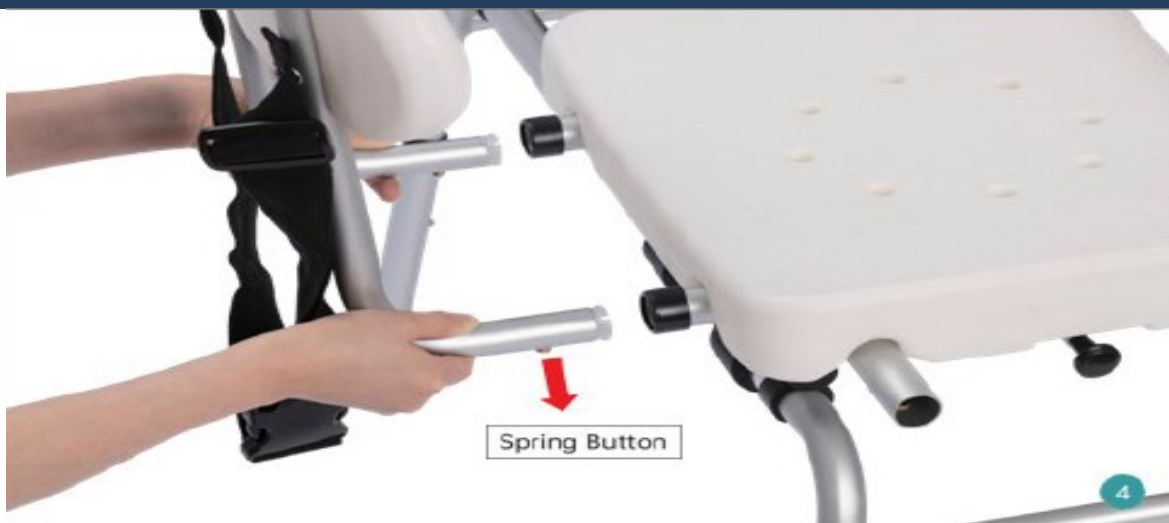

MOZGATÁS-CSÚSZTASSA EL AZ ÜLÉST NYOMJA MEG AZ ALÁBBI GOMBOT



A forgóülés használatakor, ha el kell forgatni, először húzza oldalra a kart, majd forgassa el. Az ülés forgatása közben nem kell tartani a kart. Négy forgásirány (360°) van, az egyik irányból a másikba a kar egy kattantást hallat, ami azt jelzi, hogy a forgóülés egyszer rögzült és nem forog.



REF								
0805661	87cm	87cm	40cm	34cm	34cm	48-58 cm	136kg	6.2kg

- HÁTTÁMLA, ÜLÉS, FORGÓKAR ANYAGA: **PE**
- VÁZ ANYAGA: **ALUMÍNIUM**
- KARTÁMLA ANYAGA: **ALUMÍNIUM ÉS EVA HAB**
- CSÚCSOK ANYAGA: **TPR**

A címkén, a fő dobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvben található szimbólumok leírása

	GYÁRTÓ		TERMÉK SZÁM		OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
	CE JELÖLÉS		GYÁRTÁSI SZÁM		ORVOSI ESZKÖZ
	TÉTEL SZÁM		NE HASZNÁLJA HA A CSOMAGOLÁS SÉRÜLT		EGYEDI ESZKÖZAZONOSÍTÓ
	CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA		ÓVATOSAN KEZELJE		Elektromos és elektronikai hulladékokról szóló irányelv



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

