

Termék részei:

1. összecsukó emelőpánt
2. lábemelő adapter
3. parkoló fék
4. hátsó kerék
5. elülső kerék
6. kartámasz elülső rögzítő csapja
7. lábtámasz
8. lábtámasz tartó rúd
9. háttámasz összeható zárszerkezet
10. kartámasz
11. tolókar





Összeszerelési útmutató:

1, Állítsa a kerekeire a kerekesszéket, majd kissé hajtsa fel a háttámaszokat, majd ezt követően az ülőlap lenyomásával hajtsa szét a kerekesszéket. Ügyeljen arra, hogy teljesen kinyissa, ellenkező esetben a kartámaszok rögzítése nem fog passzolni.

2, Hajtsa fel teljesen a kartámaszokat a helyére és helyezze a furatába a gyorsrögzítő stift kattanásiáig.

Hajtsa le a lábtámaszt tartó rudat, majd helyezze a megfelelő magasságba betolva a lábtámaszt. Ügyeljen, hogy a stift a furatba biztonságosan beugorjon. Ez követően hajtsa le a lábtámaszokat.

3, Hajtsa fel a háttámlát mindkét oldalon a stift bekattanásáig.

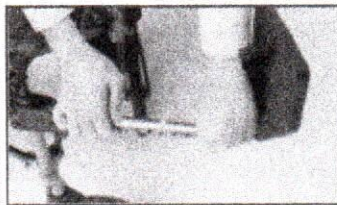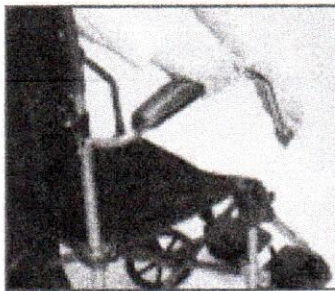

Összecsukás:

1, Nyomja meg a háttámla összecsukó zárszerkezet nyomókarját és hajtsa le a háttámla rudat mindkét oldalon.

2, Húzza meg a kartámasz rögzítő csapot és emelje ki a helyéről a kartámasz első végét, majd enyhén oldal felé tolva hajtsa le a hátsó kerekéig.


3, Hajtsa fel a lábtámaszokat és a rögzítő stift megnyomásával húzza ki a lábtámaszokat a rögzítő rúdból. A rögzítő rudakat hajtsa fel.

4, Az első kerekeket előre járás irányba állítsa be. Az ülőlap két oldalán található fogantyú megemelésével zárja össze a kerekesszéket.



Fék működtetése:

A hátsó kerekeknél elhelyezkedő fékek parkolásra alkalmazhatóak. Nyomja hátra a fékkar befékezéshez és húzza előre a fék kioldásához.

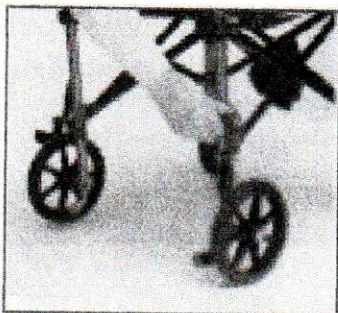

Biztonsági tanácsok:

Maxi mum 115 kg-ig terhelhető.

Az első kerekek megemeléséhez (pl. járdára feljárás) lépjen a lábával a lábadapterre. Ne alkalmazzon nyomást a háttámlára, mert a zárszerkezet meghibásodhat.

Lejtőn kis sebességgel közlekedjen! 10 fokosnál nagyobb lejtőn csak biztos segítséggel üljön a kerekesszékekbe.

Mindig biztonságos, kiegyensúlyozott pozíciót vegyen fel a kerekesszékekben.

Esetleges balesetet okozó akadályokat kerüljön ki.

Csúszólap használata nem javasolt.

A fékek nem használhatóak lassításra.

Karbantartás:

Az alumínium váz és a ülőlapok kárpitja nedves ruhával és általános mosószerrel tisztíthatóak.

Havonta ellenőrizze, hogy a kötések biztonságosak és épek-e.

Tömör kerekek karbantartást nem igényelnek.

Garancia: 12 hónap.

Dátum: _____

Forgalmazó: _____

Származás: Németország. Gyártó: Drivemedical GMBH www.drivemedical.de